



geemarc

CL600

Larmtelefon med hörslina, indikeringslampa
och nummerpresentation

Bruksanvisning

CL600 (Art nr 273024)



Innehållsförteckning	sida
<u>Inledning</u>	3
<u>Grundläggande om CL600</u>	
Bildöversikt	4-5
Display, symboler och menyer	6
Ansluta telefonen, batterier	7-8
Montera telefon på vägg	9
<u>Inställningar</u>	
Ställa in ringsignal	10
Ställa in larm- och ringsignal	10
Ställa in Ton- och pulsval	11
Ställa in språk	11
Olika typer av tidsformat	12
Ställa in tid och datum	13
Justera displayens kontrast	13
Automatisk inställning av textstorlek i displayen	14
Automatisk brytning av samtal	14
Time break recall - "R"	15
Justera utgående volym	15
<u>Använda telefonen</u>	
Volym- och tonkontroll	16
Svara på inkommande samtal	17
Ringa ett samtal	18
Hands-free	18-19
Återuppringning senast slagna telefonnummer	20
Återuppringning tidigare slagna telefonnummer	20
Radera tidigare slagna telefonnummer	21
Sekretessfunktion	21
Knapparna R, * och #	21
Lagra ett telefonnummer i minnet (direkt-/snabbval)	22
Ringa ett snabbvalsnummer	22
<u>Telefonbok</u>	
Skapa en kontakt i telefonboken	23-24
Skapa en kontakt från inkommande telefonsamtal	24
Ringa en kontakt i telefonboken	25
Radera en kontakt från telefonboken	25
Ändra en kontakt i telefonboken	26

Innehållsförteckning	sida
<u>Avancerade funktioner</u>	
Larmfunktion	27
Lagra ett larmnummer	27
Lagra ett larmmeddelande	28
Spela upp ett lagrat larmmeddelande	29
Använda larmfunktionen	29
Beskrivning av fjärrkontrollen	30
Byta batterier i fjärrkontrollen	30
Använda nummerpresentatören - inkommande samtal	30-31
Använda nummerpresentatören - ringa upp ett nummer	32
Använda nummerpresentatören - radera ett nummer	32
Använda nummerpresentatören - radera alla nummer	32
Samtal väntar	33
Meddelande väntar	34
<u>Tillbehör</u>	
Vibrator	34
Headset	34
Halsslinga	34
Slingkrok	34
<u>Övrigt</u>	
Underhåll och skötsel	35
Om telefonen inte fungerar	35
Teknisk information	35
Miljö	35

Inledning

Tack för att du har valt att köpa en CL 600 telefon. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Varning

Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att telefonen är ställd på den lägsta nivån för respektive användare och att varje användare känner till denna funktion.


OBS!

För att minska risken att telefonen förstörs av blixtnedslag bör telefonen kopplas ur vid kraftiga åskoväder.


Bildöversikt



Bildöversikt

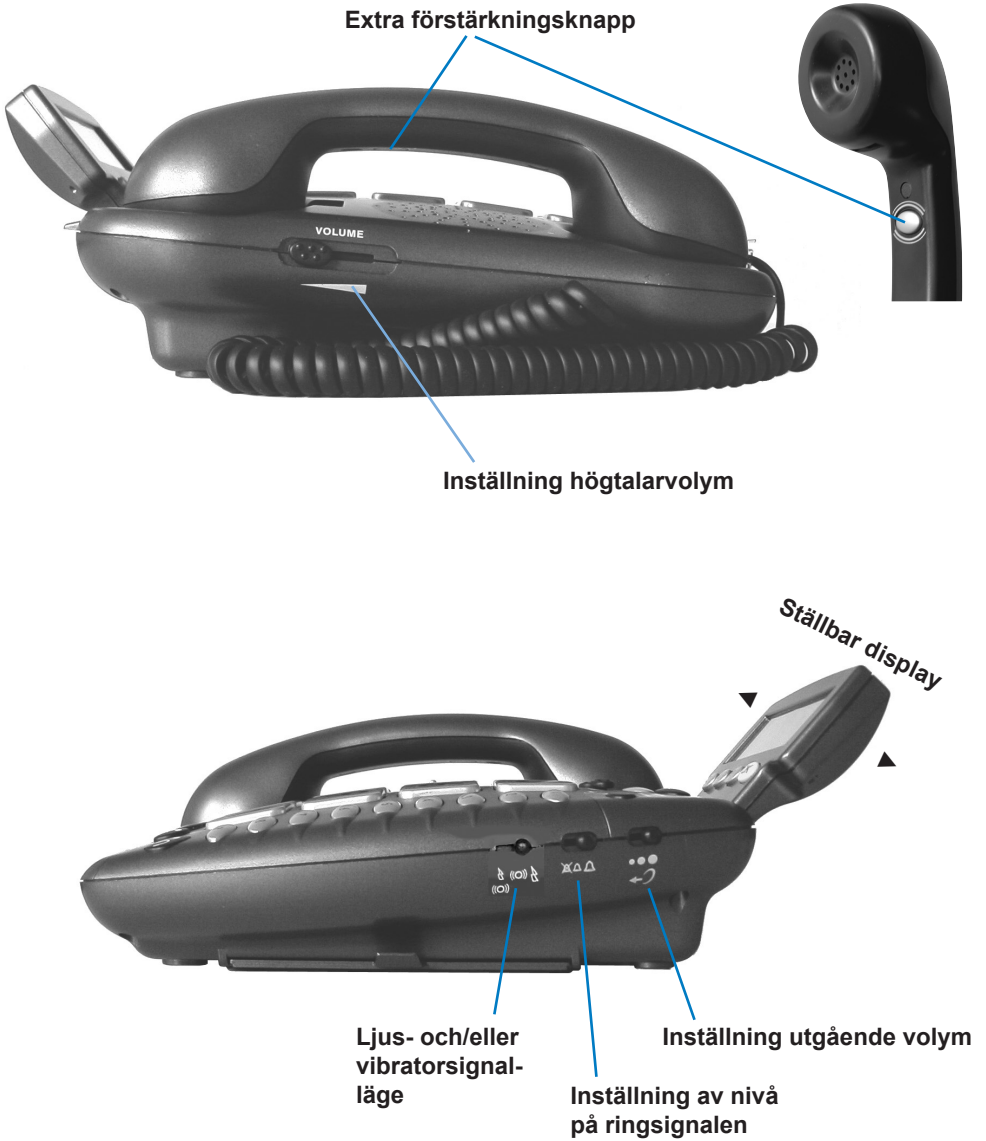

Display, symboler och menyer

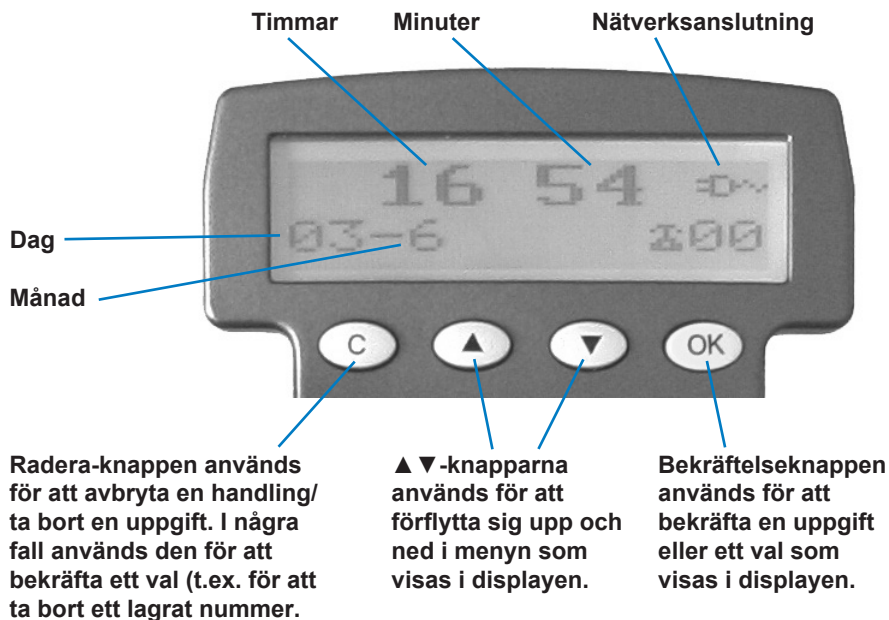


När telefonen är ansluten till telefon- och elnätet visas symboler i displayen som underlättar användningen av telefonen.



Batterinivå (symbolen visar om batterieliminatoren ej är ansluten till elnätet eller vid strömavbrott)




Anslutning till elnätet

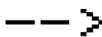

Minneslagring krävs. OBS! Verifiera funktionen.



Kontrast i displayen

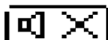

Sekretessfunktionen är aktiverad



Högtalaren är aktiverad



Visar före ett telefonnummer som registrerats i nummer-presentatören



Visar nya telefonnummer som registrerats i nummer-presentatören

Ansluta telefonen, batterier

- Använd ej laddningsbara batterier.
- Släng ej batterier i hushållsavfallet, utan släng dem enligt gällande miljöföreskrifter.



1. Anslut telefonluren till telefonen.
2. Öppna batterifacket som finns på undersidan av telefonen.
3. Placera 4 blyfria alkaliska batterier (AAA/LR03 1,5V; ingår ej i leveransen). Batterierna behövs som backup vid strömavbrott (för att behålla lagrade telefonnummer i minnet och användning av telefonboken). Om strömavbrott inträffar eller om transformatorn ej är inkopplad, visas en batterisymbol i displayen. Denna symbol visar också om batterinivån är låg (fylld symbol=fulla batterier, tom symbol=tomma batterier). **OBS!** Använd ej uppladdningsbara batterier.


4. Sätt tillbaka locket på batterifacket.
5. Anslut telefonkabeln till uttaget på telefonens baksida (se illustration sid 7) och anslut den andra änden av kabeln till den medföljande telefonpluggen. Anslut sedan telefonpluggen till telefonjacket.
6. Anslut sladden till batterieliminatortill telefonen och därefter till eluttaget. Använd ett eluttag i nära anslutning till telefonen för att möjliggöra snabb urkoppling om det skulle uppstå några problem.

OBS!

Transformatorn måste vara inkopplad för att telefonens alla funktioner skall kunna utnyttjas. Batterierna behövs för backup vid strömavbrott (se information punkt 3, ovan).

Om transformatorn kopplas ur av misstag och telefonen saknar batterier (eller om dessa är tomma) fungerar endast telefonens grundläggande funktioner, såsom att ringa och ta emot samtal.

Montera telefonen på vägg

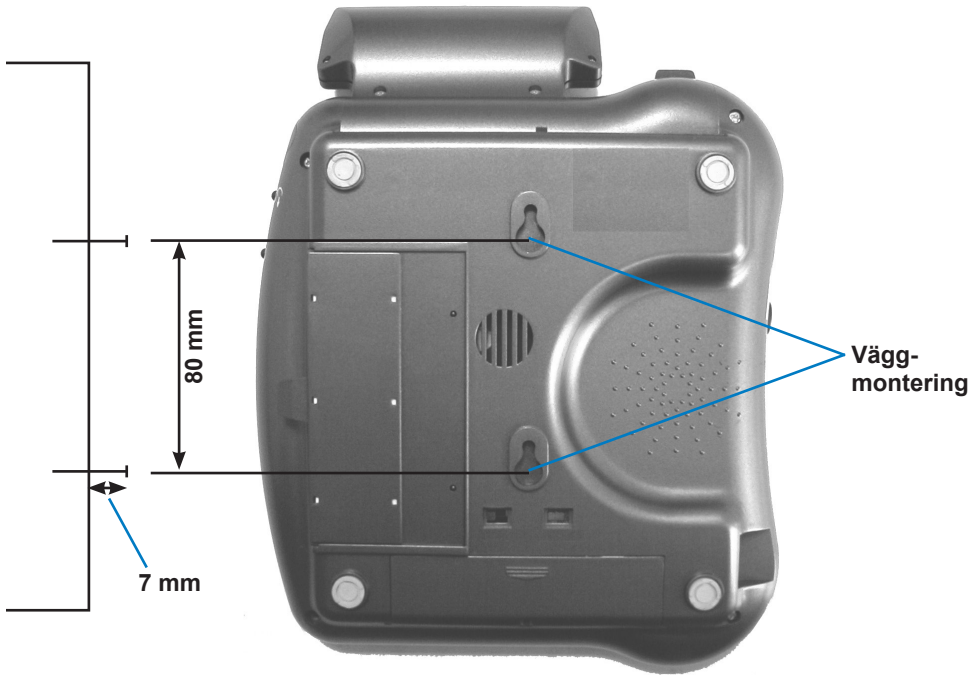

Skruvarna bör sticka ut från väggen 6-7 mm. Häng upp telefonen på skruvskallarna och dra den försiktigt nedåt för att haka fast telefonen på väggen.



Vid väggmonterad telefon – skjut upp läget på lurfästet för att säkerställa att luren hängs upp säkert.

Ställa in ringsignal

Ringsignalen (akustisk) kan ändras till önskvärd nivå genom att ändra på inställningen med hjälp av omkopplaren på telefonens högra sida (se illustration sid 5). Du kan välja mellan hög, låg eller avstängd:



Hög ringsignal




Låg ringsignal



Avstängd ringsignal

Telefonen levereras med ringsignalen inställd på hög.

Om du inte tycker om ringsignalens melodi går den att ändra genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen 
2. Använd **▲▼** tills du kommer till telefoninställningar ("SET PHONE").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd **▲▼** för att ställa in ringsignal ("SET RING").
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Använd **▲▼** och välj ett av ringsignalsalternativen 1-4.
7. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta det alternativ du valt.
8. Den valda signalen hörs.
9. Tryck på knappen **C** tre gånger för att gå ur menyn.

Ställa in larm- och ringsignal

Larm- och ringsignalen kan ställas in i 3 kombinationer med hjälp av omkopplaren på telefonens högra sida (se illustration sid 5).



Ringsignal och blixtlampa




Ringsignal och vibrator



Ringsignal, vibrator och blixtlampa

Ställa in ton- och pulsval


Telefonen levereras inställd med tonval. Går det inte att ringa ut från telefonen så kan din telefonväxel fordra pulsval. Så här ställer du om telefonen till pulsval. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd **▲▼** tills du kommer till telefoninställningar ("SET PHONE").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd **▲▼** för att välja ton-/pulsval ("TONE/PULSE").
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Använd **▲▼** och välj ton- eller pulsval ("TONE"), ("PULSE").
7. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
8. Tryck på knappen **C** två gånger för att gå ur menyn.

Ställa in språk


Det finns 16 olika språk att välja mellan (Danish, Finland, Norway, English1, China, Korean, Greece, Austral, Turkish, English3, Spanish, Nederland, French, Germany, Poland, Sweden).

Välj språk genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd **▲▼** tills du kommer till telefoninställningar ("SET PHONE").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd **▲▼** för att välja språk ("SET LANGUAGE").
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Använd **▲▼** tills du kommer till det språk du vill ha. Välj t. ex. "SWEDEN" om du vill ha svenska.
7. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
8. Tryck på knappen **C** två gånger för att gå ur menyn.


Olika typer av tidsformat – datum

Du kan välja mellan två typer av datumformat; dag-månad eller månad-dag. Ändra genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd **▲ ▼** tills du kommer till telefoninställningar ("SET PHONE").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd **▲ ▼** för att välja hur datum ska visas ("DATE FORMAT").
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Använd **▲ ▼** för att välja dag-månad med 2 siffror ("DD-MM") eller månad-dag med 2 siffror ("MM-DD").
7. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
8. Tryck på knappen **C** två gånger för att gå ur menyn.

Olika typer av tidsformat – tid






Du kan välja mellan två typer av tidsformat: 12- eller 24-timmarsvisning. Ändra genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd **▲ ▼** tills du kommer till telefoninställningar ("SET PHONE").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd **▲ ▼** för att välja hur tiden ska visas ("HOUR FORMAT").
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Välj mellan 12- eller 24-timmarsvisning ("12 HOUR"), ("24 HOUR").
7. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
8. Tryck på knappen **C** två gånger för att gå ur menyn.

Om du väljer 12-timmarsvisning föregås klockslag före klockan 12.00 av "AM" och klockslag efter klockan 12.00 av "PM".

Ställa in tid och datum








Tid och datum ställs in i följande ordning; timmar, minuter, dag, månad. Ställ in tid och datum genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd   för att välja att ställa in klockslag och datum ("SET TIME").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd   för att välja önskad siffra och förflytta dig till nästa siffra.
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta och komma till nästa position. Gör om enligt punkt 4 och 5 tills tid och datum är inställt.
6. Tryck på knappen **C** en gång att gå ur menyn.

Justera displayens kontrast

Displayen har en bakgrundsbelysning som stängs av automatiskt 15 sekunder efter avslutad aktivitet. Luren skall vara pålagd.


Kontrasten kan ändras genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd   tills du kommer till telefoninställningar ("SET PHONE").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd   för att välja displayens kontrast ("LCD CONTRAST").
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Använd   för att öka eller minska kontrasten i displayen.
7. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta eller **C** för att gå ur menyn.

Automatisk inställning av textstorlek i displayen


Om denna funktion är aktiverad kan upp till 18 siffror i det nummer du slår visas i displayen. Om funktionen är avaktiverad visas endast 8 siffror i displayen. Luren skall vara pålagd.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd **▲▼** tills du kommer till telefoninställningar ("SET PHONE").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd **▲▼** för att välja textstorleksfunktionen ("DIM:X---->x").
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Använd **▲▼** och välj "TILL" eller "FRÅN" för att aktivera eller avaktivera funktionen.
7. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
8. Tryck på knappen **C** två gånger för att gå ur menyn.

Automatisk brytning av samtal


Om denna funktion är aktiverad bryts samtalet automatiskt efter 8 sekunder om linjen är upptagen. Aktivera/avaktivera funktionen genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd **▲▼** tills du kommer till telefoninställningar ("SET PHONE").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd **▲▼** för att välja automatisk brytning av samtal ("AUTO ON HOOK").
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Använd **▲▼** och välj "TILL" eller "FRÅN" för att aktivera eller avaktivera funktionen.
7. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
8. Tryck på knappen **C** två gånger för att gå ur menyn.

Time break recall - "R"-funktionen


Kontrollera att din CL600 är korrekt inställd. Telefonen levereras inställd på 100 mS som är det korrekta värdet för Sverige. I en del länder används 300 mS eller 600 mS. Luren skall vara pålagd.

Inställningen ändras genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.


1. Tryck på knappen 
2. Använd **▲▼** tills du kommer till telefoninställningar ("SET PHONE").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd **▲▼** för att välja R-funktionen ("SET FLASH").
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Använd **▲▼** och välj önskat alternativ ("FLASH100 mS"/"FLASH 300mS"/"FLASH600mS")
7. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
8. Tryck på knappen **C** två gånger för att gå ur menyn.

Justera utgående volym

Om Du har svag röst eller om den Du pratar med har svårt att uppfatta vad Du säger, kan Du öka utgående volym. Justera volymen med omkopplingsknappen som sitter på telefonens högra sida vid nedanstående symbol (se sid 5).

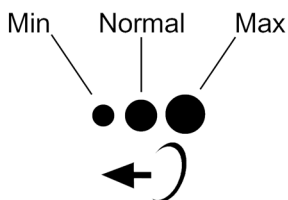

Volym- och tonkontroll

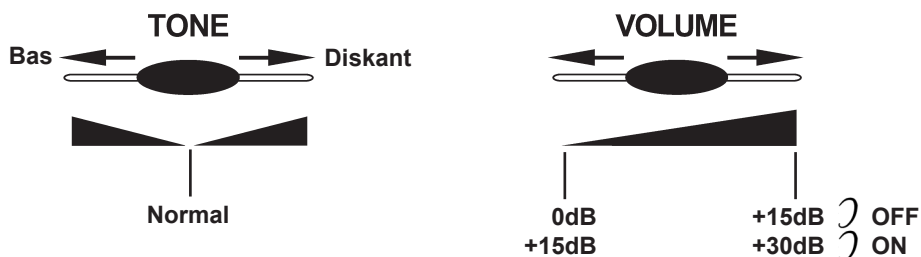

Aktivera ton- och volym under pågående samtal

Knappen för att aktivera eller avaktivera ton- och volymfunktionen, $\rightarrow \mathcal{J}$, sitter uppe till höger på telefonen (se illustration sid 4). När den är aktiverad kan du justera ton- och volym med kontrollerna efter önskemål (se illustrationer ovan).

Omkopplaren på telefonens baksida

När omkopplaren \mathcal{J} på telefonens baksida (se illustration sid 7) är ställd i läge "ON" är ton- och volymfunktionen aktiverad automatiskt varje gång telefonen används. I läge "ON" justeras volymen 15-30dB och den röda lysdioden som är placerad till vänster om knappen $\rightarrow \mathcal{J}$ lyser.

Om omkopplaren är ställd i läge "OFF" kan ton- och volymfunktionen aktiveras genom att trycka in knappen $\rightarrow \mathcal{J}$. I läge "OFF" justeras volymen 0-15dB och den röda lysdioden som är placerad till vänster om knappen $\rightarrow \mathcal{J}$ är släckt.

Lurens kombinerade förstärkar- och sekretessknapp







Man kan också få extra volym på inkommande ljud genom att trycka på telefonlurens förstärkar- och sekretessknapp (se illustration sid 5). Volymen justeras då upp till 12dB. När förstärkar- och sekretessknappen är intryckt fungerar den samtidigt som sekretessknapp för utgående ljud.

OBS!

När både ton- (diskanten), volymkontrollen (se illustration sid 4) och utgående volym (se illustration sid 5) är ställda i maxläge och omkopplaren \mathcal{J} (se illustration sid 7) för ton- och volymfunktionen är aktiverad, kan ett störande, visslande, ljud uppträda i luren. Sänk utgående volym om detta inträffar. Kontrollerna reglerar även volym och ton i headset/halsslinga/slingkrok.



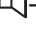

Svara på inkommande samtal

När någon ringer avger telefonen en ringsignal och ett blinkande rött sken. Telefonnumret och/eller namnet på den som ringer visas i displayen om du har nummerpresentationstjänst. Du kan välja att svara och avsluta samtal på följande sätt:

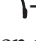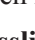1. Lyft på telefonluren när det ringer och lägg tillbaka den när samtalet är avslutat.
2. Tryck på -knappen och svara med handsfree-funktionen. Tryck åter på -knappen när du avslutat samtalet.
3. Du kan också svara i telefonen med fjärrkontrollen på armen (se illustration sid 4).
Tryck på den röda -knappen på fjärrkontrollen varvid telefonen ställs i handsfree-läge. Tryck på den svarta -knappen på fjärrkontrollen när du har avslutat samtalet.
4. Med ett headset anslutet i telefonen (se illustration sid 7) gör du så här.
Tryck på -knappen och ring på vanligt sätt. Tryck åter på -knappen när du avslutat samtalet.

Använda halsslinga/slingkrok

Du kan välja att svara och avsluta samtal på följande 3 sätt med en halsslinga ansluten i telefonen (se illustration sid 7):

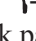1. Tryck på -knappen för att aktivera halsslingan, och headsetet (samt tryck på halsslingans På/Av-knapp beroende på om du har en sådan halsslinga). Prata sedan i headsetsmikrofonen. Tryck på -knappen när du avslutat samtalet.
2. Tryck på -knappen för att aktivera halsslingan. Prata sedan i mikrofonen på telefonen (de små hålen bredvid -symbolen).
3. Lyft telefonluren och prata på vanligt sätt i lurens mikrofon.

Ringa ett samtal

1. Lyft på telefonluren.
2. Invänta kopplingston och slå önskat nummer. Siffrorna som du slår visas i displayen när du slår numret. Om du slår en siffra fel, kan du backa med knappen **C**.
3. Lägg på luren när samtalet är avslutat.


Slå numret först

1. Slå önskat nummer med luren fortfarande pålagd. Om du slår en siffra fel, kan du backa med knappen **C**.
2. Lyft luren. Telefonen ringer upp det slagna numret.
3. Lägg tillbaka luren när samtalet är avslutat.




Hands-free

CL 600 har inbyggd högtalare och mikrofon (se illustrationer sid 4) för hands-free-funktion, som möjliggör att omgivningen också kan lyssna på samtalet. Du kan även ansluta headset/halsslinga/slingkrok till telefonen (se illustration sid 7).




Högtalarvolymen justeras med reglaget som sitter på telefonens vänstra sida bredvid högtalaren (se illustration sid 4 och 5).

För att ljudet skall nå fram till den du pratar med, bör du sitta riktad mot mikrofonen. Den sitter längst ned till höger bredvid -symbolen på telefonen (se illustration på sid 4).



Ringa med hands-free-funktionen

1. Slå först önskat nummer. Om du slår en siffra fel, kan du backa med knappen **C**.
2. Tryck på -knappen. Nu aktiveras högtalarfunktionen och telefonen ringer upp det slagna numret.
3. När du får svar pratar du på vanligt sätt riktad mot mikrofonen på telefonen (de små hålen bredvid -symbolen). Justera högtalarvolymen vid behov.
4. Samtalet avslutas genom att trycka på -knappen igen.


Svara med hands-free-funktionen

1. Tryck på -knappen och svara riktad mot mikrofonen på telefonen (de små hålen bredvid -symbolen).
2. Samtalet avslutas genom att trycka på -knappen igen.

Avsluta hands-free-funktionen under samtal





Lyft på luren om du vill avbryta högtalarfunktionen under ett samtal. Då slocknar -symbolen i displayen och istället visas -symbolen. Fortsätt samtalet.

Aktivera hands-free-funktionen under samtal

Tryck och håll in -knappen samtidigt som du lägger på luren. Samtalstiden visas några sekunder i displayen. Ta bort samtalstiduret genom att trycka på knappen **C**. Trycker du två gånger på **C**-knappen återställer du samtalstiduret till 0.

Använda headset/halsslinga/slingkrok




Du kan välja att svara och avsluta samtal på följande 3 sätt med headset/halsslinga/slingkrok anslutna i telefonen (se illustration sid 7):

1. Tryck på -knappen för att aktivera halsslingan och headsetet samt tryck på halsslingans På/Av-knapp (beroende på vilken halsslinga du har). Prata sedan i headsetsmikrofonen. Tryck på -knappen när du avslutat samtalet.
2. Tryck på -knappen för att aktivera halsslingan. Prata sedan i mikrofonen på telefonen (de små hålen bredvid -symbolen)
3. Lyft telefonluren och prata på vanligt sätt i lurens mikrofon.

Se ovan angående att avsluta respektive aktivera halsslingan/headset/slingkroken under pågående samtal.

Återuppringning senast slagna nummer





Med denna funktion kan du automatiskt ringa upp senast slagna telefonnummer.

1. Lyft luren eller använd högtalaren (tryck på -knappen) eller använd headset (tryck på -knappen).
2. Invänta kopplingston och tryck på knappen .
3. Det senast slagna telefonnumret rings nu upp automatiskt.
4. Tryck på knappen OK för att bekräfta.

Återuppringning tidigare slagna nummer

Med denna funktion kan du automatiskt välja att ringa upp något av de 30 senast slagna telefonnumren.

Välj något av de 30 senast slagna telefonnumren genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på **OK**-knappen. I displayen visas ”UPPRINGT”, senast slagna nummer, totalt antal slagna nummer samt datum- och tidsangivelse för när numret ringdes upp.
2. Använd   för att bläddra bland numren och välj det nummer du önskar ringa upp.
3. Lyft luren eller använd högtalaren (tryck på -knappen) eller använd headset (tryck på -knappen).
4. Valt telefonnummer rings nu upp automatiskt.




Radera tidigare slagna telefonnummer

Gör på följande sätt för att ta bort ett eller flera av de 30 senast uppringda telefonnumren. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen **OK**. I displayen visas ”UPPRINGT”, senast slagna nummer, totalt antal slagna nummer samt datum- och tidsangivelse för när numret ringdes upp.
2. Använd **▲ ▼** för att bläddra bland numren och välj det nummer du vill radera.
3. Tryck på knappen **C**. I displayen visas ”RADERA?”
4. Tryck på knappen **C** igen för att bekräfta borttagning av telefonnumret.
5. Tryck på knappen **OK** för att gå ur menyn.

Sekretessfunktion

Om du vill prata ostört med någon bredvid dig, utan att personen i telefonen ska höra vad ni säger, gör du så här:

1. Be personen vänta och tryck på sekretessknappen .
2. På displayen visas nu symbolen . Nu kan personen i telefonen inte höra vad du/ni säger, men du/ni hör vad personen i telefonen säger.
3. Tryck åter på -knappen och fortsätt samtalet.


Knapparna R, * och

Dessa knappar används för att utnyttja tjänster som erbjuds av din telefonoperatör. Detaljerad information fås av telefonoperatören.

Lagra ett telefonnummer i minnet (direkt-/snabbval)

CL 600 kan lagra 9 direktnummer. De tre snabbvalsknapparna (fr. vänster (P1 röd/P2 blå/P3 grön) sitter längst upp på telefonen (se illustration sid 4). Varje nummer kan innehålla max 30 siffror.

Gör på följande sätt för att lagra ett telefonnummer i minnet.

1. Lyft på telefonluren.
2. Tryck på -knappen.
3. Slå det nummer du vill lagra.
4. Tryck på den knapp som du vill lagra numret på (minnesknapparna **M1**, **M2**, **M3**, **M4**, **M5** eller **M6** alternativt någon av de färgade snabbvalsknapparna **P1**, **P2**, **P3**).
5. ”LAGRAT” visas i displayen när numret är lagrat.
4. Tryck på knappen **C** för att gå ur menyn.



De lagrade numren kan noteras på listan under telefonen på höger sida.

OBS!

Om det inte sitter några batterier i telefonen och du av misstag drar ur sladden eller om det blir strömavbrott, försvinner de lagrade numren. Om du registrerar ett nytt nummer försvinner det gamla automatiskt.

Ringa ett snabbvalsnummer

Gör på följande sätt för att ringa upp något av de tre snabbvalsnumren. Luren skall vara pålagd.

1. Lyft luren eller använd högtalaren (tryck på -knappen) eller använd headset (tryck på -knappen).
2. Tryck på någon av minnesknapparna **M1**, **M2**, **M3**, **M4**, **M5** eller **M6** alternativt någon av de färgade snabbvalsknapparna **P1**, **P2**, **P3** och telefonnumret rings upp automatiskt.

De lagrade numren kan noteras på listan under telefonen på höger sida.

Skapa en kontakt i telefonboken

Upp till 99 kontakter kan lagras i den inbyggda telefonboken med namn och telefonnummer. Gör på följande sätt för att skapa en kontakt i telefonboken. Luren skall vara pålagd.


1. Tryck på knappen **⊗**.
2. Använd **▲▼** tills du kommer till telefonboken ("PHONE BOOK").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd **▲▼** tills du kommer till "LÄGG TILL".
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Slå telefonnumret (max 30 siffror per kontakt). Använd knappen **C** för att radera en felaktig siffra.
7. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta telefonnumret och skriv in namnet på den person som telefonnumret avser. Välj bokstav genom att trycka ned den nummerknapp där önskad bokstav finns tryckt på knappen. Se nästa sida för detaljerad information om ytterligare tecken och hur bokstavsknapparna används.
8. Tryck på knappen **OK** i tre sekunder för att lagra kontakten när du skrivit in namnet.
9. När du gjort detta kan du antingen skapa en ny kontakt eller trycka på knappen **C** för att gå ur menyn.

Användning av bokstavsknapparna

När du skriver in namnet kan du använda nedanstående tabell för att välja rätt bokstav. En grunduppsättning av bokstäver finns tryckt på nummerknapparna. Å och ä kan i dagsläget inte användas. Ersätt dessa med aa eller ae alternativt använd endast bokstaven a.

Knapp	Bokstav	Knapp	Bokstav
1	. ? - " ' <	6	M N O m n o 6 Ö Ø
2	A B C a b c Æ Ø	7	P Q R S p q r s
3	D E F d e f	8	T U V t u v Û
4	G H I g h i	9	W X Y Z w x y z
5	J K L j k l	0	+ & @ / \$ %

- Lägga till ett mellanslag: Tryck på knappen **OK** två gånger.

- Nästa bokstav är samma som den du just registrerat (eller om bokstaven befinner sig på samma knapp): Tryck först på **OK**-knappen och välj därefter önskad bokstav.
- Om du valt fel bokstav: Tryck på knappen **C**.
- Lägga in en paus i telefonnumret: tryck på knappen  (ett P visas i displayen).

Skapa en kontakt från inkommande telefonsamtal

Om du har nummerpresentationstjänst kan du skapa en kontakt från ett inkommande samtal. Varje inkommande samtal sparas som en egen post i nummerpresentatörens lista.

Gör på följande sätt för att skapa en kontakt i telefonboken från en post som finns lagrad i nummerpresentatören. Luren skall vara pålagd.










1. Inkommande samtal visas i displayen.
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja det nummer som du vill lagra i telefonboken.
3. Tryck på och håll nere knappen **OK** tills dess att den sista siffran i det valda numret blinkar. Du kan också ändra numret i detta läge.
4. Bekräfta numret genom att trycka på knappen **OK**.
5. Nu kan du ändra eller skriva in namnet på den kontakt vars nummer du registrerat eller tryck på och håll nere knappen **OK** i tre sekunder för att bekräfta lagring av föreslaget telefonnummer och namn.
6. Tryck på knappen **C** för att gå ur menyn.

OBS!

Du kan titta i listan på inkommande samtal under ett pågående samtal genom att trycka på knappen **OK** och sedan knapparna **▲▼** för att förflytta dig i listan.








Ringa en kontakt i telefonboken

Gör på följande sätt för att ringa en kontakt i telefonboken. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd   tills du kommer till telefonboken ("PHONE BOOK").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd   tills du kommer till "BLÄDDRA".
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Använd knapparna   för att välja den kontakt du vill ringa upp. Du kan hitta kontakten snabbare genom att trycka in första bokstaven i namnet.
7. Lyft luren eller använd högtalaren (tryck på -knappen) eller använd headset (tryck på -knappen).
8. Telefonnummer rings upp automatiskt.


Radera en kontakt från telefonboken

Gör på följande sätt för att ta bort en kontakt från telefonboken. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd   tills du kommer till telefonboken ("PHONE BOOK").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd   tills du kommer till "BLÄDDRA".
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
6. Använd knapparna   för att välja den kontakt du vill ta bort.
7. Tryck på knappen **C**. I displayen visas "RADERA?".
8. Tryck på knappen **C** igen för att bekräfta borttagningen av kontakten.
9. Tryck på knappen **OK** för att gå ur menyn.

Ändra en kontakt i telefonboken

Gör på följande sätt för att ändra en kontakt i telefonboken. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd **▲ ▼** tills du kommer till telefonboken ("PHONE BOOK").
3. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
4. Använd **▲ ▼** tills du kommer till "BLÄDDRA".
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta.
3. Använd knapparna **▲ ▼** för att välja den kontakt du vill ändra.
4. Tryck och håll nere knappen **OK** tills dess att den sista siffran i det valda numret blinkar.
5. Tryck på knappen **C** för att ändra telefonnumret och registrera ett nytt nummer.
6. Tryck på knappen **OK**.
7. Nu kan du ändra namnet på kontakten.
8. Tryck på knappen **C** för att ta bort en bokstav. För ytterligare information om hur man registrerar en kontakt, v.v. se "Skapa en kontakt i telefonboken" på sid 23.
9. Tryck och håll nere knappen **OK** i tre sekunder för att bekräfta lagring av telefonnummer och namn.
10. Tryck på knappen **C** för att gå ur menyn.

Larmfunktion


Larmfunktionen gör att du enkelt kan ringa efter hjälp i en nödsituation. För att aktivera larmfunktionen så måste du lagra ett larmtelefonnummer och spela in ett larmmeddelande. Detta meddelande läses sedan upp automatiskt för personen som svarar på det larmtelefonnummer du har lagrat.

OBS!

Transformatorn måste vara ansluten i telefonen. Vid strömavbrott behövs backup-batterierna för att säkerställa att larmfunktionen ska fungera.

Lagra ett larmnummer

CL600 telefonen klarar att lagra 6 olika larmtelefonnummer i minnet, med max 18 siffror för varje nummer. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja att lagra larm ("SET SOS"). Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
3. Använd knapparna **▲▼** för att välja larmnummer ("SOS NUMBER"). Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
4. Använd knapparna **▲▼** för att välja ett av de lediga larmnummerplatserna. Du kan välja mellan larmnummerplats 1-6, t.ex. larmnummerplats 1 ("SOS NUMBER 1"). Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
5. Slå telefonnumret som du vill lagra. Använd knappen **C** för att radera en felaktig siffra. Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
6. Stanna kvar i menyn om du vill lagra ett till larmtelefonnummer på nästa larmnummerplats. Använd knapparna **▲▼** för att välja nästa larmnummerplats, ex. larmnummerplats 2 ("SOS NUMBER 2") eller något av de andra lediga larmnummerplatserna och gör enligt punkt 4-5 ovan igen.
7. Tryck **C**-knappen tre gånger för att går ur menyn.

Lagra ett larmmeddelande


Det larmmeddelande du lagrar ska instruera den person som svarar vad han/hon ska göra för att kunna prata med dig. Om inget sådant meddelande är lagrat, ringer telefonen automatiskt upp nästa larmtelefonnummer som du har lagrat. Tiden för ett larmmeddelande får inte vara längre än max 10 sekunder. Du kan bara lagra ett larmmeddelande. Alltså kommer samma larmmeddelande spelas upp oavsett vilket larmtelefonnummer (1-6) som besvarar ditt larm.

Exempel på larmmeddelande:

”Hej, det är (säg ditt namn) som ringer. Jag behöver hjälp. Slå vilket nummer som helst mellan 0-9 så att jag kan berätta vad som hänt.”


Din larmkontaktperson kan slå ett nummer under tiden ditt meddelande läses upp eller direkt efter att meddelandet är uppläst. På detta sätt bekräftar din larmkontaktperson att han/hon har mottagit ditt meddelande och kan hjälpa dig.

Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja lagra larm (”SET SOS”). Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
3. Använd knapparna **▲▼** för att välja larmmeddelande (”SOS SOUND”). Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
4. Använd knapparna **▲▼** för att spela in larmmeddelande (”RECORD SOUND”). Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
5. Tala in ditt meddelande. Prata mot telefonens mikrofon (se illustration sid 4) med ett avstånd på ca. 20-30cm. Avsluta inspelningen genom att trycka på **OK**-knappen.
6. Tryck **C**-knappen tre gånger för att går ur menyn.


Spela upp ett lagrat larmmeddelande

Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja lagrat larm ("SET SOS").
Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
3. Använd knapparna **▲▼** för att välja larmmeddelande ("SOS SOUND").
Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
4. Använd knapparna **▲▼** för att spela upp meddelande ("PLAY SOUND").
Tryck på **OK**-knappen för att spela upp meddelandet.
5. Tryck **C**-knappen tre gånger för att gå ur meny.

Använd larmfunktionen


När du har lagrat larmnummer och spelat in larmmeddelande så är larmfunktionen klar att användas.

1. Tryck på den röda -knappen på fjärrkontrollen (1 pip ljud hörs) eller på telefonenheten (se illustration sid 4).
2. Telefonen slår automatiskt det första larmnumret.
3. När larmkontaktpersonen besvarar ditt samtal så spelas ditt larmmeddelande upp.
Om telefonen inte får svar efter 30 sekunder eller om linjen är upptagen så slår den automatiskt nästa lagrade larmnummer. Om telefonen inte får svar efter 30 sekunder igen eller om linjen är upptagen igen så slår den automatiskt nästa lagrade larmtelefonnummer.
Telefonen ringer ett larmnummer max två gånger.
Larmmeddelandet spelas upp max 3 gånger om larmkontaktpersonen inte besvarar ditt larmsamtal.
4. Tryck på **X**-knappen på fjärrkontrollen (2 pip ljud hörs) för att avsluta larmfunktionen/larmsamtalet. Alternativt kan du avsluta genom att trycka på **STOP**-knappen på telefonenheten (2 pip ljud hörs).

Beskrivning av fjärrkontrollen

Den röda lysdioden lyser när batteriet behöver bytas?

Fjärrstyrd stoppknapp

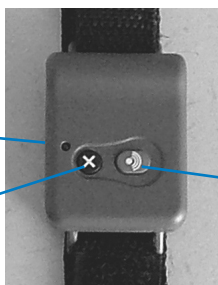

Fjärrstyrd larmknapp


Byta batterier i fjärrkontrollen

Tag av fjärrkontrollens handledsband. Skruva loss de 3 skruvarna på baksidan av fjärrkontrollen och tag av locket. Sätt i ett nytt batteri enligt märkningen i batterifacket, sätt tillbaka locket och skruva fast det igen.

Använd inte laddningsbara batterier. Släng inte förbrukade batterier i hushållssoporna, utan släng dem enligt gällande miljöföreskrifter. Om du följer dessa önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Använda nummerpresentatören - inkommande samtal

Om du har nummerpresentationstjänst visas inkommande samtal i displayen. När minnet är fullt, försvinner det äldsta telefonnumret från listan och det nya telefonnumret läggs till i listan. Varje samtal lagras med datum, klockslag och i ordningsföljd.

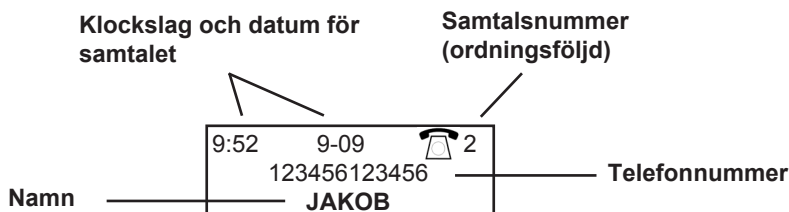




Observera! Om den som ringer har hemligt nummer visas (“PRIVATE”) i displayen.




Om telefonnumret är okänt (t.ex. vissa internationella samtal) visas (“OUT OF AREA”) i displayen.

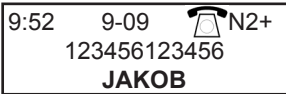

Om samma kontakt ringer flera gånger, lagras endast det senaste samtalet i listan på inkommande samtal och ett **+**-tecken visas efter samtalsnumret.


OBS! Ett **N** visas i displayen framför de samtalsnummer som du ej har tittat på i listan.

När ett nytt samtal har tagits emot blinkar indikeringslampan för inkommande samtal (se illustration sid 3) och i displayen visas ”NYA” (“NEW”) enligt illustrationen på nästa sida. Lampan släcks när du har bläddrat igenom obesvarade samtal med ▲ ▼ knapparna.

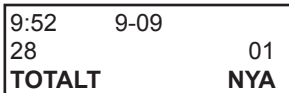


Detta exempel visar att totalt antal inkomna samtal i listan är 28 varav 1 samtal är nytt.

Använd knapparna Använd ▲ ▼ för att bläddra bland telefonnumren i listan.

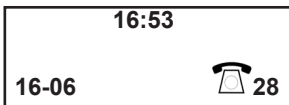

När du bläddrat igenom alla samtal försvinner “NEW” och displayen återgår i viloläge efter några sekunder.

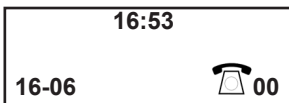

Totalt antal inkomna samtal i listan visas fortfarande i displayen.



När listan på inkommande samtal är tom (t.ex. om du rensat listan) visas **00** i displayen.

Använda nummerpresentatören - ringa upp ett nummer

Gör på följande sätt för att ringa en kontakt i listan. Luren skall vara pålagd.

1. Använd knapparna ▲▼ för att bläddra i listan för inkommande telefonnummer och stanna på det nummer som du vill ringa upp.
2. Lyft luren eller använd högtalaren (tryck på -knappen) eller använd headset (tryck på -knappen).
3. Telefonnummer rings upp automatiskt.
4. Du kan också lyfta på luren först. Använd knapparna ▲▼ för att bläddra i listan tills du kommer till önskat nummer. Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen. Valt telefonnummer rings upp automatiskt.

OBS!

Uppringningsfunktionen fungerar inte för telefonnummer som är hemliga/skyddade ("PRIVATE") eller vissa internationella ("OUT OF AREA").

Använda nummerpresentatören - radera ett nummer

Gör på följande sätt för att ta bort ett telefonnummer från listan. Luren skall vara pålagd.

1. Använd knapparna ▲▼ för att välja den post du vill ta bort.
2. Tryck på knappen **C**. I displayen visas ("DELETE")
3. Tryck på knappen **C** igen för att bekräfta borttagningen av posten.
4. Tryck på knappen **OK** för att gå ur menyn.


Använda nummerpresentatören - radera alla nummer


Gör på följande sätt för att ta bort samtliga telefonnummer från listan. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen **C** och håll den nere tills dess ("DELETE ALL") visas i displayen.
2. Tryck på knappen **C** igen för att bekräfta rensningen av alla nummer.
3. Tryck på knappen **OK** för att gå ur menyn.


Samtal väntar

Med den här funktionen får du information om och kan besvara ett nytt samtal under ett pågående samtal. Du kan också växla mellan flera pågående samtal. Dessa funktioner fordrar att din telefonoperatör tillhandahåller tjänsten samt att du beställt den.

1. Tryck på knappen .
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja telefoninställningar ("SET PHONE"). Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
3. Använd knapparna **▲▼** för att välja ("CALL WAITING"). Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
4. Använd **▲▼** och välj "ON" eller "OFF".
5. Tryck på knappen **OK** för att bekräfta och tryck sedan på **C**-knappen två gånger för att gå ur menyn.

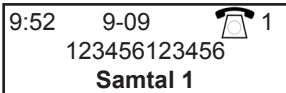

När du pratar med samtal 1 visas namn och nummer i displayen.

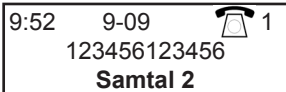


Ett pip ljud hörs när du får ett nytt inkommande samtal. Samtal 2 visas nu med namn och nummer i displayen.


Kontakta din operatör för att få all information om tjänsten.

Om du inte besvarar samtal 2 under ett pågående samtal, så läggs samtal 2 in på listan för inkommande samtal.

Meddelande väntar

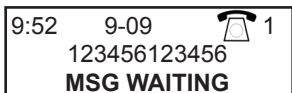

Med den här funktionen kan uppringaren lämna ett meddelande som syns i listan för inkommande samtal. Meddelanden är markerade annorlunda än inkomna samtal i displayen står istället ("MSG WAITING").

Lysdioden bredvid -symbolen lyser samt ("MSG WAITING") står kvar i displayen tills alla meddelanden är uppspelade. När alla meddelanden är uppspelade försvinner ("MSG WAITING") automatiskt från displayen.

Tillbehör CL600

Vibrator, art nr 273062

OBS! Använd endast denna originalvibrator från Geemarc.

Headset, art nr 273065

Hals slinga CLA7, art nr 279010.


Batteri, alkaliskt, AAA/LR03 1,5V, art nr 175106

Kontakta den återförsäljare som levererat telefonen, alternativt gå in på www.edin.se, för ytterligare information.

Underhåll och skötsel

Telefonen kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka då enheten med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Om telefonen inte fungerar

- Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Extra viktigt är att telefonlurens modularkontakter är ordentligt intryckta. Dra ur och sätt tillbaka modularkontakten i telefonpluggen ett par gånger om telefonen är ”död”.
- Du kan ändra ton (+-10dB) och volym (+30dB) när den röda lysdioden i bredvid knappen  är tänd (se sid 4). Om den inte är tänd ökas enbart volymen med +15dB.

Om telefonen trots ovanstående felsökning inte fungerar bör ni lämna den till försäljningsstället eller sända den till Bo EDIN AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö. Bifoga ifylld returblankett (pdf), som finns att ladda ned på www.edin.se på Support, eller märk godset med ert namn, adress och telefon samt bifoga kvitto eller faktura.

Teknisk information

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från ”Produktdatabank” på www.edin.se. Vid behov kan annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se

Miljö

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo EDIN AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Återförsäljare:

