

Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll

Bruksanvisning



CLA40
Art nr 273050

Innehåll

Inledning	3
Instruktion för montering på vägg	4
Bildöversikt.....	5
Bildöversikt.....	6
Sätta i batterier.....	7
Ansluta CLA40 till telefonen	8
Volymkontroll.....	9
Tonkontroll	9
Batterilampa.....	10
Extra förstärkning.....	10
Felsökning.....	11
Skötsel och garanti	12
Teknisk information och service	12
Miljö och återvinning	13
Anteckningar, kvitto (garanti) m.m.....	14

Inledning

Tack för att du valt att köpa en produkt från Bo Edin AB. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

CLA40 är en telefonlurförstärkare som ger en akustisk förstärkning av ljudet i telefonluren och den är avsedd att användas med bordstelefoner.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

OBS!


Denna telefonlurförstärkare är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med volym- och tonkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att varje användare känner till denna funktion.

Instruktion för montering på vägg

Avståndet skall vara 46mm mellan borrhålen.

OBS!

Skissen är inte skalenlig.

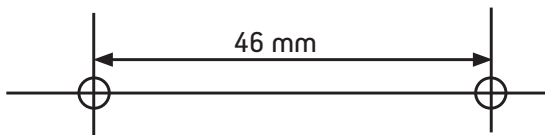

Bildöversikt

Ovansida



Undersida



Bildöversikt

Uppifrån



Ingång för
telefonlinjesladd (1) *)

Nedifrån



Batteriindikator

Utgång för
telefonlinjesladd (2) *)

*) TNV-3 klassad enligt EN60950

Sätta i batterier

Telefonlurf förstärkaren CLA40 drivs av ett 9V PP3 batteri. Sätt i batteriet så här:

1. Öppna och ta av batterilocket på undersidan genom att pressa ned lockets knapp, se bilden på sidan 5.
2. Sätt i 9V-batteriet åt det håll som märkningen visar i botten på batterifacket. Låt det svarta bandet gå under batteriet och sticka upp på andra sidan. Du kan då dra i bandet för att lätt ta ur batteriet.
3. Sätt tillbaka locket, nedtill först, och tryck till så att det knäpper fast, se bilden på sidan 5.

Ansluta CLA40 till telefonen

Anslut telefonlurförstärkaren CLA40 så här:

1. Koppla ur telefonlursladden från telefonen.
2. Tag fram sladden som följer med i förpackningen. Anslut sladdens ena ände i telefonen där telefonlursladden nyss satt och den andra i telefonlurförstärkarens ingång (1), se övre bilden på sidan 6.
3. Koppla sedan in telefonlursladden i telefonlurförstärkarens utgång (2), se nedre bilden på sidan 6.

Viktigt!

Telefonlurförstärkaren kan ej användas ihop med en telefon där knappatsen sitter direkt på telefonluren.

Volymkontroll

Anpassa volymen i telefonluren genom att skjuta knappen märkt med V på telefonlurförstärkarens framsida uppåt eller nedåt. Volymen kan anpassas från Din telefons standardnivå och upp till 30 dB. Telefonlurförstärkaren aktiveras automatiskt när den känner av ljud från telefonlurens högtalare eller mikrofon. Vid tystnad i mer än 15 sekunder stängs den av automatiskt.

Tonkontroll

Anpassa tonläget i telefonluren genom att skjuta knappen märkt med T på telefonlurförstärkarens framsida uppåt eller nedåt. Tonläget kan anpassas i 5dB-nivåer från 0dB och uppåt eller nedåt efter Dina behov och önskemål.

Batterilampa

Batterilampan lyser varje gång du använder Din telefonlurförstärkare. Om batterilampan lyser svagt eller inte alls när telefonlurförstärkaren används behöver batteriet bytas för att säkerställa bästa möjliga ljudkvalitet och prestanda.

Viktigt!

Koppla alltid ur telefonlurförstärkaren innan du byter batteri.

Extra förstärkning

Om ni behöver ytterligare 10dB förstärkning, tryck och håll nere förstärknings-knappen (Boost). För att undvika återkopplingsproblem är mikrofonen bortkopplad i detta läge. Släpp upp knappen när du ska tala, så hör mottagaren dig igen

Felsökning

- Kontrollera att alla sladdar är rätt inkopplade.
- Kontrollera att batteriet fungerar och är korrekt isatt och anslutet.
- CLA40 levereras med vredet på förstärkarens undersida ställt på "klockan 4", vit punkt. Denna inställning passar till de allra flesta telefoner. Om förstärkaren ej fungerar med din telefon kan du prova de andra 11 lägena genom att vrida vredet.
- Om det inte fungerar trots att du provat alla 12 inställningar, koppla då ur telefonlurförstärkaren från telefonen och tillbaka igen.
- Om telefonen fungerar när förstärkaren ej är ansluten kan det bero på två saker; förstärkaren är felaktig eller kopplingen i din telefonlursladd fungerar ej med CLA40.
- Om problem kvarstår efter att telefonlurförstärkaren är urkopplad, så kan problemet bero på telefonen eller telefonlinjekontakten.

Vid handhavandefrågor, reklamationer etc. ber vi er vänligen kontakta den återförsäljare som levererat produkten.

Skötsel och garanti

Om produkten skulle bli smutsig, torka den då med en ren lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering.

Produkten får inte utsättas för fukt, vatten eller direkt solljus. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Teknisk information och service

Om produkten trots ovanstående felsökning inte fungerar bör du lämna det till försäljningsstället/audionommottagningen eller sända det till Bo Edin AB enligt nedanstående adress.

Märk godset med ditt namn, adress och telefonnummer samt bifoga kvitto eller faktura (konsumentprodukt): och felbeskrivning.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från "Dokumentarkiv" på www.edin.se.

Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier och produkten enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Anteckningar, kvitto (garanti) m.m.

Återförsäljare

Bo Edin är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Stockby Hantverksby 3
181 75 Lidingö

www.hörbutiken.se / www.hoerbutiken.se
www.edin.se