

Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll

Bruksanvisning



CLA40 VOX
Art nr 273051

CLA40 VOX

Innehållsförteckning

Inledning	sid	3
Bildöversikt CLA40 VOX	sid	4-6
Instruktion för montering på vägg	sid	5
Installation		
Sätta i batterier	sid	7
Ansluta CLA40 VOX till telefonen	sid	7
Inställningar		
På/av	sid	8
Volymkontroll	sid	8
Tonkontroll	sid	8
Extra förstärkning	sid	8
Batterilampa	sid	9
Felsökning	sid	9
Skötsel och garanti	sid	10
Teknisk information	sid	10
Miljö och återvinning	sid	11

Inledning

Tack för att ni har valt att köpa en CLA40 VOX telefonlurförstärkare. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten. Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

CLA40 VOX förstärker ljudet i telefonluren. Den kan bara användas med telefoner där luren är ansluten med en sladd med modularkoppling. Den fungerar med de flesta telefoner. Vissa telefoner är kopplade på ett sätt så att de ej kan användas med CLA40 VOX.


OBS!

Denna telefonlurförstärkare är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med volym- och tonkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att varje användare känner till denna funktion.


CLA40 VOX

Bildöversikt - ovansida

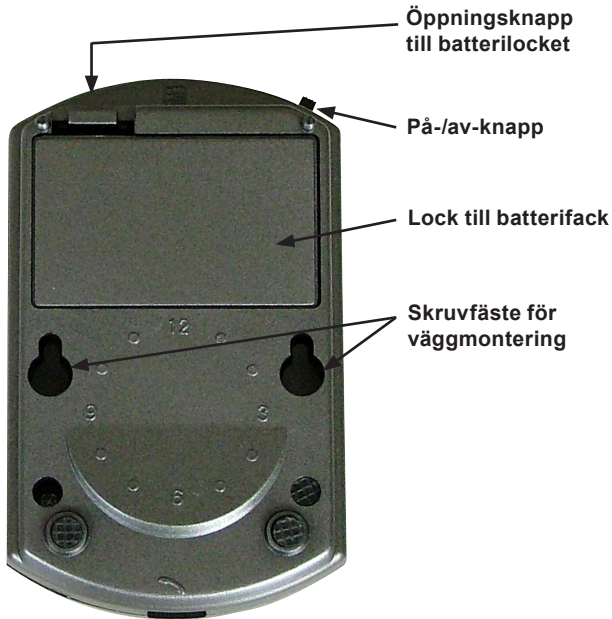



Bildöversikt - undersida**Instruktion för montering på vägg**

Avståndet skall vara 46 mm mellan borrhålen.
OBS! skissen är inte skalenlig.

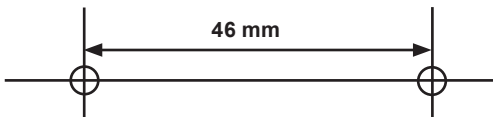

CLA40 VOX

Bildöversikt - uppifrån och nedifrån

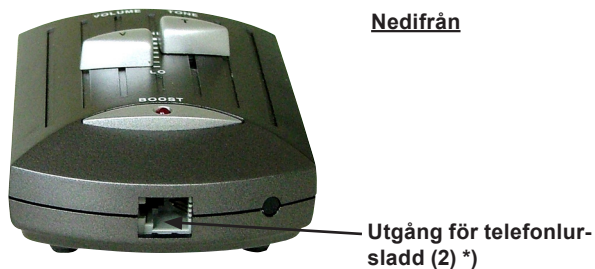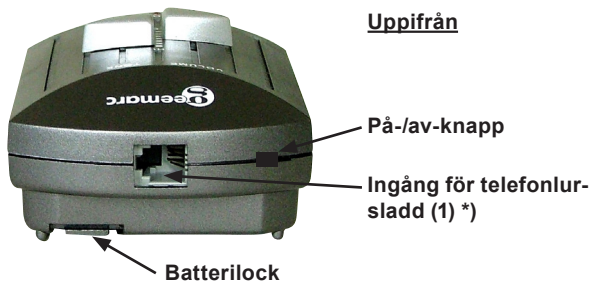

*) TNV-3 klassad enligt EN60950

Sätta i batterier

Telefonlurförstärkaren CLA40 VOX drivs av 1 st alkaliskt 9V batteri. Sätt i batteriet så här:

1. På-/av-knappen, se övre bilden på sidan 6, ska stå på OFF.
2. Öppna och ta av batterilocket på undersidan genom att pressa ned lockets knapp, se bilden på sidan 5.
3. Sätt i 9V batteriet åt det håll som märkningen visar i botten på batterifacket. Låt det svarta bandet gå under batteriet och sticka upp på andra sidan. Då kan du dra i bandet för att lätt ta ur batteriet.
4. Sätt tillbaka locket, nedtill först, och tryck till så att det knäpper fast.

Ansluta CLA40 VOX till telefonen

Anslut telefonlurförstärkaren CLA40 VOX så här:

1. Koppla ur telefonlursladden från telefonen.
2. Tag fram sladden som följer med i förpackningen. Anslut sladdens ena ände i telefonen där telefonlursladden nyss satt och den andra i telefonlurförstärkarens ingång (1), se övre bilden på sidan 6.
3. Koppla sedan in telefonlursladden i telefonlurförstärkarens utgång (2), se nedre bilden på sidan 6.

Viktigt!

Telefonlurförstärkaren kan ej användas ihop med en telefon där knappsetsen sitter direkt på telefonluren.

CLA40 VOX

På/av

På-/av-knappen (ON/OFF), se bilder på sidan 6.

Volymkontroll

Volymen i telefonluren kan förstärkas upp till 30dB genom att skjuta knappen märkt V på telefonlurförstärkarens ovansida. Du kan få upp till 40 dB genom att trycka in förstärkarknappen (BOOST) (se extra förstärkning nedan).

Telefonlurförstärkaren aktiveras automatiskt när den känner av ljud från telefonlurens högtalare eller mikrofon. Vid tystnad i mer än 15 sekunder stängs den av automatiskt.

Tonkontroll

Anpassa tonläget i telefonluren genom att skjuta knappen märkt med T på telefonlurförstärkarens framsida uppåt eller nedåt. Tonläget kan anpassas i 5dB-nivåer från 0dB och uppåt eller nedåt efter Dina behov och önskemål.

Extra förstärkning

När förstärkarknappen (BOOST) hålls intryckt när du lyssnar får du ytterligare 10dB förstärkning. För att undvika problem med rundgång stängs mikrofonen automatiskt av när Du håller knappen intryckt. Släpp upp förstärkarknappen när du ska prata.

Batterilampa

Batterilampan lyser varje gång du använder Din telefonlurförstärkare. Om batterilampan lyser svagt eller inte alls när telefonlurförstärkaren är påslagen och används behöver batteriet bytas för att säkerställa bästa möjliga ljudkvalitet och prestanda.

Viktigt!

Koppla alltid ur telefonlurförstärkaren innan du byter batteri.

Felsökning

Observera även att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering.

- Säkerställ att alla sladdar är inkopplade rätt.
- Säkerställ att batteriet fungerar och är korrekt isatt och anslutet, se sid 7 samt avsnittet Batterilampa.

Om telefonlurförstärkaren ändå inte fungerar, gör då följande:

- Koppla ur telefonlurförstärkaren från telefonen
- Koppla ihop telefonluren med telefonen
- Om telefonen fungerar när förstärkaren ej är ansluten kan det bero på två saker:
 - förstärkaren är felaktig eller
 - kopplingen i din telefonlursladd fungerar ej med CLA40 VOX (se även sid 3).

CLA40 VOX

- Om problem kvarstår efter att telefonlurförstärkaren är urkopplad, så kan problemet bero på telefonen eller telefonlinjekontakten.

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Skötsel och garanti

Håll produkten ren genom att torka av den med en torr putsduk. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden. Produkten får inte utsättas för fukt, vatten eller direkt solljus.

Observera

att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering.

Teknisk information

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från ”Dokumentarkiv” på www.edin.se. Vid behov kan reservdelistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier och produkten enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



CLA40 VOX

Anteckningar

Anteckningar

CLA40 VOX

Anteckningar

Anteckningar

Återförsäljare

Bo Edin är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Stockby Hantverksby 3
181 75 Lidingö

www.hörbutiken.se / www.hoerbutiken.se
www.edin.se