

Joy Abe BH01

Blåtandshals slinga med inbyggd
samtalsförstärkare och vibrator

Bruksanvisning



Joy Abe BH01, Art nr 276010

Innehållsförteckning	sida
Inledning	3
Förpackningens innehåll	3
Grundläggande information	4
Säkerhetsinformation	4
Före första användning	4
Bildöversikt	4
Anslut halsslinga	5
Placering av halsslinga	5
Ladda batteriet	6
Sätta på/stänga av	7
Volymkontroll	7
Tonkontroll	7
Mikrofonförstärkare (samtalsförstärkare)	7
Koppla ihop halsslingan med mobiltelefon	8
Svara på samtal	9
Ringa ett samtal	10
Avsluta samtal	10
Röstuppringning	10
Avvisa samtal	10
Föra över ett samtal till och från mobiltelefonen	11
Felsökning	11
Snabbguide kontrollampa	12
Teknisk information	13
Tillbehör	13
Underhåll, skötsel och garanti	14
Service	14
Miljö	15

Inledning


Tack för att du har valt att köpa en BH01 blåtandshalsslinga. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten. BH01 är en blåtandshalsslinga med förstärkare som är framtagen för hörapparatbärare. Halslingen används med hörapparaten ställd i T- eller MT-läge. Halslingen kan användas för mobilsamtal med telefoner som har blåtand. Den medföljande mikrofonen används för att överföra ljudet till halsslingen från annan ljudkälla. Det går även att ansluta hörlurar/headset till förstärkaren.

Observera att halsslingen måste laddas före första användning.

Förpackningen innehåller följande delar

- Förstärkare
- Batterieliminators

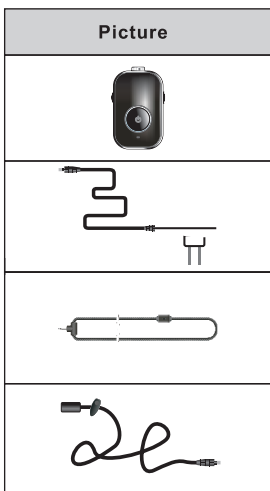

- Halslinga
- Extern mikrofon

Grundläggande information

Säkerhetsinformation


Inkorrekt användning med hörlurar/headset kan orsaka hörselskador. Var uppmärksam på följande:

1. Kontrollera att volymkontrollen är satt på lägsta nivå innan du ansluter hörlurar/headset.
2. Öka volymen försiktigt till dess att du hör bra.
3. Ha inte hörlurarna nära mikrofonen, då detta kan orsaka återkoppling/eko (ett skrikande ljud i hörlurarna).
4. Använd och förvara produkten så att inte barn eller personer som inte känner till produkten har åtkomst till den.

Före första användning

Innan du använder produkten för första gången är det viktigt att du laddar den fullt enligt instruktionen nedan.


Bildöversikt

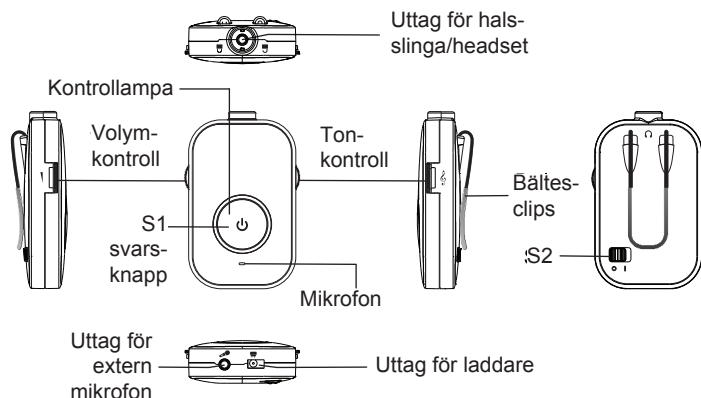

Anslut halsslinga

Halsslingan är avsedd för hörapparatbärare med hörapparaten inställd i T-läge för att överföra ljudet direkt till hörapparaten. Häng halsslingan runt halsen och sätt fast förstärkaren i kläderna med hjälp av bältesclipset.

1. Anslut halsslingans kontakt till uttaget som är avsett för halsslinga (se illustration)
2. Vrid kontakten medsols för att låsa kontakten
3. Vrid kontakten motsols för att låsa upp den

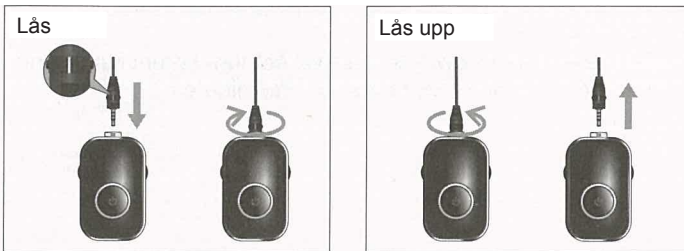

Placering av halsslinga




Det är viktigt att du hänger halsslingan så att mikrofonen som sitter på slingan är riktad mot din mun när du använder halsslingan till mobiltelefon.

Genom att ansluta den externa mikrofonen kan halsslingan även användas som samtalsförstärkare och/eller till att ta upp ljud från annan akustisk ljudkälla. För att uppnå bästa ljudkvalitet är det viktigt att mikrofonen är så nära den som talar som möjligt.

Ladda batteriet

Innan du använder halsslingan för första gången är det viktigt att du laddar den fullt. Anslut laddarens sladd till förstärkaren enligt illustrationen nedan och anslut sedan laddaren till vägguttaget. Under laddning lyser kontrollampan med ett rött sken som släcks när batteriet är fulladdat.

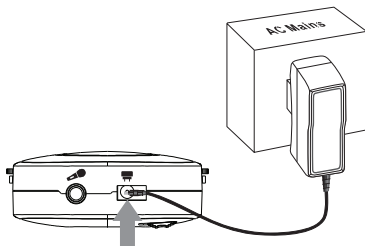

Tal- och standbytid kan variera beroende på hur den används och med vilken telefon den används. Taltiden är upp till 10 timmar och standby-tiden upp till 425 timmar.

Observera att batteriets livslängd kan minska avsevärt om det lämnas oladdat under långa perioder. För att undvika försämrad livslängd bör du ladda batteriet minst en gång i månaden.

Låg batterinivå

När batterinivån är låg blinkar kontrollampan rött och ett kort ton hörs i slingan med jämna mellanrum. Det återstår ca 15 minuters taltid efter första varningen. När batteriet är helt urladdat stängs förstärkaren av.

Sätta på/stänga av

Sätta på halsslingan

Halsslingan sätts på genom att hålla svarsknappen (se illustration) intryckt till kontrolllampan lyser med ett blått sken. När halsslingan är påslagen syns en blå blinkning var tredje sekund.

Stänga av halsslingan

Halsslingan stängs av genom att hålla svarsknappen (se illustration) intryckt till kontrolllampan lyser med ett rött sken.

Volymkontroll

Volymen justeras genom att föra volymkontrollen uppåt (ökad volym) eller nedåt (minskad volym).

Tonkontroll

Tonen kan justeras genom att föra tonkontrollen uppåt (mer diskant) eller nedåt (mer bas).

Mikrofonförstärkare (samtalsförstärkare)

Sätt på halsslingan genom att hålla svarsknappen (se illustration) intryckt till kontrolllampan lyser med ett blått sken. Sätt därefter på mikrofonförstärkaren genom att ställa S2 i läge I och stäng av den genom att ställa den i läge O. Detta läge används när du använder halsslingan som samtalsförstärkare eller om du använder mikrofonen till att ta upp ljud från t.ex. en TV-apparat eller annan ljudkälla.

Koppla ihop halsslingan med mobiltelefon

För att upprätta en trådlös länk mellan halsslingan och mobiltelefonen måste halsslingan programmeras och paras ihop med mobiltelefonen (eller andra blåtandsenheter). Detta sker trådlöst via blåtand och det är viktigt att enheterna befinner sig närmare än en meter från varandra.

1. Försäkra dig om att batterierna är fulladdade och att laddarens sladd ej är kopplad till förstärkaren.
2. Tryck på S1 och håll den intryckt till kontrollampan blinkar växelvis rött och blått. Halsslingan är nu i ihopkopplingsläge.
3. Placera telefonen i närheten av halsslingan
4. Följ telefonens manual för aktivering och anslutning av blåtandsenheter. Detta sker vanligtvis via en inställningsmeny ("setup") eller anslutningsmeny ("connect") i telefonen där du väljer att finna/lägga till blåtandsenheter.
5. Halsslingan och telefonen söker nu kontakt (detta kan dröja flera sekunder).
6. Telefonen söker efter blåtandsenheter i närheten och listar dessa i displayen.
7. Välj enheten "Enhancer" för ihopkoppling.
8. Tryck inloggningskod 0000 för att godkänna ihopkopplingen. Vissa mobiltelefoner (Bluetooth 2.1) kräver ingen inloggningskod, utan ihopkopplingen sker automatiskt.
9. När ihopkopplingen är klar övergår kontrollampan till blått sken som blinkar var tredje sekund.
10. Om ihopkopplingen misslyckas: Slå av halsslingan och telefonen och vänta i 10 sekunder, sätt på telefonen och halsslingan och börja om från början.

Observera!

Det skiljer sig mellan olika telefoner hur frågan ställs och hur man kopplar ihop blåtandsenheter med telefonen. På vissa telefoner måste man även etablera en blåtandslänk mellan halsslingan och telefonen efter att man kopplat ihop dem. Detta finns beskrivet i telefonens manual. Tryck ett kort

tryck på S1 för att etablera länken. En fråga visas i displayen: ”Accepterar du att Enhancer etablerar en länk med telefonen?” (frågan skiljer sig beroende på vilken telefon du har). Efter att du svarat ja på denna kan du använda halsslingan med telefonen.

Om slingan varit avstängd och du sätter på den igen kopplas den automatiskt ihop med den enhet den var parad med när den stängdes av.

Tryck kort på S1 om slingan skulle tappa kontakten med telefonen trots att den är påslagen för att återupprätta blåtandslänken.

Om du kommer utom räckvidd från telefonen letar halsslingan rätt på telefonen så snart du befinner dig inom räckvidd igen. Skulle du tala i telefonen och går utom räckvidd bryts inte samtalet utan så fort du kommer tillräckligt nära telefonen återupptas samtalet.

Halsslingan kan bara vara parad med en blåtandsenhet åt gången, men det går att registrera upp till 8 enheter.

Svara på samtal

Svara med mikrofonförstärkare avstängd

När det ringer i telefonen hörs en ton i halsslingan och halsslingan vibrerar. Tryck på S1 för att besvara samtalet.

OBS!

En del telefoner sätter bluetooth i väntläge om du inte använt blåtandskopplingen på ett tag. När det kommer ett samtal ringer det först i telefonen och det tar ett par sekunder innan samtalet går över till slingan. **Det är viktigt att du väntar till signalen kommer över i halsslingan innan du svarar!** Om du trycker på S1 innan signalen går över uppfattar halsslingan det som om du vill etablera en blåtandslänk och samtalet går ej över till halsslingan.

Svara med mikrofonförstärkare aktiverad

När det ringer i telefonen hörs en ton i halsslingan och halsslingan vibrerar. Tryck på S1 för att besvara samtalet. Mikrofonförstärkaren stängs av automatiskt och sätts på igen när du avslutat samtalet.

Ringa ett samtal

När du ringer från din mobiltelefonen kopplas samtalet automatiskt över till slingan. Detta är dock beroende på telefonmodell och hur telefonen är inställd. Om din telefon inte har automatisk överkoppling till halsslingan, tryck ett kort tryck på svarsknappen för att koppla upp halsslingan mot mobiltelefonen.

Avsluta samtal

Tryck in S1 för att avsluta samtalet. Batteriindikatorn återgår till ett blått blinkande sken var tredje sekund.

Röstuppringning

Ställ in telefonen på röstuppringning enligt telefonens bruksanvisning. Tryck ett kort tryck på S1 på halsslingan. En ton hörs i halsslingan. Välj något av de namn du registrerat som röstuppringning i telefonen och samtalet kopplas upp.

Avvisa samtal

Tryck på S1 och håll knappen inne till du hör en ton i slingan om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Föra över samtal till och från mobiltelefonen

På vissa telefoner går att föra över ett samtal till och från mobiltelefonen under pågående samtal. Mer om detta kan läsas i telefonens bruksanvisning.

1. Tryck kort på S1 för att föra över ett samtal från mobiltelefonen till halsslingan.
2. Följ telefonens instruktioner för att föra över ett samtal från halsslingan till mobiltelefonen.

Felsökning

Det går ej att sätta på halsslingan

Kontrollera att batteriet är laddat.

Kontrolllampan lyser ej vid laddning

1. Kontrollera att laddaren är ordentligt isatt.
2. Kontrolllampan släcks när batteriet är fulladdat.

Inget ljud i halsslingan

1. Kontrollera att halsslingan är ordentligt fastsatt.
2. Kontrollera att kontrolllampan ej lyser rött, ladda halsslingan.
3. Kontrollera att halsslingan är påslagen. (Kontrolllampan ska blinka med ett blått sken.)
4. Kontrollera att volym- och tonkontroll är korrekt inställda.
5. Kontrollera att den är parad med mobiltelefonen.
6. Ställ om den som samtalsförstärkare och skrapa på mikrofonen för att kontrollera om halsslingan är hel/ordentligt fastsatt.
7. Se till att halsslingan ligger rätt runt nacken och att hörapparaten är inställd i T/MT-läge.

Svagt ljud i halsslingan

1. Kontrollera att volym- och tonkontroll är korrekt inställda.
2. Kontrollera att kontrollampan ej lyser rött, ladda halsslingan.
3. Kontrollera att mobiltelefonens volymkontroll är korrekt inställd.

Ljudet i halsslingan försvinner

Om du befinner dig för långt från telefonen försvinner ljudet i halsslingan. Det kommer tillbaka när du befinner dig inom räckhåll igen.

OBS!

Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller åska.

Vänligen kontakta försäljningsstället om halsslingan trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Snabbguide kontrollampa

Indikering kontrollampa

1x1 sekund, blått sken

1x2 sekunder, blått sken

1x3 sekunder, blått sken

Blinkande rött sken

Fast rött sken

Slocknat rött sken

Rött/blått blinkande sken

Förklaring

Samtal pågår

Parad med och aktiv mot mobiltelefonen

Klar för användning med parade enheter

Låg batterinivå (max 15 minuters tal-tid återstår)

Laddning pågår

Batteriet är fulladdat

Redo för parning med mobiltelefon

Teknisk information

Bluetooth V2.1

Räckvidd: upp till 10 meter

2,4GHz (2,402-2,480GHz) arbetsfrekvens

Stödjer HSP, HFP 1,5 bluetoothprofiler för konversation i mobiltelefon

Max antal parade enheter: 8

Taltid: upp till 10 timmar

Standbytid: upp till 425 timmar

Storlek: 39,6x65,5x15,5 mm

Längd halsslinga: 500mm

Vikt: 31g

Arbetstemperatur: -20 - +60oC

Batterier: Li-Ion Polymer batteri 3.7V DC

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från ”Produktdatabank” på www.edin.se. Vid behov kan annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Tillbehör

Artikelnr	Beskrivning
276928	Laddare Joy Abe BH01
276946	Halsslinga med mikrofon
276950	Hörlurar med mikrofon
276962	12V laddare
276963	Batteripack
276964	Extern mikrofon

Underhåll, skötsel och garanti

Produkten kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka då enheten med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Ställ inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

OBS!

Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering.

Utsätt inte produkten för höga temperaturer.

Använd inte produkten med annan transformator än den som levereras med produkten.

Använd endast de laddningsbara batterier som leverantören rekommenderar.

Service

Om produkten trots ovanstående felsökning inte fungerar bör ni lämna den till försäljningsstället eller sända den till Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö. Bifoga ifylld returblankett (pdf), som finns att ladda ned på www.edin.se på Support, eller märk godset med ert namn, adress och telefon samt bifoga kvitto eller faktura.

Miljö

Släng förbrukad produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Anteckningar

Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

| www.edin.se

| www.horbutiken.se /
www.hoerbutiken.se

Hearing excellence since 1965

