



Bluetooth® Hals slinga för hörapparater



Bruksanvisning

NL 200

1 Information om Säkerhet

Avsedd användning

NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla mobiltelefoner. När den är ansluten till en Bluetooth-telefon, kan den användas för hands-free kommunikation av personer som använder hörapparat med T-spole.

Alla andra användningar ska betraktas som oavsiktlig användning.

Obehörig ändring eller rekonstruktion är inte tillåten. Skall under inga omständigheter öppnas.

Läs denna bruksanvisning noggrant.

Kompatibilitet med hörapparat

Telefonen fungerar med de flesta hörapparater med T-spole.

Med tanke på det breda sortiment av hörapparater som finns tillgängligt, kan vi inte garantera full funktion med samtliga hörapparater på marknaden. Produkten är T3-klassad avseende hörapparatkompatibilitet.



Observera: Om du har en pacemaker inopererad och vill använda NL200 halsslunga, kontakta din läkare först. Stäng av halsslungan omedelbart om du märker eller misstänker störningar.

Nätadapter



Observera: Använd endast nätadaptern som medföljer eftersom andra nätadapterar kan leda till skador på utrustningen. Säkerställ att nätadaptern inte hindras av möbler eller liknande.

Miljöinformation/Avfallshantering

Avfallshantering av begagnade elektriska och elektroniska apparater (ska användas i länder som ingår i den europeiska unionen och andra europeiska länder med ett separat uppsamlingsystem för dessa apparater). Symbolen på produkten eller dess förpackning hänvisar till att denna produkt inte får behandlas som normala hushållssopor, utan måste lämnas in till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom ditt bidrag till korrekt avfallshantering av denna produkt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. Miljön och hälsan utsätts för risker genom felaktig avfallshantering. Återvinning hjälper till att reducera förbrukningen av grundämnen. Ytterligare informationer om återvinning av denna produkt erhåller du hos din kommunförvaltning, de kommunala avfallshanteringsföretagen eller i den affär där du köpt produkten.



Batterier utgör en risk för både hälsa och miljön!



Öppna aldrig, skada eller svälj batterier, eller tillåt dem att komma ut i miljön. De kan innehålla giftiga och ekologiskt farliga tungmetaller.

Du är enligt lag skyldig att lämna in förbrukade batterier på försäljningsstället eller till en lämplig återvinningsstation som tillhandahålls av din lokala myndighet. Avfallshantering är gratis. Den intilliggande symboler anger att batterierna inte ska kastas i hushållssoporna utan tas till insamlingsstationer.

Förpackningsmaterial skall tas om hand enligt lokala bestämmelser.

2 Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller:

Innehåll	NL200
Bluetooth®-halsslinga	1
Nätadapter	1
Bruksanvisning	1

Att använda NL200

Uppladdning av batteriet

1. Anslut nätadaptern i strömuttaget (7).
2. När NL200 laddar lyser Lysdiod (3) rött.
3. När NL200 är fulladdad, lyser inte Lysdiod (3).

Laddningstiden är 5 timmar.

För att bibehålla enhetens funktion även vid oregelbunden användning, krävs det att det inbyggda batteriet laddas upp fullständigt var tredje månad!




Använd endast nätadaptern som medföljer märkt med 5 VDC, 200 mA.

Lågt batteri

När batteriladdningen i NL200 är låg kommer en akustisk signal att utfärdas i slingan under mobil-samtal.

Överblick

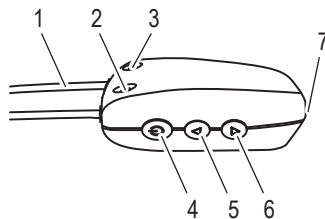

- | | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| 1 | Halsslinga | 5 | Volym Upp |
| 2 | Mikrofon | 6 | Volym Ner |
| 3 | Lysdiod | 7 | Nätadaptern |
| 4 | PÅ/AV knapp | | |

3 Att använda NL200

NL200 har en teleslinga som fungerar tillsammans med din hörapparat i T-/MT-läge. För att kunna använda NL200, måste du upprätta en anslutning till din mobiltelefon.



Det är viktigt att uppmärksamma säkerhetsanvisningarna i kapitel 1.

De olika funktionerna är beskrivna nedanför.

Registrera NL200 i mobiltelefonen

För att använda NL200 för första gången måste den registreras i mobiltelefonen.

1. Sätt på din mobiltelefonens Bluetooth[®]-funktion
2. Tryck och håll ner knapp (4) på NL200, tills lysdioden (3) blinkar blått och rött växelvis.
3. Aktivera sökfunktionen för Bluetooth[®]-enheter på mobilen.
4. Vänta, tills mobilen har funnit NL200.
5. Mobilen bör nu visa enheten med namnet "KSY-01".
6. Välj denna enhet och skriv in koden "0000".
7. Om registreringen har lyckats och NL200 är ansluten till din mobiltelefon, lyser Lysdiod (3) blått.

Slå på NL200

Nästa gång du använder NL200, behöver man inte ansluta genom registrering. Efter att NL 200 har registrerats kopplas den automatiskt ihop med den relevanta mobiltelefonen.



Bluetooth[®]-funktionen måste aktiveras på mobiltelefonen.

1. Tryck och håll ner PÅ/AV knappen (4) på NL200, tills lysdioden (3) lyser blått.
2. Efter en kort tid, ändras statusen på lysdioden (3) till blinkande blått.

Stänga av NL200

1. Tryck och håll ner PÅ/AV knappen(4) på NL200, tills lysdioden (3) ej längre lyser.

Höjning av volymen

1. Under ett samtal tryck och håll ner och Volymknappen Upp (5) tills den önskade volymen är uppnådd.
2. En akustisk signal hörs i slingan när maximal volym är nådd.

Sänkning av volymen

1. Under ett samtal tryck och håll ner volymknappen Ner (6) tills den önskade volymen är uppnådd.
2. En akustisk signal hörs i slingan när den lägsta volymen är nådd.

Att använda NL200

Ringa ett samtal

När NL200 är påslagen går samtalet automatiskt över till halsslingan när du ringer ett samtal.

Avbryta uppringningen / Avsluta ett samtal

1. Tryck på strömbrytaren (4) med ett kort tryck för att avbryta uppringningen och / eller avsluta samtalet.

OBS - pga. den stora variationen av mobiltelefoner och andra kommunikationsutrustningar med Bluetooth kan det, om din enhet används med NL200, i vissa fall bli nödvändigt att avsluta samtal direkt från telefonluren. I en del enheter innebär avslutande av samtalet genom NL200 att förbindelsen till NL200 avbryts, men att samtalet inte är avslutat.

För att undvika samtalsavgifter och andra besvärligheter bör du kontrollera den här funktionen beträffande kompatibiliteten och, om nödvändigt, avsluta samtalen direkt från din enhet.

Besvara ett samtal

När du får ett samtal hörs en akustisk signal i slingan.

1. Tryck på strömbrytaren (4) med ett kort tryck för att besvara ett samtal.

Röstkommando

Du kan styra funktionen röstkommando i mobiltelefonen via NL200. Ett villkor till detta är att mobiltelefonen stödjer detta. För mer information, se bruksanvisningen som medföljer din mobiltelefon.

1. Om NL200 är i stand-by-läge trycker du på strömbrytaren (4) en kort stund.
2. Mobiltelefonen får nu röstkommandon via mikrofonen i NL200.

Besvara samtal när du lyssnar på musik

Om någon ringer när du lyssnar på musik via NL200 hörs en akustisk signal i slingan och du kan besvara samtalet på vanligt sätt.

4 Underhåll / garanti

Underhåll

- Rengör produktens ytor med en mjuk, luddfri trasa.
- Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Produktgaranti och felsökning

Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller åska.

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen.

Kontrollera om batterierna behöver bytas, om produkten har batterier. Använd endast de batterier som leverantören rekommenderar.

Vi förbehåller oss rätten att reparera eller ersätta defekta delar eller byta ut enheten.

Reservdelar eller enheter förblir vår egendom.

Rätt till ersättning i händelse av skada är uteslutet om det inte finns några bevis på uppsåt eller grov oaktsamhet av tillverkaren.

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Försäkran om överensstämmelse

Denna enhet uppfyller de krav som ställs i EU-direktivet:



1999 / 5 EU-direktivet om radioutrustning och terminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av dess överensstämmelse.

Överensstämmelse med ovan nämnda direktiv bekräftas av CE-märket på enheten.

CE-certifikat finns att ladda ner på

www.amplicomms.com.

Service-Hotline

Vid tekniska problem vänder man sig vår Service-Hotline. Telefonnummer hittar du på vår hemsida www.amplicomms.com

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Internet: www.ampicomms.com - E-post: info@audioline.de



4 250711 989613

Version 2.0 - 24.02.2014