

## Blåtandshals slinga, art nr 276020 Snabbmanual



### 1. Komma igång

#### Uppladdning av batteriet


1. Anslut nätadaptern till strömuttaget (7).
2. När NL200 laddar lyser lysdiod (3) rött.
3. När NL200 är fulladdad, är lysdiod (3) släckt. Laddningstiden är ca 5 timmar.

**OBS!** Använd endast nätadaptern som medföljer märkt med 5 VDC, 200 mA.

#### Lågt batteri

När batteriladdningen i NL200 är låg hörs en akustisk signal i slingan under mobilsamtalet.

#### Översikt

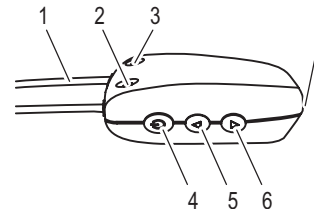

- 1 Hals slinga
- 2 Mikrofon
- 3 Lysdiod
- 4 PÅ/AV knapp
- 5 Volym Upp
- 6 Volym Ner
- 7 Nätadapter

## 2. Att Använda NL 200

NL200 har en teleslinga som fungerar tillsammans med din hörapparat i T/MT-läge. För att kunna använda NL200, måste du ansluta den till din mobiltelefon.

#### Registrera NL200 i mobiltelefonen

För att använda NL200 för första gången måste den registreras i mobiltelefonen.

1. Sätt på mobiltelefonens Bluetooth-funktion.
2. Tryck och håll ner knapp (4) på NL200, tills lysdioden (3) blinkar blått och rött växelvis.
3. Aktivera sökfunktionen för Bluetooth-enheter i mobilen.
4. Vänta tills mobilen har funnit NL200.
5. Mobilen bör nu visa enheten med namnet ~KSY-01".
6. Välj denna enhet och skriv in koden ~0000".
7. Om registreringen har lyckats och NL200 är ansluten till din mobiltelefon, lyser lysdiod (3) blått.

#### Slå på NL200

Nästa gång du använder NL200, behöver man inte registrera den. Den kopplas automatiskt ihop med din mobiltelefon.

**OBS!** Bluetooth-funktionen måste aktiveras på mobiltelefonen.

1. Tryck och håll ner På/Av knappen (4) på NL200, tills lysdioden (3) lyser blått.
2. Efter en kort stund, ändras statusen på lysdioden (3) till blinkande blått.

#### Stänga av NL200

1. Tryck och håll ner På/Av knappen (4) på NL200 tills lysdioden (3) inte längre lyser.

#### Höjning av volymen

1. Tryck och håll ner volymknappen Upp (5) till önskad nivå, under ett samtal.
2. En akustisk signal hörs i slingan när maximal volym är nådd.

#### Sänkning av volymen

1. Tryck och håll ner volymknappen Ner (6) till önskad nivå, under ett samtal.
2. En akustisk signal hörs i slingan när den lägsta volymen är nådd.

#### Avbryta uppringning/Avsluta ett samtal

1. Avbryt uppringning/avsluta ett samtal via telefonen, för att vara säker på att samtalet kopplas ner.

#### Besvara ett samtal

När du får ett samtal hörs en akustisk signal i slingan.

1. Tryck kort på strömbrytaren (4) för att ta emot samtalet.

#### Besvara samtal när du lyssnar på musik

Om någon ringer när du lyssnar på musik via NL200 hörs en akustisk signal i slingan och du kan besvara samtalet på vanligt sätt.

#### Röstkommando

Du kan styra funktionen röstkommando i mobiltelefonen via NL200. Ett villkor för detta är att din mobiltelefon stödjer dessa funktioner. För mer information, se bruksanvisningen för mobiltelefonen.

1. Om NL200 är i väntläge, tryck kort på strömbrytaren (4).
2. Mobiltelefonen får nu röstkommando via mikrofonen i NL200.

#### OBS!

Om du inte använder NL-200 under en längre tid bör batteriet underhållsladdas var tredje månad.

#### Viktigt - garanti!

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig användning/inkoppling/montering eller underhåll. Vänligen läs hela bruksanvisningen innan ni använder produkten.

