



Innehåll

Introduktion	3
Nät- eller batteridrift	3
Översikt	4
Framsida	4
Undersida	4
Baksida	4
Ljudval	5
Ställ in Tid.....	5
Inställning larm.....	5
Aktivera larm och välj väckningsljud	5
Stäng av larm	6
Snooze Off-Resume (Snooze Av/fortsätt)	6
Larm På/Av.....	6
Snooze.....	6
Kontrollera larmet	7
Återuppspelning.....	7
Volymkontroll.....	7
30-, 60- och 90-minuterstimer	7
Bakgrundsljus	8
Sömnförbättring	8
Använda sömnförbättringsfunktionen	8
Hörlurar eller högtalarkudde	8
Ändra ljudkort	9
Återställning.....	9
Säkerhetsföreskrifter/Garanti	9
Underhåll och skötsel.....	9
Felsökning	10
Teknisk information och service	10
Miljö och återvinning.....	10


Introduktion

Tack för att du har valt att köpa ett S-650 väckarur som kan underlätta för dig med besvär med tinnitus. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

Förpackningens innehåll:

- väckarur
- 2 ljudkort, ett med ljud för sömn och avslappning (sitter i väckaruret) och ett extra ljudkort med ljud för ljudterapi
- bruksanvisning
- 1 x nätadapter med svensk m fl pluggar

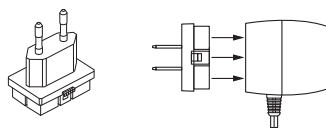

Nät- eller batteridrift

Klockan drivs med en nätadapter eller med 4 st LR6/AA batterier (ingår ej). Väckaruret drar ingen ström från batterierna så länge den är ansluten via nätadaptern.

Väckaruret kan även användas utomlands, eftersom ytterligare pluggar medföljer i förpackningen. Använd motsvarande plugg till nätadaptern för det land du befinner dig i. Sätt på den svenska pluggen på nätadaptern innan du ansluter den till jacket på baksidan av väckaruret **(10.)** och sedan till vägguttaget. När väckaruret är anslutet, kommer det inte att dra någon ström från batterierna, om du installerat dem i batterifacket. Om ett strömavbrott inträffar, kommer väckaruret automatiskt att växla över till batteridrift.

För att sätta i batterierna, öppna batterifacket på undersidan av väckaruret **(11.)**. Sätt i 4 st LR6/AA batterier åt det håll som är markerat i batterifacket och sätt tillbaka batteriluckan. Vi rekommenderar att alltid ha batterier monterade i väckaruret eftersom dessa fungerar som reservström vid spänningsbortfall/strömavbrott.

OBS!

Om väckaruret inte är anslutet till ett vägguttag och saknar batterier, så sparas inställningarna i ca 1 minut, t ex vid batteribyte.

Översikt

Framsida



Baksida



- 1. Snooze, Av/fortsätt (SNOOZE/ OFF-RESUME)
- 2. Insomningsfunktion (SE)
- 3. Timer
- 4. Larm - på/av
- 5. Kontroll larm/inställning larm

- 6. Inställning tid
- 7. Ljudval (SOUNDS)
- 8. Volym
- 9. Uttag för hörlurar och högtalarkudde
- 10. Uttag nätadapter

Undersida

- 11. Batterifack
- 12. Ljudkortsfack



Ljuduppspelning

För att starta eller stänga av väckarens ljuduppspelning, tryck på **SNOOZE / OFF-RESUME (1.)** upptill på väckaren. När ljuduppspelningen startar, spelar väckaren automatiskt upp det första ljudet på ljudkortet.

För att välja ett annat ljud, tryck på **SOUNDS (7.)** tills det ljud du vill använda spelas upp och namnet visas i displayen.

Ställ in Tid

Denna klocka har enbart 12-timmarsvisning.

För att ställa in rätt tid, tryck och håll in knappen för tidsinställning **(6.)**. SET TIME visas i displayen under siffrorna. När önskad tid visas, släpp upp knappen **(6.)** igen.

OBS!

"AM" (förmiddag) eller "PM" (eftermiddag) visas i det övre högra hörnet i displayen.

Inställning larm

För att ställa in tiden för larmet; tryck och håll in knappen för inställning eller kontroll av larm **(5.)**. SET ALARM TIME visas i displayen. När önskad larmtid visas, släpp upp knappen **(5.)** igen.

Aktivera larm och välj väckningsljud

Du kan vakna till en summer eller till något av de andra ljuden på väckarens ljudkort. Gör så här för att välja väckningsljud, tryck på knappen för larm **(4.)** tills ditt ljudalternativ visas. Det finns 3 inställningar:

ALARM ON SOUND (larmet är aktiverat) – ger det ljud du valt, ikon visas
ALARM ON BEEP (larmet är aktiverat) – ger ett tutande larm, ikon visas
ALARM OFF (larm avstängt) - ingen ikon syns i displayen

OBS!

- Om du väljer att vakna till ett av ljudkortets ljud kommer det ljud du
-

spelade senast, att spelas upp.

- Om du lyssnar på ljud i kontinuerligt läge och du valt ALARM ON SOUND kommer ett summerlarm att spelas upp för att väcka dig.

Stäng av larm

Väckarurets larm kommer successivt att öka i volym så att du väcks långsamt och försiktigt. WAKE UP blinkar i displayen. När det valda larmet spelas upp, kan du stänga av det genom att trycka på **SNOOZE / OFF-RESUME (1.)**, längst upp på väckaruret eller tryck på knappen för larm **(4.)**.

Snooze Off/Resume (Snooze Av/fortsätt)

- Genom att trycka på **SNOOZE / OFF-RESUME (1.)** en gång aktiveras snoozefunktionen, läs mer under rubriken Snooze.
- Genom att trycka på **SNOOZE / OFF-RESUME (1.)** två gånger, stängs larmet av och larmet sätts i aktiveringsläge för nästa dag, dvs larmet aktiveras nästa dag på den larmtid du ställt in.

Larm På/Av

- Genom att trycka på knappen för larm **(4.)** stängs larmet av och larmet sätts i aktiveringsläge för nästa dag, dvs larmet aktiveras nästa dag på den larmtid du ställt in.

Om ditt larm aktiveras och du inte stänger av det med någon av ovanstående metoder, stängs larmet av automatiskt efter 30 minuter.

Snooze

När ditt larm aktiveras och du trycker på **SNOOZE / OFF-RESUME (1.)** en gång, larmar väckaruret igen efter 10 minuter. SNOOZE visas i displayen och hur många minuter som är kvar till nästa väckning. Väckaruret fortsätter väcka dig var 10-e minut tills du stänger av larmet.

Snooze-funktionen stängs av genom att trycka på **SNOOZE / OFF-RESUME (1.)** två gånger eller genom att trycka på knappen för larm **(4.)** en gång.

Kontrollera larmet

Du kan bekvämt kontrollera larmtiden, larmljudet och larmvolymen genom att trycka på knappen för inställning eller kontroll av larm (**5.**) på framsidan av väckaruret. ALARM CHECK och senast valda larmtid blinkar på skärmen samtidigt som senaste valda larmljud spelas upp på senast valda ljudvolymnivå.

Återuppspelning

Med **SNOOZE / OFF-RESUME (1.)** kan du också upprepa ditt senast spelade ljud med samma volym och timerinställning.

Exempel

Du lyssnar på ett ljud till halva volymen på 60-minuters timerläge. När timern automatiskt stänger av väckaruret efter 60 minuter, kan du trycka på **SOUNDS (7.)** för att automatiskt få ytterligare 60 minuter med samma inställning.

Volymkontroll

Välj ljuduppspelningsvolym genom att trycka volymknappen + **knappen** eller - **knappen (8.)** på sidan av väckaruret.

30-, 60- och 90-minuterstimer

Väckaruret har 4 timeralternativ, 30, 60, 90 minuter samt kontinuerlig uppspelning. Vid 30-, 60- och 90-minuters timerlägen försvinner ljudet gradvis under de sista 10 minuterna innan väckaruret stängs av för att undvika en hård ljudförändring.

För att välja hur länge du vill att ljudet ska spelas upp – 30, 60, eller 90 minuter – tryck på **Timer (3.)** tills önskat timerläge anges till höger i displayen.

Bakgrundsljus

När väckaruret drivs med 4 st AA-batterier och du trycker på någon knapp aktiveras bakgrundsbelysning i displayen. Bakgrundsbelysningen fortsätter att vara tänd i cirka 5 sekunder.

När väckaruret drivs med nätadaptern d v s är ansluten till ett vägguttag, kan du justera ljusstyrkan genom att hålla ned knappen för insomningsfunktionen **SE (2.)**. Du kan välja mellan 3 ljusstyrkenivåer och avstängt ljus.

Insomningsfunktion

Forskning om sömnförbättring (Sleep Enhancement®) visar att en gradvis dämpning av ljudet bidrar till att främja bättre sömn och avkoppling. När den aktiveras, kommer uppspelningshastigheten på ditt valda ljud att gradvis sakta ner för att försiktigt vagga dig till sömns. När uppspelningshastigheten når sin långsammaste punkt (nära hälften av normal hastighet), kommer den att ligga kvar på den nivån tills väckaruret stängs av automatiskt – med 30-, 60- eller 90-minuters timer – eller tills du stänger av väckaruret manuellt.

Använda insomningsfunktionen

1. Tryck på knappen för insomningsfunktionen **SE (2.)** för att aktivera den. Då visas SLEEP ENH ON i displayen. När den är aktiverad syns ikonen för insomning på vänster sida i displayen.
2. Alla ljud du spelar upp när insomningsfunktionen är aktiverad kommer att styras av funktionen.
3. Tryck på knappen för insomningsfunktionen **SE (2.)** för att stänga av den tills SLEEP ENH OFF visas i displayen. Då släcks också ikonen i displayen.

Hörlurar eller högtalarkudde

Du kan koppla hörlurar (ingår ej) eller högtalarkudde (ingår ej) till väckaruret till det 3,5 mm hörlursuttag (9) som sitter på sidan av väckaruret.

Ändra ljudkort

För större variation och extra ljudterapi, kan du bekvämt byta ljud genom att sätta in ett nytt ljudkort. Gör så här för att byta ljudkort:

1. Öppna batterifacket
2. Skjut ut det befintliga ljudkortet ur facket
3. Sätt in ditt nya ljudkort och se till att ljudkortets etikett är uppåt (se bild av väckarurets undersida under avsnittet Översikt)
4. Sätt tillbaka batteriluckan

Återställning

Om du skulle få problem med funktionerna i väckaruret, kan du behöva återställa den datorstyrda elektroniken. För att göra detta kopplar du ur väckaruret, om den är ansluten i vägguttaget, och tar ur batterierna ur batterifacket i 30 sekunder.

Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med produkten och använd de batterier som tillverkaren rekommenderar.

Tillverkaren ansvarar inte för störningar från radio eller TV vid användning av produkten.

Underhåll och skötsel

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Placera inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme.

För bästa resultat, använd endast de batterier tillverkaren rekommenderar. Byt alltid ut gamla eller svaga batterier.

Om produkten skulle bli smutsig, torka den då med en lätt fuktad trasa (ej våt!).
Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Felsökning

Kontrollera att nätadapter/batterier är rätt anslutna/isatta. Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Teknisk information och service



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning



Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och EI-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö | www.edin.se | www.hörbutiken.se / www.hoerbutiken.se

Hearing excellence since 1965

