

Återförsäljare

Bruksanvisning

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö | www.edin.se | www.horbutiken.se / www.hoerbutiken.se

Hearing excellence since 1965



Art nr 353014

Innehåll

Inledning.....	sid 2
Översikt.....	sid 3
Delarna i förpackningen.....	sid 4
Före första användningen.....	sid 4
Batterier.....	sid 4
Batteribyte.....	sid 4
Vid resor.....	sid 4
Tidsinställningen.....	sid 5
Inställning av väckningstid.....	sid 5
Aktivering av larm.....	sid 5
Somna-om-funktion.....	sid 6
Avstängning av larm.....	sid 6
Nattlampa.....	sid 6
Kuddklämma.....	sid 6
Skötsel, underhåll och garanti.....	sid 6
Felsökning.....	sid 6
Teknisk information, miljö.....	sid 7

Inledning

Tack för att du har valt att köpa Sonic Alert digitalt reseväckarur. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

Teknisk information, miljö

För teknisk information och gällande deklarerationer hänvisar vi till originalbruksanvisningen.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från ”Produktdatabank” på www.edin.se.

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Somna-om-funktion”7

Om du trycker ned SNOOZE/LIGHT (7) på framsidan av klockan stängs larmet av och aktiveras igen efter ca 4 minuter.

Avstängning av larm

Ställ larminställningsknappen (1) i läge ”OFF” (AV) för att stänga av larmet helt.

Nattlampa

Tryck ned SNOOZE/LIGHT (7) på framsidan av klockan för att se tiden när det är mörkt i rummet.

Kuddklämma

Kuddklämman fästes på klockan i fästet på klockans ovansida.

Skötsel, underhåll och garanti

Väckaruret kräver normalt sett inget underhåll. Om det skulle bli smutsigt, torka det då med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Ställ inte klockan där den utsätts för stark värme/solljus eller fukt.

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

OBS!

även att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.

Felsökning

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen.

Vänligen kontakta försäljningsstället om väckaruret trots detta inte fungerar.

Översikt - Sonic Alert



1. Aktivering av larm (ON-OFF – PÅ-AV)
2. Aktivering tidsinställning (”TIME SET”)
3. Aktivering inställning väckningstid (”ALARM SET/OFF”)
4. Inställning klockslag, timmar (”HOUR”)
5. Inställning klockslag, minuter (”MINUTE”)
6. Inställning av larmtyp:
”VIB” – VIBRATION
”BUZZ” – AKUSTISKT
”VIB BUZZ” – VIBRATION OCH AKUSTISKT
7. Snooze (repetition av larm, ”somna om-funktion”), Aktivering av nattlampa
8. Indikering larm aktiverat
9. PM-indikator (aktiveras endast vid 12-timmarsvisning)
- 10) Batterifack
- 11) Testknapp
- 12) Inställning av tidsformat (12/24 timmar)

Delarna i förpackningen

1. SBP 100 reseväckarur
2. 2 st alkaliska batterier AA/LR6 (larmdrift)
3. 1 st alkaliskt batteri AAA/LR03(klockdrift)
4. Skyddsetui
5. Kuddklämma

Före första användningen

Ta bort batteriskyddslappen som syns vid batterifacket.

Batterier

Öppna batterifacket på klockans undersida och sätt in 1 st AAA/LR03 alkaliskt batteri (driver klockan) och 2 st AA batterier (driver larmet). Var noggrann med att placera batterierna såsom anges på insidan av batterifacket.

Batteribyte

När displayen blir svag bör du byta AAA/LR03-batteriet. När larmsignalen eller vibrationen börjar bli svag bör AA/LR6-batterierna bytas ut mot nya. Det är alltid viktigt att byta ut dåliga batterier för att inte riskera läckage från batterierna, som kan förstöra klockan.

OBS!

Om klockan inte används under en lång period bör batterierna tas ur.

Vid resor

När klockan packas ner i bagaget vid resor bör AA/LR6batterierna tas ur för att undvika att batterierna tar slut om knappen för displaylampan aktiveras av misstag.

Tidsinställning

- Fäll upp displayen så att inställningsknapparna blir åtkomliga
- Timmar: Håll nere tidsinställningsknappen (2) "TIME SET" samtidigt som du trycker på knappen (4) "HOUR" för att ställa in timtid.
- Minuter: Håll nere tidsinställningsknappen (2) "TIME SET" samtidigt som du trycker på knappen (5) "MIN" för att ställa in minuttid.

Inställning av väckningstid

- Fäll upp displayen så att inställningsknapparna blir åtkomliga
- Timmar: Håll nere knappen för inställning av väckningstid (3) "ALARM SET" samtidigt som du trycker på knappen (4) "HOUR" för att ställa in timtid.
- Minuter: Håll nere inställning av väckningstid (3) "ALARM SET" samtidigt som du trycker på knappen (5) "MINUTE" för att ställa in minuttid.

Aktivering av larm

- Aktivera larmet genom att ställa in knappen för aktivering av larm (1) i läge "ON" (PÅ).
- När larmet är aktiverat syns bokstaven Z i displayens övre vänstra hörn samt en klocka mellan tim- och minutvisningen.
- Välj larmtyp (6):
"VIB" – VIBRATION
"BUZZ" – AKUSTISKT
"VIB BUZZ" – VIBRATION OCH AKUSTISKT
- Om du vill att klockan skall aktiveras samma tid följande dygn stängs larmet av via knapp (3) Aktivering inställning väckningstid ("ALARM SET/OFF") som sitter på displayens ovansida.
- Larmet kan också stängas av med snooze-knappen (se "Somna-om-funktion" nedan)
- Larmet stängs av helt genom att ställa knappen för aktivering av larm (1) i läge "OFF" (AV).