

# Sonic Boom SB200ss

Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm

Bruksanvisning



## Innehåll

Översikt.....	3
Test av larm funktion .....	4
Inställning av väckningstid.....	4
Ställa in 12- eller 24 -timmarsvisning.....	4
Aktivera alarm.....	5
Inställning av typ av larm.....	5
Inställning av larmets varaktighet.....	5
Inställning av Snooze-tid.....	5
Stänga av larmet .....	6
Dimmerinställning.....	6
Inställning av det akustiska larmets volym och ton .....	6
Batteribackup (batteri ingår ej) .....	6
Nätanslutning.....	7
Inställning av det akustiska larmets volym och ton .....	7
Sängvibrator .....	7
Skötsel och underhåll.....	7
Säkerhetsföreskrifter/Garanti .....	7
Felsökning.....	7
Teknisk information och miljö.....	8

Tack för att du har valt att köpa Sonic Boom SB200ss digitalt väckarur. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

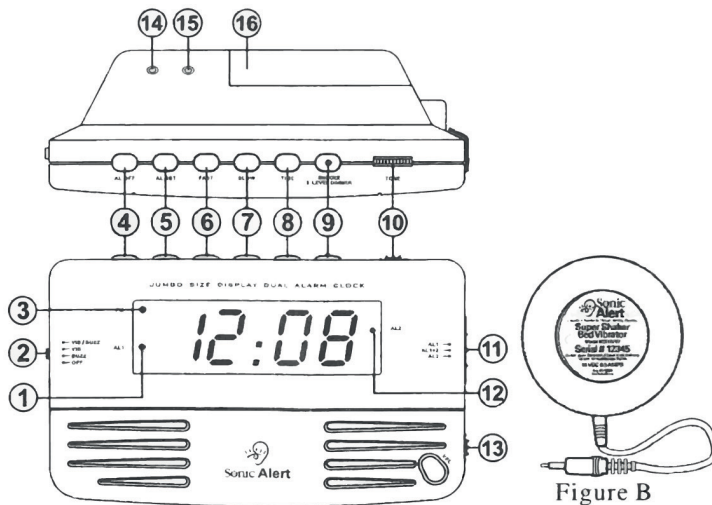


Figure B

## Översikt

1. Alarm 1 indikator (AL1)
2. Alarminställnings omkopplare
3. PM indikator (vid 12 timmarsvisning)
4. Avstängning larm.
5. Inställning av väckningstid (håll knappen nedtryckt).
6. Inställning tid (snabb) samt 12- eller 24-timmarsvisning.
7. Inställning tid (långsam).
8. Inställning tid (håll knappen nedtryckt)
9. Snooze - repetition av larm (somna om funktion) samt reglering av bakgrundsbelysning (dimmer)
10. Tonkontroll
11. Alarmomkopplare (AL1, AL1+ AL2, AL2)
12. Alarm 2 indikator (AL2)
13. Volym kontroll
14. Uttag för nätadapter (9V DC)
15. Uttag för vibrator
16. Batteri fack (9V batteri "back up")

## Test av larm funktion

1. Håll Snooze (9) och Time (8) omkopplarna nedtryckta i ca 3 sek. för att starta testfunktionen. Displayen visar "7ES7".
2. Om man inte trycker på någon knapp inom 1 minut så stängs testen av automatiskt och går tillbaka till tidvisning.
3. Tryck på någon av knapparna 4,5,6 eller 7 så stängs test funktionen av direkt.
4. Vid testning ställ funktions omkopplaren (2) i olika lägen för att testa de olika larmen.

När omkopplare är i:

- a) läge OFF ljuder en kontinuerlig testsignal för att indikera att den är testläge.
  - b) läge BUZZ demonstreras det akustiska ljudet.
  - c) läge VIB demonstreras vibratorn.
  - d) läge VIB+BUZZ demonstreras både vibrator och ljud
5. När du är klar med testningen tryck på någon av knapparna 4, 5, 6 eller 7 (se punkt 3.)

## Inställning av väckningstid

### Alarm 1.

1. Ställ omkopplare "Alarm selector" (11) i pos. AL1. Alarmindikatorn "AL1" (1) tänds.
2. Tryck och håll ner knappen "ALARM SET" (5) samtidigt som du trycker ner "FAST" (6) eller "SLOW" (7) knappen, tills den tid du ska ställa in visas i displayen.
3. Förvissa dig om att du ställt in rätt väckningstid.

### Alarm 2.

1. När alarm 1 har ställts in, ställ omkopplaren "Alarm selector" (11) i AL2 läge. Alarm indikator "AL"2 (12) tänds.
2. Tryck och håll ner knappen "ALARM SET" (5) samtidigt som du trycker ner "FAST" (6) eller "SLOW" (7) knappen, tills den tid du ska ställa in visas i displayen.

## Ställa in 12- eller 24 -timmarsvisning

Klockan är förinställd på 24-timmarsvisning. För att ställa in 12-timmarsvisning:

Tryck ner FAST (6) i 6 sekunder. 24 H visas i displayen. Släpp knappen och tryck ner den snabbt igen så står det 12 H. Vänta tills displayen återgår till tidvisning. Nu är det 12-timmarsvisning och på e.m. lyser PM-indikator (3). AM för f.m. visas ej.

## Aktivera alarm

1. För att aktivera larm 1: ställ larmomkopplaren (11) i läge AL1.  
Alarmindikator "AL1" (1) tänds.
2. För att aktivera larm 2: ställ larmomkopplaren (11) i läge AL2.  
Alarmindikator "AL2" (12) tänds.
3. För att aktivera båda larmen: ställ larmomkopplaren (11) i läge AL1+AL2.  
Alarm indikatorerna "AL1" (1) och "AL2" tänds.

## Inställning av typ av larm

Knappen (2) för inställning av larm har fyra lägen. Inställningen gäller båda larmen.

VIB BUZZ: Vibrator och akustiskt larm

VIB: Vibrator

BUZZ: Akustiskt larm

OFF: Avstängd

Larmmönster vid inställning VIB BUZZ:

**Alarm 1:** När alarm 1 är aktiverat ljuder 3 pip för buzz, varvat med vibrator.  
Detta mönster upprepas tills larmet stoppas.

**Alarm 2:** När alarm 2 är aktiverat ljuder 4 pip för buzz, varvat med vibrator.  
Detta mönster upprepas tills larmet stoppas.

## Inställning av larmets varaktighet

Standardinställning av larmtiden är 30 minuter; det går att ställa in tiden mellan 1 och 59 minuter. För att ändra larmtiden:

1. Tryck och håll AL. SET-knappen (5) i sex sekunder. Klockans display visar 30.  
Släpp AL. SET knappen (5)
2. Tryck ner SLOW knappen (7) för att ställa in larmtid, välj mellan 1 och 59 minuter.
3. När displayen visar den larmtid du valt, släpp knappen. Efter ca 3 sekunder återgår klockan att visa tid.

## Inställning av Snooze-tid

Standardinställningen av Snooze-tid är 9 minuter, men den kan ändras till mellan 1 och 30 minuter.

1. Tryck och håll ner SNOOZE-knappen (9) i fyra sekunder. Klockdisplayen visar standard-Snooze-tiden 9. Släpp SNOOZE-knappen (9).
2. Tryck ner SLOW-knappen (7) tills displayen visar den tid du väljer för Snooze. Släpp knappen.
3. Efter ca 3 sekunder återgår klockan att visa tid.

När larmet startar, tryck ner SNOOZE-knappen (9) för att stoppa larmet temporärt. Larmet startar igen efter 9 minuter, eller om du ställt in en egen tid mellan 1-30 minuter. Snooze-funktionen repeteras tills larmet stängs av med AL. OFF (4). Snooze-funktionen på Alarm 1 och 2 är oberoende av varandra.

## Stänga av larmet

Larmet kan stängas av temporärt eller permanent.

- Om larmet stängs av med "ALARM OFF"-knappen (4) stängs den och startar igen vid samma tid nästa dag, förutsatt att inte larmtiden ändras.
- För att stänga av larmet permanent, skjut "Alarm Mode Switch"-knappen (11) till "OFF"-läge. Larmet är då avstängt tills "Alarm Mode Switch"-knappen (11) ändras till "VIB/BUZZ", "VIB" eller "BUZZ" läge.

OBS: Alarm 1 och 2 är oberoende av varandra.

## Dimmerinställning

Det finns 5 nivåer på inställning av displayens ljusstyrka. Tryck på "SNOOZE"-knappen (9) för att ändra ljusstyrkan på displayen. Ljusstyrkan varierar från 5-4-3-2-1-2-3-4-5, (från stark till svag och från svag till stark).

OBS: Dimmerinställning fungerar inte när klockan är i Snooze-läge.

## Inställning av det akustiska larmets volym och ton

Volym regleras med "VOL"-hjulet (13) på klockans högra sida.

Bas och diskant regleras med "TONE"-hjulet (10) på klockans ovasida.

## Batteribackup (batteri ingår ej)

- Öppna batterilocket på klockans baksida genom att skjuta det i pilens riktning
- Sätt in ett alkaliskt batteri enligt illustrationen i botten på batterifacket (9V/6AM6)
- Stäng batterifacket

Vid strömavbrott hålls klockans tidsinställningar kvar om du sätter in ett batteri i batterifacket. Klockans larmfunktion fungerar dock ej under strömavbrott och även displayen slocknar. Urverket fortsätter dock att fungera, så när strömmen kommer tillbaka, visar displayen tiden igen. Batterierna bör bytas var 6:e månad.

## Nätanslutning

Anslut nätadaptern till ingången märkt "AC-9V IN" på klockans baksida. Anslut nätadaptern till vägguttaget (230V).

## Inställning av det akustiska larmets volym och ton

Använd knappen "VOL" (1) på klockans högra sida för att reglera volymen på det akustiska larmet. Tonen regleras med knappen "TONE" (3).

## Sängvibrator

Vibratoren ansluts till ingången (15) "VIBRATOR" på klockans baksida.

- Välj en av larminställningarna som aktiverar vibratoren ("VIB BUZZ" eller "VIB")
- Placera vibratoren under kudden
- När larmet aktiveras vibrerar vibratoren

OBS: Anslut endast medföljande vibrator.

## Skötsel och underhåll

Väckaruret kräver normalt sett inget underhåll. Om det skulle bli smutsigt, torka det då med en lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Ställ inte klockan där den utsätts för stark värme/solljus eller fukt. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden. Använd alkaline batterier, för bästa resultat enligt rekommendation från tillverkaren. Byt alltid ut gamla eller svaga batterier.

## Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med produkten.

## Felsökning

- Kontrollera att alla kontakterna sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen.
- Kontrollera att omkopplaren inuti batterifacket är ställd på 60Hz om klockan drar sig mycket.
- Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

OBS: Produktgarantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.

## Teknisk information och miljö

För teknisk information och gällande deklarerationer hänvisar vi till originalbruksanvisningen.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från "Dokumentarkiv" på [www.edin.se](http://www.edin.se).

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på [support@edin.se](mailto:support@edin.se).

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.