

Bruksanvisning

Introduktion	3
Översikt	4
Display	6
Ikoner som visas i displayen.....	7
Ansluta telefonen, batterier.....	8
Inställningar	10
Ställa in språk	10
Olika typer av tidsformat – datum.....	10
Olika typer av tidsformat – tid	11
Ställa in tid och datum	11
Vibrator	12
Automatisk inställning av textstorlek i display.....	12
Justera displayens kontrast	13
Automatisk brytning av samtal.....	14
R-funktionen	14
T-slinga.....	15
Använda telefonen	15
Volym- och tonkontroll	15
Svara på inkommande samtal	16
Ringa ett samtal.....	16
Hands-free.....	16
Svara med högtalarfunktion.....	16
Ringa med högtalarfunktion.....	17
Aktivering av högtalarfunktionen under pågående samtal	17

Varning: Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att telefonen är ställd på den lägsta nivån för respektive användare och att varje användare känner till denna funktion.

Headset/halsslinga/slingkrok.....	17
Återuppringning senast slagna telefonnummer.....	17
Återuppringning tidigare slagna telefonnummer.....	18
Radera tidigare slagna telefonnummer	18
Knapparna R, * och #.....	18
Lagra ett telefonnummer i minnet (snabbval).....	19
Ringa snabbvalsnummer.....	19
Telefonbok	19
Skapa en kontakt i telefonboken	19
Användning = av bokstavsknapparna	20
Skapa en kontakt från inkommande telefonsamtal.....	21
Observera!.....	21
Radera en kontakt från telefonboken	21
Ändra en kontakt i telefonboken	22
Ringa en kontakt i telefonboken	22
Avancerade funktioner	23
Använda nummerpresentatören - inkommande samtal.....	23
Använda nummerpresentatören - ringa upp ett nummer.....	24
Använda nummerpresentatören - radera ett nummer	25
Använda nummerpresentatören - radera alla nummer.....	25
Samtal väntar	25
Säkerhetsföreskrifter/Garanti	26
Underhåll och skötsel	26
Om telefonen inte fungerar	26
Teknisk information och service	27
Miljö och återvinning	27
Tillbehör CL1400	27

Introduktion

Tack för att du har valt att köpa en CL1400 telefon som underlättar för dig med nedsatt hörsel. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med den.

Om du använder hörapparat, ställ in hörapparaten i T-läge (teleslinga) för att lyssna via den inbyggda teleslingan i luren.

Vänligen läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder telefonen.

Varning!


Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att telefonen är ställd på den lägsta nivån för respektive användare och att varje användare känner till denna funktion.

OBS!

För att minska risken för att telefonen förstörs av blixtnedslag bör den kopplas ur vid kraftiga åskoväder.

Översikt



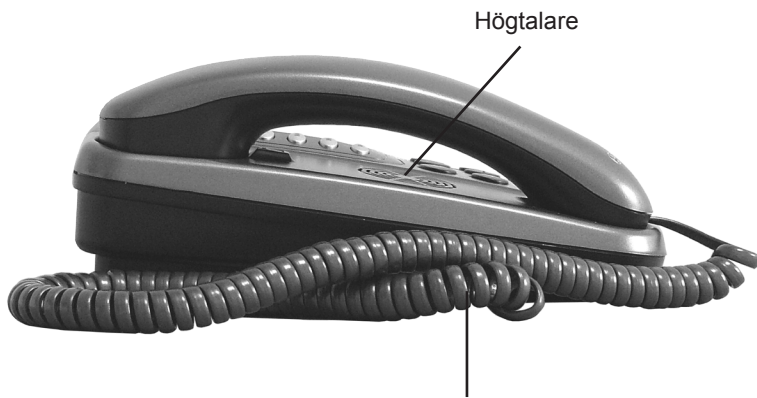


Högtalare

Lursladd

OBS! Sätts i uttaget på vänster sida av telefonen

Volymkontroll
inkommande ljud


Tonkontroll
inkommande ljud

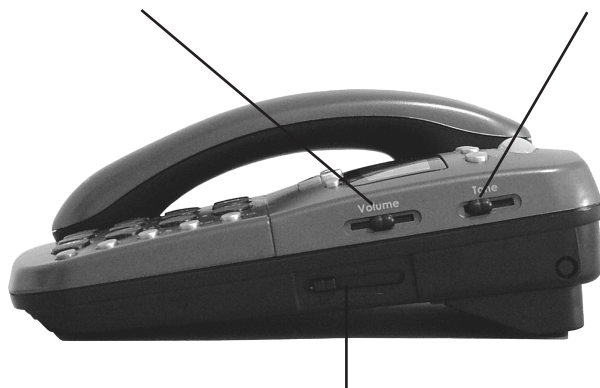

Volymkontroll för
högtalare

Display

Exempel på displaytext (med telefonluren pålagd)

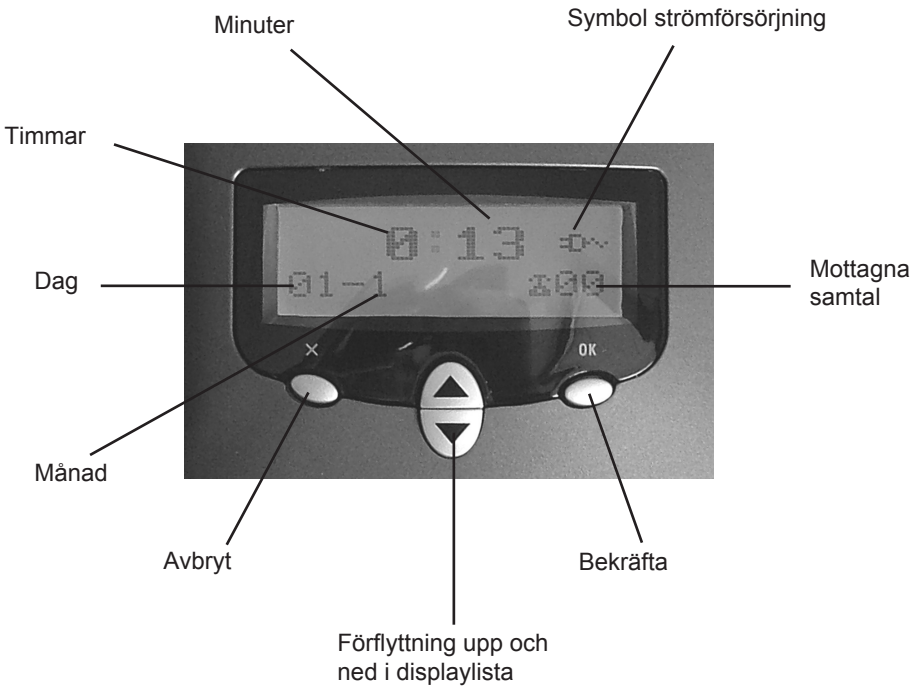

- Bekräftelseknappen används för att bekräfta en uppgift eller ett val som visas i displayen.
- ▲▼ knapparna används för att förflytta sig upp och ned i menyn som visas i displayen.
- X-knappen används för att avbryta en handling/ta bort en uppgift. I några fall används den för att bekräfta ett val (t.ex. för att ta bort ett lagrat nummer).

Ikoner som visas i displayen

När telefonen är ansluten till telefon- och elnätet visas symboler i displayen som underlättar användningen av telefonen:



Batterinivå (Symbolen visas om batterieliminatorn ej är ansluten till elnätet eller vid strömavbrott.)



Anslutning till elnätet



Kontrast i displayen



Högtalaren är aktiverad



Visas före ett telefonnummer som registrerats i nummer-presentatören




Visar nya telefonnummer som registrerats i nummer-presentatören.

Ansluta telefonen, batterier

- Använd ej laddningsbara batterier.
- Släng ej batterier i hushållsavfallet.

Uttag för nätadapter **)

OBS! Använd endast medföljande nätadapter från Geemarc.

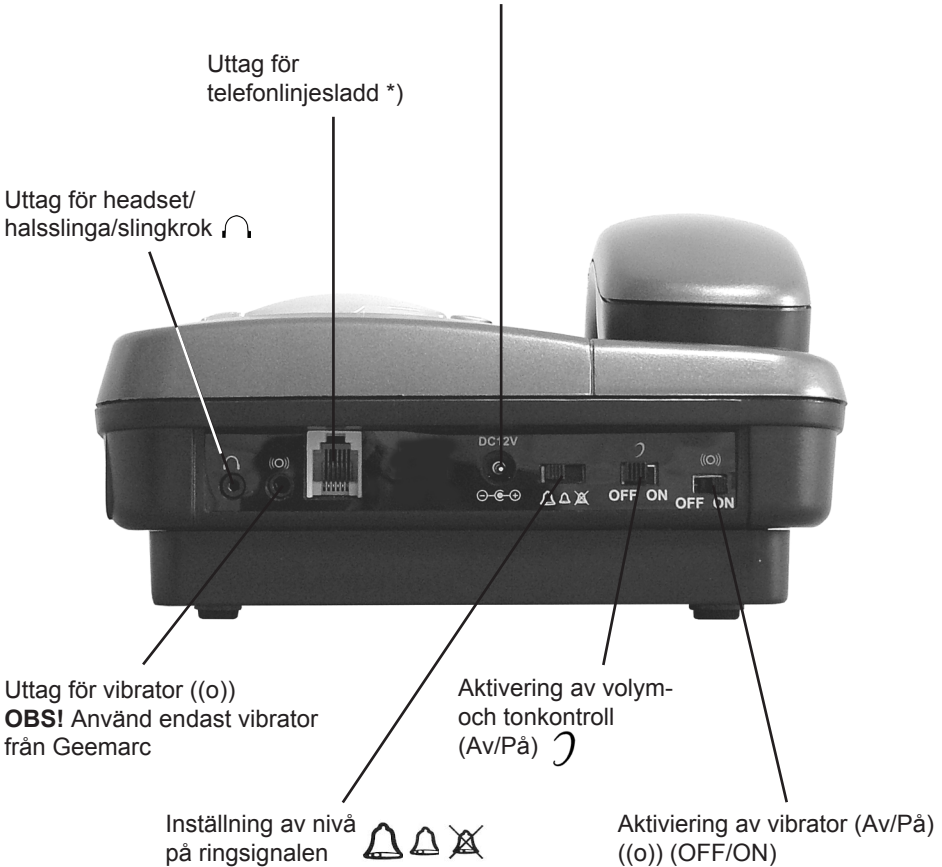

*) TNV-3 klassad enligt EN60950

**) Klassificerad "strömförande" enligt EN 60950

1. Anslut telefonluren till telefonen.
2. Öppna batterifacket som finns på undersidan av telefonen.
3. Placera 4 blyfria alkaliska batterier (storlek AAA, 1,5V; ingår ej i leveransen). Batterierna behövs som backup vid strömavbrott (för att behålla lagrade telefonnummer i minnet och användning av telefonboken). Om strömavbrott inträffar eller om batterieliminatorm ej sitter i visas en batteri symbol i displayen. Denna symbol visar också om batterinivån är låg (fylld symbol=fulla batterier, tom symbol=tomma batterier).
4. Sätt tillbaka locket på batterifacket.
5. Anslut telefonkabeln till uttaget på telefonens baksida (se illustration sid 8) och anslut den andra änden av kabeln till den medföljande telefonpluggen. Anslut sedan telefonpluggen till telefonjacket.
6. Anslut sladden till batterieliminatorm till telefonen och därefter till eluttaget. Använd ett eluttag i nära anslutning till telefonen för att möjliggöra snabb urkoppling om det skulle uppstå några problem.

Observera!

Batterieliminatorm måste vara inkopplad för att telefonens alla funktioner skall kunna utnyttjas. Batterierna behövs för backup vid strömavbrott (se information punkt 3, ovan).

Om batterieliminatorm kopplas ur av misstag och telefonen saknar batterier (eller om dessa är tomma) fungerar endast telefonens grundläggande funktioner, såsom att ringa och ta emot samtal.

Inställningar

Ställa in språk

Det finns 16 olika språk att välja mellan. Välj språk genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck ned OK och direkt därefter ▼ och håll ned knapparna samtidigt.
2. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”REG TEL”.
3. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
4. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”LANGUE”.
5. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
6. Använd ▲ ▼ tills du kommer till det språk du vill ha.
7. Välj ”SVENSKA” om du vill ha svenska.
8. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
9. Tryck på knappen X två gånger för att gå ur menyn.

Olika typer av tidsformat – datum

Du kan välja mellan två typer av datumformat; Dag-Månad eller Månad-Dag. Ändra genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck ned OK och direkt därefter ▼ och håll inne knapparna samtidigt.
2. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”TELEFON”.
3. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
4. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”DATUMFORMAT”.
5. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
6. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”DD_MM” (dag-månad) eller ”MM-DD” (månad-dag)
7. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
8. Tryck på knappen X två gånger för tidsinställning. Gå direkt till punkt 4 i avsnittet Olika typer av tidsformat – tid.

Olika typer av tidsformat – tid

Du kan välja mellan två typer av tidsformat: 12- eller 24-timmarsvisning. Ändra genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck ned OK och direkt därefter ▼ och håll inne knapparna samtidigt.
2. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”TELEFON”.
3. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
4. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”TIDSFORMAT”.
5. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
6. Välj ”12 HOUR” eller ”24 HOUR”
7. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
8. Tryck på knappen X två gånger för att gå ur menyn.

Om du väljer ”12 HOUR”, föregås klockslag före 12.00 av ”AM” och ”PM” vid klockslag efter 12.00. Tryck en gång på X om du vill fortsätta direkt till Ange tid.

Ställa in tid och datum

Ställ in tid och datum genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck ned OK och direkt därefter ▼ och håll inne knapparna samtidigt.
 2. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”ANGE TID”.
 3. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
 4. ”STÄLL IN TID” syns i nedre delen av displayen. Använd ▲ ▼ för att välja timme.
 5. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
 6. Använd ▲ ▼ för att välja minut (10-tal).
 7. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
 8. Använd ▲ ▼ för att välja minut (1-tal).
 9. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
 10. Använd ▲ ▼ för att välja månad.
 11. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
 12. Använd ▲ ▼ för att välja dag. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
 13. Tryck på knappen X för att gå ur menyn.
-

Inställning av ringsignal

Ringsignalen kan ändras till önskvärd nivå genom att ändra på inställningen med hjälp av omkopplaren på telefonens baksida (se illustration sidan 7). Du kan välja mellan HÖG (HI), LÅG (LOW) eller AVSTÄNGD (OFF):



HÖG



LÅG



AVSTÄNGD

Telefonen levereras med ringsignalen inställd på ”HÖG”.

Om du inte tycker om ringsignalens melodi går den att ändra genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck ned OK och direkt därefter ▼ och håll inne knapparna samtidigt.
2. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”TELEFON”.
3. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
4. Välj ”ANGE RINGTON”.
5. Tryck på knappen OK, tryck igen på knappen OK för att lyssna på alternativet.
6. Använd ▲ ▼ och välj ett av ringsignalsalternativen.
7. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
8. Den valda signalen hörs.
9. Tryck på knappen X tre gånger för att gå ur menyn.

Vibrator

Vibrator finns att köpa som extra tillbehör. En omkopplare med två lägen på baksidan av telefonen (se illustration sid 7) aktiverar (ON) eller avaktiverar (OFF) vibratorm. **Observera** att endast Geemarcs vibrator får användas.

Automatisk inställning av textstorlek i display

Om denna funktion är aktiverad (På) kan upp till 18 siffror i det nummer du slår visas i displayen. Om funktionen är avaktiverad (Av) visas endast 8 siffror i displayen.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck ned OK och direkt därefter ▼ och håll inne knapparna samtidigt.
2. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”TELEFON”.
3. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
4. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”TEXTSTORLEK”.
5. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
6. Använd ▲ ▼ och välj ”PÅ” eller ”AV” för att aktivera eller avaktivera funktionen.
7. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
8. Tryck på knappen X två gånger för att gå ur menyn.

Justera displayens kontrast

Displayen har en bakgrundsbelysning som stängs av automatiskt 15 sekunder efter avslutad aktivitet.

Kontrasten kan ändras genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck ned OK och direkt därefter ▼ och håll inne knapparna samtidigt.
2. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”TELEFON”.
3. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
4. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”LCD CONTRAST”.
5. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
6. Använd ▲ ▼ och välj ett av alternativen.
7. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
8. Tryck på knappen X två gånger för att gå ur menyn.

Automatisk brytning av samtal

Om denna funktion är aktiverad bryts samtalet automatiskt efter 8 sekunder om linjen är upptagen. Aktivera/avaktivera funktionen genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck ned OK och direkt därefter ▲ och håll inne knapparna samtidigt.
2. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”TELEFON”.
3. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
4. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”AUTO AVSLUTA”.
5. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
6. Använd ▲ ▼ och välj ”PÅ” eller ”AV” för att aktivera eller avaktivera funktionen.
7. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
8. Tryck på knappen X två gånger för att gå ur menyn.

R-funktionen

Kontrollera att din CL1400 är korrekt inställd. Telefonen levereras inställd på TBR 100 mS som är det korrekta värdet för Sverige (TBR - time break recall).

I en del länder används 300 mS eller 600 mS. Inställningen ändras genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck ned OK och direkt därefter ▼ och håll inne knapparna samtidigt.
2. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”TELEFON”.
3. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
4. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”VÄLJ TBR”.
5. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
6. Använd ▲ ▼ och välj önskat alternativ
(”TBR 100 mS”/”TBR 300mS”/”TBR 600mS”)
7. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
8. Tryck på knappen X två gånger för att gå ur menyn.


T-slinga

Använd telefonen som en vanlig telefon. Telefonluren har en inbyggd slinga. Slingan är alltid aktiverad. Ställ in din hörapparat i T-läge för att stänga ute omkringliggande, störande ljud. Volym- och tonkontrollen ger även utslag i slingan.

Använda telefonen

Volym- och tonkontroll

Tonkontroll fungerar endast när extravolym är påkopplad.

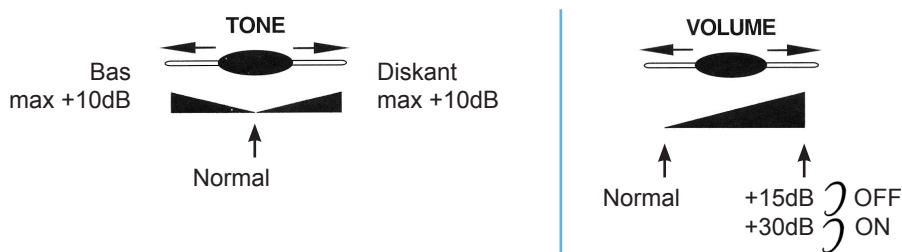

Se information nedan om aktivering och avaktivering av extravolym.

Observera! När både tonkontrollen (diskant) och volymkontrollen är inställda i maxläge och extravolymen är aktiverad, kan ett störande, visslande, ljud uppträda i luren. Sänk volymen om detta inträffar. Kontrollerna reglerar även volymen och tonen i headset/hals slinga/slingkrok.

Snabbknapp för aktivering/avaktivering av extravolym, $\rightarrow \mathcal{J}$, sitter till höger på ovansidan av telefonen (se illustration sid 3). När omkopplaren \mathcal{J} på telefonens baksida (se illustration sid 7) är kopplad i läge **ON** är extravolymen aktiverad automatiskt varje gång telefonen används. Om omkopplaren är ställd i läge **OFF** måste extravolymen aktiveras genom att trycka på knappen $\rightarrow \mathcal{J}$. När extravolymen är aktiverad lyser den röda lysdioden som är placerad i övre kanten av knappen $\rightarrow \mathcal{J}$.

Svara på inkommande samtal

När någon ringer avger telefonen en ringsignal och ett blinkande rött sken. Telefonnummer och/eller namnet på den som ringer visas i displayen om du har nummerpresentationstjänst.

Lyft på luren när det ringer och lägg tillbaka luren när samtalet är avslutat.

Ringa ett samtal



1. Lyft på luren
2. Invänta kopplingston och slå önskat nummer. Siffrorna som du slår visas i displayen medan du slår numret.
3. Lägg tillbaka luren när samtalet är avslutat.

Hands-free

CL1400 har en inbyggd högtalare och mikrofon (se illustrationer sidorna 3 och 4) för en ”hands free”-funktion som möjliggör att omgivningen också kan lyssna på telefonkonversationen. Du kan också ansluta headset/halsslinga/slingkrok till telefonen (se illustration sid 7).

Högtalarvolymen ändras med reglaget som sitter längst ned på telefonens högra sida (se illustration sid 4).



För att ljudet skall nå fram till den du pratar med bör du sitta så nära mikrofonen som möjligt.

Högtalarfunktionen aktiveras genom att trycka på den gröna -knappen till höger, längst ned på telefonens ovansida (se illustration sid 3). Samtalet avslutas genom att trycka på -knappen igen.

Lyft på luren om du vill avbryta högtalarfunktionen under ett samtal.



Svara med högtalarfunktion

Gör på följande sätt om du vill svara på ett samtal och använda högtalarfunktionen:

1. Tryck på den gröna -knappen till höger, längst ned på telefonens ovansida utan att lyfta på luren.
 2. Samtalet avslutas genom att trycka på -knappen igen.
-




Ringa med högtalarfunktion

Gör på följande sätt om du vill ringa ett ”högtalarsamtal”:


1. Tryck på den gröna -knappen till höger, längst ned på telefonens ovansida utan att lyfta på luren.
2. Slå önskat nummer när du hör kopplingstonen i högtalaren.
3. Din röst tas upp av mikrofonen i telefonens framkant.
4. Samtalet avslutas genom att trycka på -knappen igen.

Aktivering av högtalarfunktionen under pågående samtal

Gör på följande sätt för att aktivera högtalarfunktionen under ett pågående samtal:

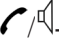


1. Tryck på och håll nere den gröna -knappen till höger, längst ned på telefonens ovansida, samtidigt som du lägger på luren.
2. Släpp upp -knappen
3. Högtalarfunktionen är nu aktiverad.
4. Samtalet avslutas genom att trycka på -knappen igen.

Headset/halsslinga/slingkrok

Använd -knappen näst längst ned till höger på telefonens ovansida (se illustration sid 3) för att få in samtalet i headset/halsslinga/slingkrok om något av dessa är kopplade till telefonen (se illustration sid 7).

Återuppringning senast slagna telefonnummer


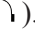
Med denna funktion kan du automatiskt ringa upp senast slagna telefonnummer.

1. Lyft luren eller använd högtalaren (tryck på ) eller använd headset (tryck på ).
2. Invänta kopplingston och tryck på knappen /P.
3. Det senast slagna telefonnumret rings nu upp automatiskt.

Återuppringning tidigare slagna telefonnummer

Med denna funktion kan du automatiskt välja att ringa upp något av de 30 senast slagna telefonnumren.

Välj något av de 30 senast slagna telefonnumren genom att göra på följande sätt. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på OK-knappen. I displayen visas ”UPPRINGT” (”DIALLED”), senast slagna nummer, totalt antal slagna nummer samt datum- och tidsangivelse för när numret ringdes upp.
2. Använd ▲▼ för att bläddra bland numren och välj det nummer du önskar ringa upp.
3. Lyft luren eller använd högtalaren (tryck på ) eller använd headset (tryck på ).
4. Valt telefonnummer rings nu upp automatiskt.

Radera tidigare slagna telefonnummer

Gör på följande sätt för att ta bort ett eller flera av de 30 senast uppringda telefonnumren. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen OK. I displayen visas ”SLAGET NR” (”DIALLED”), senast slagna nummer, totalt antal slagna nummer samt datum- och tidsangivelse för när numret ringdes upp.
2. Använd ▲▼ för att bläddra bland numren och välj det nummer du vill radera.
3. Tryck på knappen X. I displayen visas ”TA BORT?”
4. Tryck på knappen X igen för att bekräfta borttagning av telefonnumret.
5. Upprepa tills alla nr är borttagna eller ska vara kvar.
6. Tryck på knappen OK för att gå ur menyn.

Knapparna R, * och

Dessa knappar används för att utnyttja tjänster som erbjuds av din telefonoperatör. Detaljerad information fås av telefonoperatören.

Lagra ett telefonnummer i minnet (snabbval)

CL1400 kan lagra 3 direktnummer (M1, M2 och M3). Knapparna sitter längst upp på ovansidan av telefonen (se illustration sid 3). Gör på följande sätt för att lagra ett telefonnummer i minnet. Luren skall vara pålagd.

1. Slå det nummer du vill lagra.
2. Tryck på och håll nere den knapp där du vill lagra numret i 2-3 sekunder (knapparna M1, M2 eller M3).
3. ”OK SPARA” visas i displayen.
4. Tryck på OK, Numret är sparat.

Ringa snabbvalsnummer

Gör på följande sätt för att ringa upp något av de tre snabbvalsnumren. Luren skall vara pålagd.

1. Lyft luren eller använd högtalaren (tryck på /) eller använd headset (tryck på).
2. Välj någon av snabbvalsknapparna M1, M2 eller M3 och telefonnumret rings upp automatiskt.

Telefonbok

Upp till 99 kontakter kan lagras i den inbyggda telefonboken med namn och telefonnummer.

Skapa en kontakt i telefonboken

Gör på följande sätt för att skapa en kontakt i telefonboken. Luren skall vara pålagd.


1. Tryck ned OK och direkt därefter ▼ och håll inne knapparna samtidigt.
2. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”TELEFONBOK”.
3. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
4. Använd ▲ ▼ tills du kommer till ”LÄGG TILL”, tryck OK.
5. Slå telefonnumret (max 30 siffror per kontakt). Använd knappen X för att radera en felaktig siffra.

6. Tryck på knappen OK för att bekräfta telefonnumret och skriv in namnet på den person som telefonnumret avser. Välj bokstav genom att trycka ned den nummerknapp där önskad bokstav finns tryckt ovanför knappen. Se nästa sida för detaljerad information om ytterligare tecken och hur bokstavsknapparna används.
7. Tryck på knappen OK i tre sekunder för att lagra kontakten när du skrivit in namnet.
8. När du gjort detta kan du antingen skapa en ny kontakt eller trycka på knappen X för att gå ur menyn.

Användning = av bokstavsknapparna

När du skriver in namnet kan du använda nedanstående tabell för att välja rätt bokstav. En grunduppsättning av bokstäver finns tryckt ovanför nummerknapparna. Å och ä kan i dagsläget inte användas. Ersätt dessa med aa eller ae alternativt använd endast bokstaven a.

<u>Knapp</u>	<u>Bokstav</u>	<u>Knapp</u>	<u>Bokstav</u>
1	. ? – “ ’ <	6	M N O m n o 6 Ö Ø
2	A B C a b c Æ Ø	7	P Q R S p q r s
3	D E F d e f	8	T U V t u v Ü
4	G H I g h i	9	W X Y Z w x y z
5	J K L j k l	0	+ & @ / \$ %

- Lägga till ett mellanslag: Tryck på knappen OK två gånger.
- Nästa bokstav är samma som den du just registrerat (eller om bokstaven befinner sig på samma knapp): Tryck först på OK-knappen och välj därefter önskad bokstav.
- Om du valt fel bokstav: Tryck på knappen X.
- Lägga in en paus i telefonnumret: använd knappen  (ett P visas i displayen).

Skapa en kontakt från inkommande telefonsamtal

Om du har nummerpresentationstjänst kan du skapa en kontakt från ett inkommande samtal. Varje inkommande samtal sparas som en egen post i nummer-presentatörens lista.

Gör på följande sätt för att skapa en kontakt i telefonboken från en post som finns lagrad i nummerpresentatören. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck ned någon av knapparna ▲ eller ▼ Inkommande samtal visas i displayen.
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja det nummer som du vill lagra i telefon boken.
3. Tryck på och håll nere knappen OK tills dess att den sista siffran i det valda numret blinkar. Du kan också ändra numret i detta läge.
4. Bekräfta numret genom att trycka på knappen OK.
5. Nu kan du ändra eller skriva in namnet på den kontakt vars nummer du registrerat eller tryck på och håll nere knappen OK i tre sekunder för att bekräfta lagring av telefonnummer och namn.
6. Tryck på knappen X för att gå ur meny.

Observera!

Du kan titta i listan på inkommande samtal under ett pågående samtal genom att trycka på knappen OK och sedan knapparna ▲▼ för att förflytta dig i listan.


Radera en kontakt från telefonboken

Gör på följande sätt för att ta bort en kontakt från telefonboken. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja den kontakt du vill ta bort.
3. Tryck på knappen X. I displayen visas ”TA BORT?”.
4. Tryck på knappen X igen för att bekräfta borttagningen av kontakten.
5. Tryck på knappen OK för att gå ur meny.





Ändra en kontakt i telefonboken

Gör på följande sätt för att ändra en kontakt i telefonboken. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd knapparna ▲ ▼ för att välja den kontakt du vill ändra.
3. Tryck på och håll nere knappen OK tills dess att den sista siffran i det valda numret blinkar.
4. Tryck på knappen X för att ändra telefonnumret och registrera ett nytt nummer.
5. Tryck på knappen OK.
6. Nu kan du ändra namnet på kontakten.
7. Tryck på knappen X för att ta bort en bokstav. För ytterligare information om hur man registrerar en kontakt, v.v. se ”Skapa en kontakt i telefonboken” på sidan 20.
8. Tryck på och håll nere knappen OK i tre sekunder för att bekräfta lagring av telefonnummer och namn.
9. Tryck på knappen X för att gå ur menyn.

Ringa en kontakt i telefonboken



Gör på följande sätt för att ringa en kontakt i telefonboken. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen .
2. Använd knapparna ▲ ▼ för att välja den kontakt du vill ringa upp. Du kan hitta kontakten snabbare genom att trycka in första bokstaven i namnet.
3. Lyft luren eller använd högtalaren (tryck på  / ) eller använd headset (tryck på ).
4. Telefonnumret rings upp automatiskt.


Avancerade funktioner

Använda nummerpresentatören - inkommande samtal


Om du har nummerpresentationstjänst visas inkommande samtal i displayen. När minnet är fullt, försvinner det äldsta telefonnumret från listan och det nya telefonnumret läggs till i listan. Varje samtal lagras med datum, klockslag och i ordningsföljd.

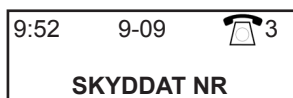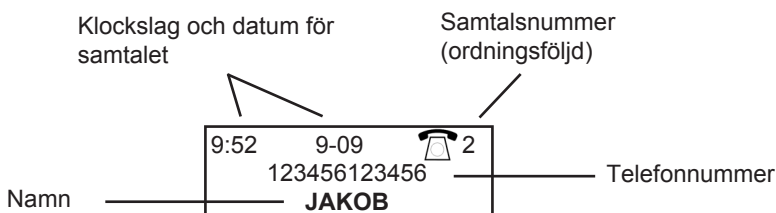

Observera! Om den som ringer har hemligt nummer visas "SKYDDAT NR" i displayen.

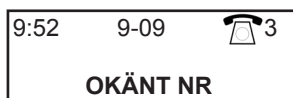

Om telefonnumret är okänt (t.ex. vissa internationella samtal) visas "OKÄNT NR" i displayen.

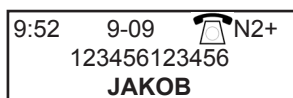

Om samma kontakt ringer flera gånger, lagras endast det senaste samtalet i listan på inkommande samtal och ett +-tecken visas efter samtalsnumret.


Observera! Ett N visas i displayen framför de samtalsnummer som du ej har tittat på i listan.

När ett nytt samtal har tagits emot blinkar indikeringslampan för inkommande samtal (se illustration sid 3) och i displayen visas "NYA" enligt illustrationen på nästa sida. Lampan släcks när du har bläddrat igenom obesvarade samtal med knapparna.

9:52	9-09	
28		01
NYA		SAMTAL


Detta exempel visar att totalt antal inkomna samtal i listan är 28 varav 1 samtal är nytt.

Använd knapparna Använd ▲ ▼ för att bläddra bland telefonnumren i listan.

	16:53	
16-06		28

När du bläddrat igenom alla samtal försvinner "NEW" och displayen återgår i viloläge efter några sekunder.



Totalt antal inkomna samtal i listan visas fortfarande i displayen.

	16:53	
16-06		00

När listan på inkommande samtal är tom (t.ex. om du rensat listan) visas **00** i displayen.

Använda nummerpresentatören - ringa upp ett nummer

Gör på följande sätt för att ringa en kontakt i listan. Luren skall vara pålagd.

1. Använd knapparna ▲ ▼ för att bläddra i listan för inkommande telefonnummer och stanna på det nummer som du vill ringa upp.
2. Lyft luren eller använd högtalaren (tryck på ) eller använd headset (tryck på ).
3. Telefonnumret rings upp automatiskt.

Observera!

Uppringningsfunktionen fungerar inte för telefonnummer som visar "SKYDDAT NR" ("PRIVATE") eller "OKÄNT NR" ("OUT OF AREA").

Använda nummerpresentatören - radera ett nummer

Gör på följande sätt för att ta bort ett telefonnummer från listan. Luren skall vara pålagd.

1. Använd knapparna ▲▼ för att välja den post du vill ta bort.
2. Tryck på knappen X. I displayen visas ”RADERA?”.
3. Tryck på knappen X igen för att bekräfta borttagningen av posten.
4. Tryck på knappen OK för att gå ur menyn.

Använda nummerpresentatören - radera alla nummer

Gör på följande sätt för att ta bort samtliga telefonnummer från listan. Luren skall vara pålagd.

1. Tryck på knappen X och håll den nere tills dess att ”RADERA ALLT?” visas i displayen.
2. Tryck på knappen X igen för att bekräfta rensningen av alla nummer.
3. Tryck på knappen OK för att gå ur menyn.

Samtal väntar

Om du har bredbandstelefonti kan du använda den här funktionen.

Med den här funktionen aktiverad får du tonsignaler i din telefon om någon ringer när du redan talar i telefon. Du kan då välja att ta emot det nya samtalet genom att pendla mellan det första och det andra samtalet, utan att avsluta det första.

Denna funktion inte aktiverad när telefonen kommer ny från fabriken. Därför måste du aktivera den först för att kunna använda den. Gör på följande sätt för att aktivera funktionen. Luren ska vara pålagd.

1. Tryck och håll in OK och ▼ knapparna.
 2. Använd ▲ eller ▼ knappen för att välja ”INSTÄLLNINGAR” (“SET PHONE”)
 3. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
 4. Använd ▲ eller ▼ knappen för att välja ”SAMTAL VÄNTAR” (“CALL WAITING”)
-

5. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
6. Använd ▲ eller ▼ knappen för att välja ”PÅ” (”ON”)
7. Tryck på knappen OK för att bekräfta.
8. Tryck på knappen X två gånger för att gå ur menyn.

Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Utsätt inte produkten för höga temperaturer.

Använd inte produkten med annan nätadapter än den som levereras med produkten.

Använd endast de laddningsbara batterier som leverantören rekommenderar.


Underhåll och skötsel

Ställ inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme.

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Om produkten skulle bli smutsig, torka den då med en lätt fuktad trasa (ej våt!). Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Om telefonen inte fungerar

- Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Extra viktigt är att telefonlurens modularkontakter är ordentligt intryckta. Dra ur och sätt tillbaka modularkontakten i telefonpluggen ett par gånger om telefonen är ”död”.
- Du kan ändra ton (+-10dB) och volym (+30dB) när den röda lysdioden som är placerad i övre kanten av knappen  är tänd. Läs mer i avsnittet Volym- och tonkontroll. Om den inte är tänd ökas enbart volymen med +15dB.

- Om telefonen har låst sig: Dra ur nätadaptern och ta ut batterierna och låt telefonen stå så i ett par minuter. Sätt tillbaka nätadaptern och batterierna.

Teknisk information och service

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från Dokumentarkiv på www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning



Släng förbrukad produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och EI-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Tillbehör CL1400

Som extra option finns ett antal tillbehör till CL1400:

- Vibrator OBS! Använd endast original-vibrator från Geemarc
- Headset
- Halsslinga
- Slingkrok
- Stickkontakt till norskt telefonjack

Kontakta Bo Edin AB, eller den återförsäljare som levererat telefonen, för ytterligare information.

Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö

| www.edin.se

| www.hörbutiken.se /
www.hoerbutiken.se

Hearing excellence since 1965

