

EJ-770T

Stationär sändare

Bruksanvisning



Innehåll

Systemkomponenter.....	3
Översikt stationär sändare (EJ-770T)	4
Anslutning av antenn och ljudkällor	5
Inställningar sändare	6
Översikt fickmottagare (EJ-7R)	8
Användning fickmottagare EJ-7R.....	9
Översikt laddstationer	11
Användning laddstationer.....	13
Underhåll, skötsel och garanti.....	13
Felsökning	14
Teknisk information.....	15
Miljö	15

Systemkomponenter

Tack för att ni har valt att köpa Okayo Stationär sändare EJ-770T.

Stationär sändare EJ-770T

Stationär sändare 863-865 MHz.

Fickmottagare (EJ-7R)

Mottagare med uttag (3,5mm) för hörsnäcka/hörlurar eller halsslinga för hörapparatbärare.


Laddstation

OKAYO laddstation med helautomatisk laddning. Laddstation finns för 2, 12, 36 eller 50 enheter. Fulladdade batterier (NiMH, max 1600mAh, 5-6 timmar) ger 8-10 timmars användningstid.

Övriga komponenter


I produktserien finns även stationära diversitymottagare, olika typer av trådlösa mikrofoner och uppladdningsbara högtalare.

Översikt stationär sändare (EJ-770T)

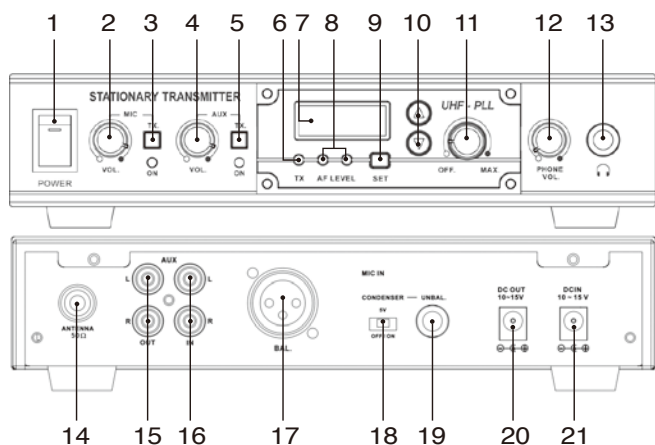


1. Huvudströmbrytare
2. MIC/VOL; volymkontroll för fast ansluten mikrofon
3. MIC/TX; när lysdioden är tänd sänds signal från den fast anslutna mikrofonen via EJ-770T
4. AUX in volymkontroll
5. AUX/TX; när lysdioden är tänd sänds signal från AUX in via EJ-770T
6. Indikering UHF-sändare
7. LCD display UHF-sändare (kanalinfo)
8. Ljudnivåindikator UHF-sändare
9. Aktivering inställning av kanal UHF-sändare
10. Kanalväljare (upp/ned) UHF-sändare
11. Strömbrytare/volymkontroll UHF-sändare
12. Volym hörlursuttag
13. Hörlursuttag (6,3mm, 32 Ohm)
14. Utag för antenn
15. AUX ut
16. AUX in
17. Balanserad mikrofoningång (XLR)
18. Av/på strömförsörjning kondensatormikrofon (5V)
19. Obalanserad mikrofoningång (6,3mm)
20. DC ut (12-15V 500mA, kan strömförsörja en EJ-770T)
21. DC in (12-15V 1A)

Anslutning av antenn och ljudkällor


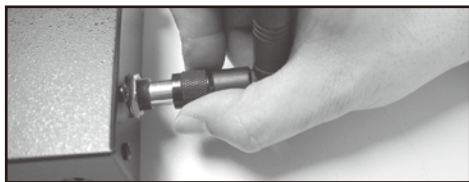


Montering av antenner

Börja med att skruva fast den medföljande antennen (medsols) och vinkla antennen till vertikalt läge för att uppnå bästa sändningsförhållanden

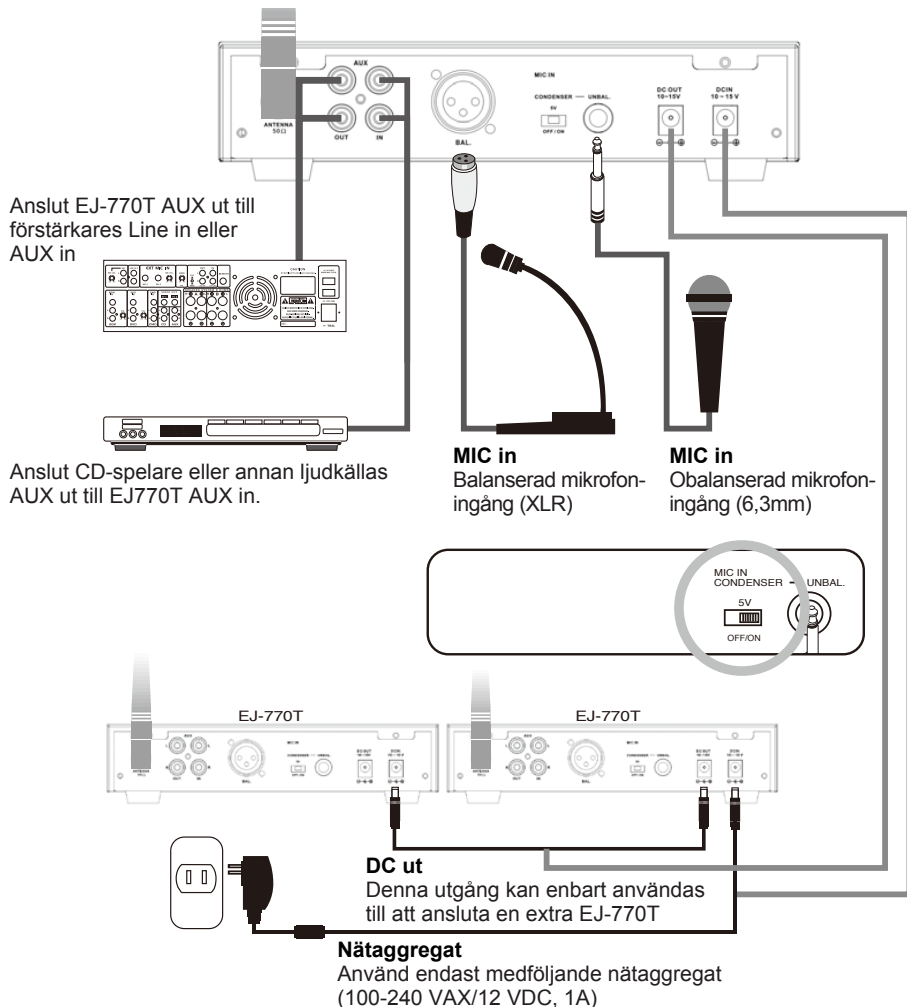

Inställningar sändare

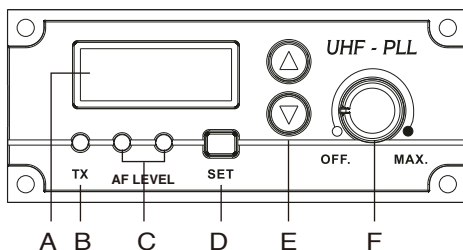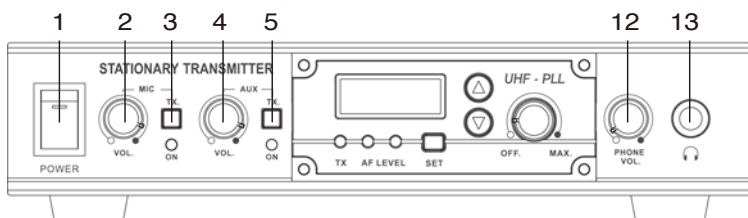

- A. LCD-display (kanalinfo)
- B. Indikering mikrofonkanal
- C. Ljudnivåindikator
- D. Aktivering inställning av kanal
- E. Kanalväljare (upp/ned)
- F. Strömbrytare/volymkontroll

Mottagaren sätts på genom att vrida volymkontrollen medurs tills det hörs ett "klick" och stängs av åt motsatt håll. Volymen ökas genom att vrida volymkontrollen medurs.

Kanalinställning

1. Slå på huvudströmbrytaren (1).
2. Sätt på mottagaren, genom att vrida volymkontrollen medurs, och ställ in önskad kanal.
3. Aktivera kanalinställning genom att trycka ned SET-knappen i 2-3 sekunder till dess att kanalnumret som visas i displayen börjar blinka.
4. Välj därefter kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på sändarens framsida tills den kanal du valt syns i displayen.
5. Tryck åter på SET-knappen för att bekräfta val av kanal.

Notera: Tryck på någon av kanalväljarknapparna (upp/ned) för att se vilken frekvens inställd kanal motsvarar.

Överföring av mikrofonsignal till UHF-sändaren

Tryck in "MIC TX". När den röda lysdioden är tänd förs signalen från mikrofonen över till UHF-sändaren. Notera att även om "MIC TX" inte är aktiverad sänds signalen ut via AUX ut och även via hörlursuttaget.


Överföring av AUX insignal till UHF-sändaren

Tryck in "AUX TX". När den röda lysdioden är tänd förs signalen från ljudkällan över till UHF-sändaren. Notera att även om "AUX TX" inte är aktiverad sänds signalen från den anslutna ljudkällan ut via AUX ut och även via hörlursuttaget.

Hörlursuttag (6,3mm stereo)

Anslut hörlurar och justera volymen för att lyssna på signalen från ljudkällan som är ansluten till AUX in. OBS! Endast AUX in sänds ut via hörlursuttaget, ej MIC in.

Översikt fickmottagare (EJ-7R)

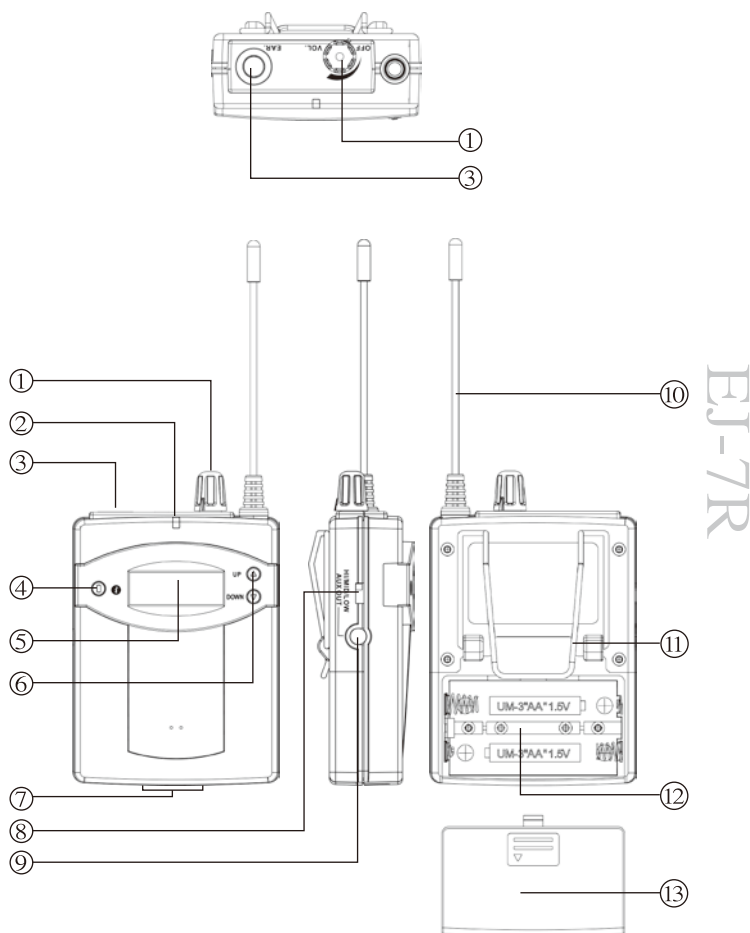

1. Volymkontroll/strömbrytare

Mottagaren sätts på genom att vrida volymkontrollen medurs tills det hörs ett "klick" och stängs av åt motsatt håll. Volymen ökas genom att vrida volymkontrollen medurs.

2. Indikeringslampa för strömförsörjning och mottagning. När mottagaren slås på lyser lampan rött. När mottagaren har kontakt med sändaren lyser lampan grönt.

3. Uttag för hörsnäcka/hörlurar/halsslinga (3,5mm). Både mono- och stereolurar kan användas.

4. *i* (information). Frekvens på inställd kanal visas i LCD-displayen när *i*-knappen trycks ned.

5. LCD-display. Tänds upp när enheten slås på. Batteristatus och kanal visas i displayen. Displayen slocknar efter ca 5 sekunder. När kanaländring görs, eller om du trycker på i-knappen, tänds displayen upp igen.
6. Kanalväljare. Tryck pil upp eller pil ner för att ställa in kanal.
7. Kontaktbleck för laddning (anpassat till Okayo laddstationer)
8. AUX ut volymkontroll. Tre nivåer; HI, MID och LOW
9. AUX ut (3,5mm) OBS! Används ej!
10. Antenn
11. Bälteshållare
12. Batterifack för 2st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2st 1,2V AA/LR6 uppladdningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh)
13. Lock batterifack

Användning fickmottagare EJ-7R

Börja med att sätta in batterier i mottagare. Sändare och mottagare skall vara inställda på samma kanal. Nedan följer en detaljerad beskrivning av enheternas olika funktioner och inställningar.

Övergripande

Sätta in batterier



1. Håll tummen på locket till batterifacket och för det försiktigt i pilens riktning och lyft av locket.
2. Sätt in 2st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2st 1,2V AA/LR6 uppladdningsbara NiMH-batterier (max 1600 mAh).
3. Skjut tillbaka locket till batterifacket.

OBS! Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid.

Information i LCD-display



1. Kanal 8 är vald och batterierna är fulladdade.
2. Batterierna börjar ta slut och bör laddas/bytas ut så snart som möjligt.
3. När batterisymbolen blinkar är batterierna i princip helt slut. När batterierna är helt tomma stängs mottagaren av automatiskt.

Om du använder uppladdningsbara batterier

Observera att dåligt laddade batterier kan försämra systemets prestanda.

Batterierna laddas i Okayo laddare som finns för 2, 12 (laddväska) eller 36 (laddväska) fickmottagare/-sändare.

OBS! Använd endast laddningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh) om du använder laddstation. Alkaliska batterier förstör laddstationen.

Sätta på mottagaren

1. Vrid volymkontrollen medurs tills du hör ett klick.
2. Indikeringslampa för strömförsörjning och mottagning lyser rött när mottagaren sätts på. LCD-displayen tänds och visar On. Kort därefter visas kanal och batteristatus i displayen. Displayen slocknar efter ca 5 sekunder. När kanaländring görs, eller om du trycker på i-knappen, tänds displayen igen.
3. Lampan övergår till grönt sken när mottagaren får signal från sändaren.
4. Anslut hörlurar/halsslinga till fickmottagaren.

Volymkontroll

Lyssna på ljudet från sändaren i hörsnäckan/hörlurarna/halsslingan och öka volymen till en behaglig nivå genom att vrida volymkontrollen medurs.

Kanalinställning

Välj kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på mottagarens framsida tills den kanal du valt syns i displayen.




AUX ut

Fickmottagaren kan anslutas till annan ljudutrustning (aktiv högtalare m.m.) via AUX ut. Volymen ställs in med kontrollen på mottagarens vänstra sida; HI/MID/LOW. AUX ut används ej.

Stänga av mottagaren

Stäng av mottagaren efter användning genom att vrida volymkontrollen moturs till dess att du hör ett "klick" och meddelandet OFF syns i displayen. OFF slocknar efter en kort stund och mottagaren är då avstängd.


HDC-707 (laddstation för två ficksändare/-mottagare)

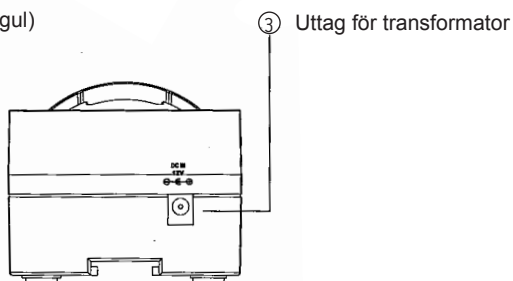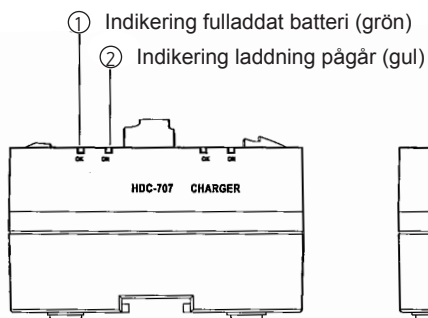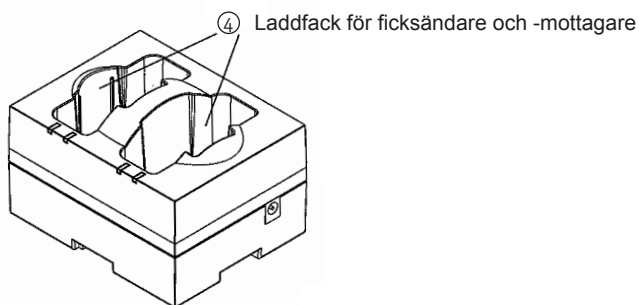

1. Indikering fulladdat batteri (grönt sken)
2. Indikering laddning pågår (gult sken)
3. Uttag för transformator
4. Laddfack för ficksändare och -mottagare

HDC-712/736 (laddstation för 12/36 ficksändare/-mottagare)

Placering av EJ-7R i laddstation

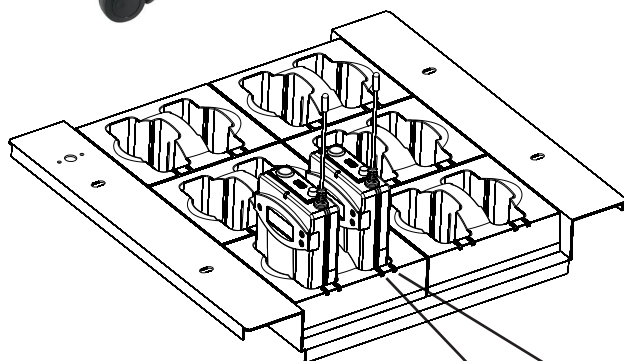

1. Indikering fulladdat batteri (grön)

2. Indikering laddning pågår (fast gult sken)

OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier. Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.



OBS! Vik ner antennerna och fäst i bältesclipset enligt bild innan du stänger locket.

Användning laddstationer

Anslut den medföljande transformatorn till laddstationen och därefter till eluttaget. (För HDC-712/736 måste även strömbrytaren slås på.) Indikeringslamporna för fulladdat batteri (grön) och laddning pågår (gul) tänds hastigt i nämnd ordning.

OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier (max 1600mAh). Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.) Laddstationen gör en "självtest" och därefter tänds indikeringslampan för laddning pågår (gul) en kort stund, vilket bekräftar att laddstationen är klar för användning.

Stäng av ficksändarna/-mottagarna och placera dem i laddfacken så att indikeringslampan för laddning pågår (gul) lyser med ett fast sken. När enheterna är fulladdade tänds indikeringslampan för fulladdade batterier (grön).

OBS!

Använd endast laddningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh) om du använder laddstation. Alkaliska batterier förstör produkterna.

Vik ner antennerna och fäst dem i bältesklipset, se bild på föregående sida (HDC-712/736), innan du stänger locket.

Underhåll, skötsel och garanti

1. Håll systemet borta från regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme för att undvika skador på systemet.
2. Hantera systemet med varsamhet för att förlänga livstiden. Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.
3. Utsätt inte systemet för höga temperaturer.
4. Använd inte systemet med annan transformator än den som levereras med systemet.
5. Mikrofonen bör ej användas i närheten av störande källor såsom kommunikationsutrustning eller påslagna datorer, videobandspelare, DVD-spelare m.m.
6. Ta ut batterierna om mikrofonen/ficksändaren inte används under en längre tid för att förhindra batteriläckage som kan skada utrustningen.
7. Använd endast de laddningsbara batterier som leverantören rekommenderar (NiMH, max 1600 mAh).

Felsökning

Det går ej att sätta på mottagaren

Kontrollera att laddade batterier finns i mottagaren och att batterierna är korrekt insatta.

Det går ej att sätta på mottagaren

Kontrollera att laddade batterier finns i mottagaren och att batterierna är korrekt insatta.

Jag hör inget i hörsnäckan/hörlurarna/halsslingan

1. Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal
2. Kontrollera att volymkontrollen är korrekt inställd
3. Verifiera att mottagare och sändare ej befinner sig för långt från varandra

Jag får störningar i mottagaren

1. Byt kanal om det finns andra sändare i närheten till dess att du hittar en störningsfri kanal
2. Störningar kan också orsakas av annan trådlös utrustning i närheten.

ERROR visas i display

1. Håll nere knapparna SET och UP och DOWN samtidigt som du sätter på mottagaren/sändaren.
2. Om återställningen lyckats syns "ON" i displayen (OBS! Kanal visas ej).
3. Stäng av enheten och sätt på den igen.

Laddstationen indikerar inte att mottagaren tar emot laddning

Ta ur mottagaren ur laddstationen. Starta den och stäng av den igen och försök på nytt. Sändaren skall alltid vara avstängd när den står i laddstationen.

Laddstationens lampor tänds inte/blinkar

Starta mottagaren och stäng av den igen och försök på nytt.

1. Kontrollera att det är laddningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh).
2. Kontrollera att batterierna är korrekt insatta i mottagare

3. Kontrollera att laddstiften i laddstationen eller mottagarens kontaktbleck ej är dammiga eller smutsiga. Rengör med en bomullspinne med rengöringssprit vid behov.
4. Kontrollera att mottagarna är korrekt isatta i laddfacket

Om systemet trots ovanstående felsökning inte fungerar bör du lämna det till försäljningsstället eller sända det till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. Märk godset med ditt namn, adress och telefonnummer samt bifoga kvitto eller faktura och felbeskrivning.

Teknisk information

Kompletterande upplysningar med tillbehörsförteckning och systemkomponenter med specifikationer för sändare, mottagare och laddstationer finns angivet i respektive datablad samt CE-certifikat kan laddas ner från www.edin.se_Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se

Miljö

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se

Hearing excellence since 1965

