

Portabel överdiskslina för receptioner och
enskilda möten

Bruksanvisning



P-CTC
Art nr 202070/20207A

Inledning

Tack för att du har valt att köpa en P-CTC. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med den.

P-CTC erbjuder mångsidig hjälp till hörapparat användare vid otaliga situationer och platser som kräver korta eller längre enskilda möten.

Vi rekommenderar att du läser igenom hela bruksanvisningen före installation och användning.

Uppladdning

Koppla in det switchade nätaggregatet som medföljer i P-CTC enheten samt vägguttaget. Enheten kan laddas under användning men laddas då i långsamt laddningsläge. När enheten laddas blinkar lysdioden på baksidan rött i snabb takt. När lysdioden lyser rött med ett fast sken är enheten färdiguppladdad. Brukstiden på full laddning är ca 4 timmar och stand-by tiden ca 24 timmar. När batteriet behöver laddas på nytt blinkar lysdioden rött med några sekunders mellanrum.

Användning

Placera P-CTC enheten på bordet eller bänken mellan talaren och hörapparat användaren. Enhetens baksida med mikrofonen riktas mot talaren. Aktivera enheten genom att ställa spaken till vänster i läge "ON". Notera att hörapparat användaren måste aktivera telespolen i sin hörapparat genom att ställa den i läge T eller MT. Personen som lyssnar bör befinna sig inom 1,2m radie från enheten. Skulle personen uppleva ljudet för högt eller för lågt kan enheten flyttas närmare eller längre ifrån lyssnaren. Den som talar gör så i normal ton och volym. Talaren bör liksom lyssnaren befinna sig inom ca 1,2 meters avstånd från mikrofonen. Efter användning rekommenderar vi att enheten stängs av och ställs på laddning igen för att vara redo för nästa användare.

Koppla till extern tryckzonsmikrofon

Enheten kan också användas i möten med flera deltagare/talare. Till detta rekommenderar vi att ni kopplar en Univox 13T tryckzonsmikrofon till enhetens 3,5mm ingång. Mikrofonen placeras på mitten av konferensbordet med ungefär lika avstånd till samtliga talare. P-CTC enheten placeras inom 1,2m meters avstånd från lyssnaren med fronten mot denna.

Säkerhetsföreskrifter/Garanti

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering. Utsätt inte produkten för höga temperaturer. Använd inte produkten med annan nätdapter än den som levereras med produkten.

Bo Edin AB ansvarar inte för störningar från radio eller TV, inte heller för skada som produkten orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada.

Underhåll och skötsel

Produkten kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka den då med en ren fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Ställ inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Felsökning och service

Kontrollera lysdiodsindikatorer enligt installations-/inkopplingsanvisning och funktionskontroll beskrivet i detta dokument. Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen.

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering.

Teknisk information

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från "Dokumentarkiv" på www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se, se sista sidan.



Återförsäljare

Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

Tillbehör

Art nr Beskrivning

202071 Hylla till P-CTC

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förrådvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

Hearing excellence since 1965

