

Innehåll

Systembeskrivning.....	2
Översikt ficksändare (EJ-7XT)	3
Översikt fickmottagare (EJ-7R)	4
Användning sändare och mottagare.....	5
Övergripande för ficksändare och -mottagare	5
Sätta in batterier.....	5
Information i LCD-display	5
Om du använder uppladdningsbara batterier.....	6
Ficksändare EJ-7XT	6
Sätta på sändaren	6
Kanalinställning.....	6
Mikrofonkänslighet	6
AUX in	6
Sekreess	6
Stänga av sändaren	7
Fickmottagare EJ-7R	7
Sätta på mottagaren	7
Volymkontroll	7
Kanalinställning.....	7
AUX ut	7
Stänga av mottagaren	7
Översikt laddstationer	8
HDC-702 (laddstation för ficksändare/-mottagare, handmik.) ...	8
HDC-707 (laddstation för två ficksändare/-mottagare)	9

OKAYO Personligt konferenssystem

HDC-712/736 (laddstation 12/36 st ficksändare/-mottagare)...	10
Användning laddstationer	11
Underhåll, skötsel och garanti.....	11
Felsökning.....	12
Teknisk information.....	13
Miljö.....	13

Systembeskrivning

Tack för att ni har valt att köpa Okayo personliga konferenssystem, bestående av en ficksändare med konferens-/myggmikrofon och en mottagare med hörsnäcka/hörlurar eller halsslinga. Vi hoppas att ni kommer att bli nöjda med produkterna.

I de flesta paket följer även en transportväska med. Konferensmikrofonen, som täcker ett konferensbord för 8 mötesdeltagare, ansluts till sändaren som ställs i mitten av konferensbordet.

Ficksändare (EJ-7XT)

Ficksändare med uttag (mini-XLR) för anslutning av mikrofon.

Konferensmikrofon, övriga mikrofoner

Tryckzonsmikrofon som ansluts till sändaren för användning vid ett konferensbord med upp till 8 deltagare. Kan kompletteras med ytterligare en konferensmikrofon för att användas vid större konferensbord (upp till 16 mötesdeltagare) alternativt med andra typer av mikrofoner (mygga, headsetmikrofon) för andra användningsområden.


Fickmottagare (EJ-7R)

Mottagare med uttag (3,5mm) för hörsnäcka/hörlurar eller halsslinga för hörapparatbärare.

Laddstation (tillval)

Komplettera med OKAYO laddstation med helautomatisk laddning. Laddstation finns för 2, 12 eller 36 enheter. Fulladdade batterier (NiMH, max 1600 mAh, 5-6 timmar) ger 8-10 timmars användningstid.


Översikt ficksändare (EJ-7XT)

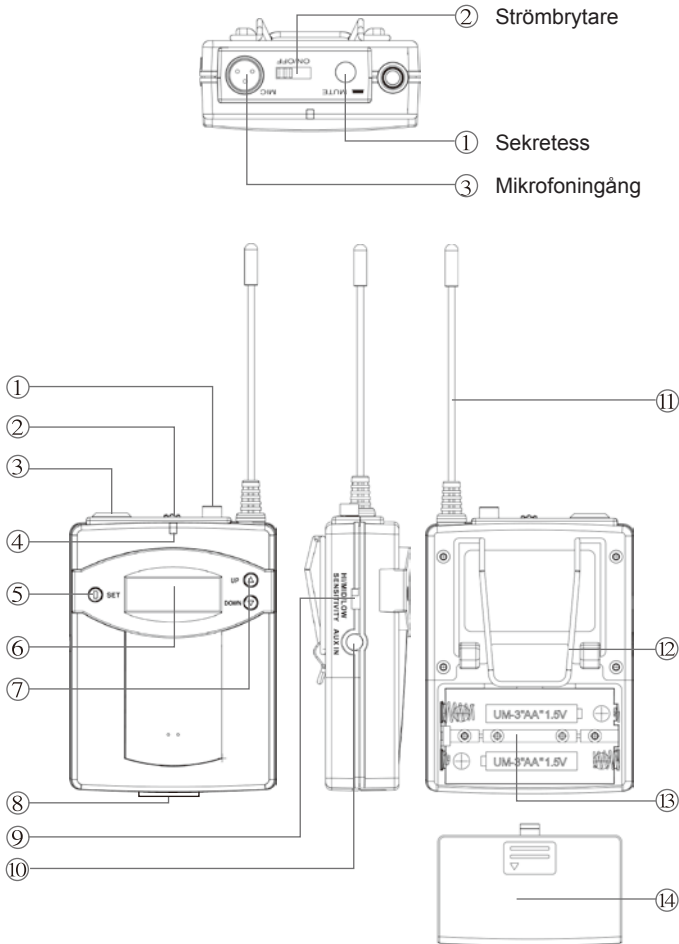

EJ-7T SERIES

1. Sekretessknapp
2. Strömbrytare (ON/OFF)
3. Mikrofoningång (mini-XLR)
4. Batteriindikator (lyser rött när sändaren slås på)
5. Aktivering av kanalinställning
6. LCD-display
7. Kanalväljare
8. Kontaktbleck för laddning
9. Nivåkontroll (känslighet)
10. AUX in (3,5mm)
11. Antenn
12. Bälteshållare
13. Batterifack för 2x1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2x1,2V AA/LR6 uppladdningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh)
14. Lock batterifack

Översikt fickmottagare (EJ-7R)

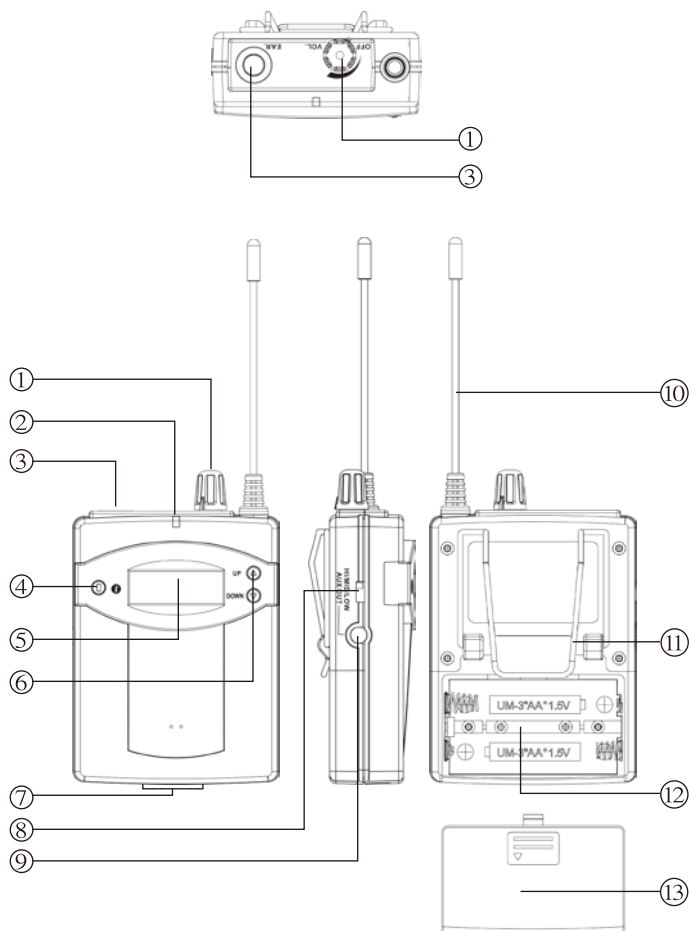

EJ-7R

1. Volymkontroll/strömbrytare
Mottagaren sätts på genom att vrida volymkontrollen medurs tills det hörs ett "klick" och stängs av åt motsatt håll. Volymen ökas genom att vrida volymkontrollen medurs.
2. Indikeringslampa för strömförsörjning och mottagning. När mottagaren slås på lyser lampan rött. När mottagaren har kontakt med sändaren lyser lampan grönt.
3. Uttag för hörsnäcka/hörlurar/halsslinga (3,5mm). Både mono- och stereolurar kan användas.
4. *i* (information). Frekvens på inställd kanal visas i LCD-displayen när *i*-knappen trycks ned.

5. LCD-display. Tänds upp när enheten slås på. Batteristatus och kanal visas i displayen. Displayen slocknar efter ca 5 sekunder. När kanaländring görs, eller om du trycker på i-knappen, tänds displayen upp igen.
6. Kanalväljare. Tryck pil upp eller pil ner för att ställa in kanal.
7. Kontaktbleck för laddning (anpassat till Okayo laddstationer).
8. AUX ut volymkontroll. Tre nivåer; HI, MID och LOW.
9. AUX ut (3,5mm) **OBS!** Används ej!
10. Antenn
11. Bälteshållare
12. Batterifack för 2 st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2 st 1,2V AA/LR6 uppladdningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh).
13. Lock batterifack

Användning sändare och mottagare

Börja med att sätta in batterier i sändare och mottagare. Sändare och mottagare skall vara inställda på samma kanal. Nedan följer en detaljerad beskrivning av enheternas olika funktioner och inställningar.

Övergripande för ficksändare och -mottagare

Sätta in batterier



1. Håll tummen på locket till batterifacket och för det försiktigt i pilens riktning och lyft av locket.
2. Sätt in 2 st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2 st 1,2V AA/LR6 uppladdningsbara NiMH-batterier (max 1600 mAh).
3. Skjut tillbaka locket till batterifacket.

OBS! Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid.

Information i LCD-display



1. Kanal 8 är vald och batterierna är fulladdade.



2. Batterierna börjar ta slut och bör laddas/bytas ut så snart som möjligt.



3. När batterisymbolen blinkar är batterierna i princip helt slut. När batterierna är helt tomma stängs mottagaren av automatiskt.

OKAYO Personligt konferenssystem

Om du använder uppladdningsbara batterier

Observera att dåligt laddade batterier kan försämra systemets prestanda.

Batterierna laddas i Okayo laddare som finns för 2, 12 (laddväska) eller 36 (laddväska) fickmottagare/-sändare.

OBS! Använd endast laddningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh) om du använder laddstation. Alkaliska batterier förstör produkterna.

Ficksändare EJ-7XT

Sätta på sändaren

Sätt på sändaren med strömbrytaren. Batteriindikatorn lyser rött och LCD-displayen tänds och visar On. Kort därefter visas kanal och batteristatus i displayen. Displayen slöcknar efter ca 5 sekunder. När kanaländring görs tänds displayen igen.

Kanalinställning

1. Aktivera kanalinställning genom att trycka ned SET-knappen i 2-3 sekunder till dess att kanalnumret som visas i displayen börjar blinka.
2. Välj därefter kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på sändarens framsida tills den kanal du valt syns i displayen.
3. Tryck åter på SET-knappen för att bekräfta val av kanal.

Mikrofonkänslighet

Varning! Var extra noga med att kontrollera att ljudnivån inte blir för hög i fickmottagare som används med hörlurar.

Anslut vald mikrofon till ficksändaren och ställ in känsligheten med kontrollen på mottagarens vänstra sida: HI/MID/LOW.

För konferenssittning med tryckzonsmikrofon rekommenderas känslighet HI för bästa taluppfattbarhet och för användning med headsetmikrofon (vi rekommenderar headsetmikrofon HM-50C) rekommenderas känslighet MID.

AUX in

Använd AUX in om du vill ansluta MP3-spelare eller annan ljudkälla till sändaren.

Sekretess

Om du tillfälligt vill stänga av mikrofonen trycker du ned ”MUTE” när du inte pratar i mikrofonen. När du vill använda mikrofonen igen trycker du på ”MUTE” en gång till.

Stänga av sändaren

Stäng av sändaren efter användning genom att ställa strömbrytaren i ”OFF” och meddelandet OFF syns i displayen. OFF slocknar efter en kort stund och sändaren är då avstängd.

Fickmottagare EJ-7R

Sätta på mottagaren

1. Vrid volymkontrollen medurs tills du hör ett klick.
2. Indikeringslampa för strömförsörjning och mottagning lyser rött när mottagaren sätts på. LCD-displayen tänds och visar On. Kort därefter visas kanal och batteristatus i displayen. Displayen slocknar efter ca 5 sekunder. När kanaländring görs, eller om du trycker på i-knappen, tänds displayen igen.
3. Lampan övergår till grönt sken när mottagaren får signal från sändaren.
4. Anslut hörlurar/halsslinga till fickmottagaren.

Volymkontroll

Lyssna på ljudet från sändaren i hörsnäckan/hörlurarna/halsslingan och öka volymen till en behaglig nivå genom att vrida volymkontrollen medurs.

Kanalinställning

Välj kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på mottagarens framsida tills den kanal du valt syns i displayen.

AUX ut

Fickmottagaren kan anslutas till annan ljudutrustning (aktiv högtalare m.m.) via AUX ut. Volymen ställs in med kontrollen på mottagarens vänstra sida; HI/MID/LOW. AUX ut används ej.

Stänga av mottagaren


Stäng av mottagaren efter användning genom att vrida volymkontrollen moturs till dess att du hör ett ”klick” och meddelandet OFF syns i displayen. OFF slocknar efter en kort stund och mottagaren är då avstängd.

Översikt laddstationer


Det finns flera typer av laddare och laddstationer för Okayo ficksändare, -mottagare och handmikrofoner. Utöver de som beskrivs nedan finns det en större laddlåda för 50 fickmottagare/-sändare för permanent placering.

HDC-702 (laddstation för en ficksändare/-mottagare och en handmikrofon)

1. Indikering laddning pågår ficksändare/-mottagare (gult sken)
2. Indikering fulladdat batteri ficksändare/-mottagare (grönt sken)
3. Indikering laddning pågår handmikrofon (gult sken)
OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier. Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.
4. Indikering fulladdat batteri handmikrofon (grönt sken)
5. Laddfack för ficksändare/-mottagare
6. Laddkontakter, två stycken
7. Laddfack för handmikrofon
8. Laddkontakt
9. Hållare för handmikrofonens skyddshölje
10. Uttag för nätaggregat

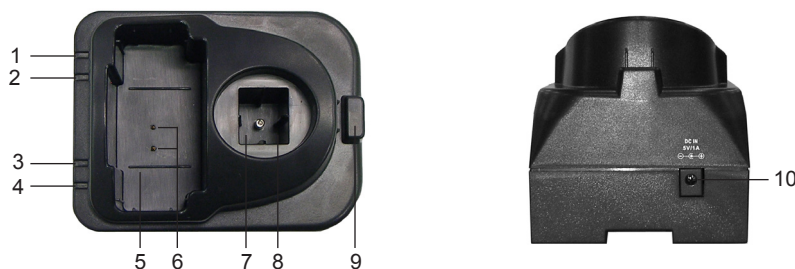


HDC-707 (laddstation för två ficksändare/-mottagare)

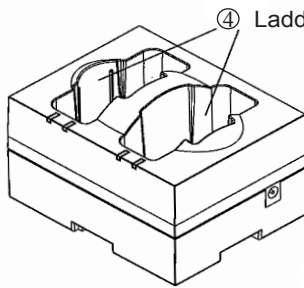


④ Laddfack för ficksändare och -mottagare

1. Indikering fulladdat batteri (grönt sken)
2. Indikering laddning pågår (fast gult sken)
OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier. Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.
3. Uttag för transformator
4. Laddfack för ficksändare och -mottagare

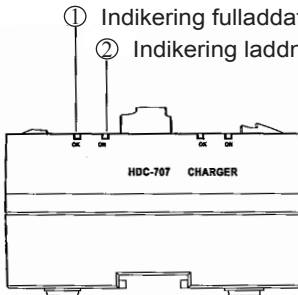

① Indikering fulladdat batteri (grön)


② Indikering laddning pågår (fast gult sken)

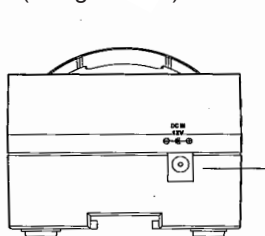

OKAYO Personligt konferenssystem

HDC-712/736 (laddstation för 12/36 ficksändare/-mottagare)

Placering av EJ7R i laddstation

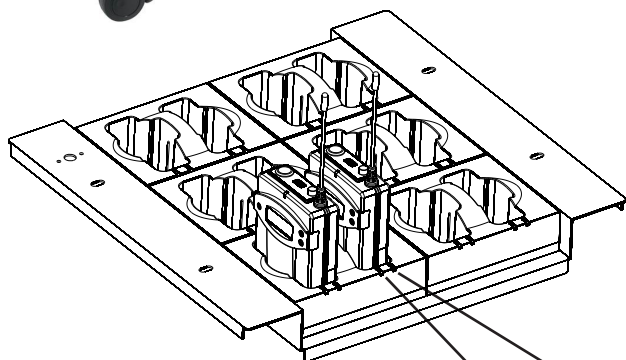

1. Indikering fulladdat batteri (grön)

2. Indikering laddning pågår (fast gult sken)

OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier. Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.



OBS! Vik ner antennerna och fäst i bältesklipset enligt bild innan du stänger locket.

Användning laddstationer

Anslut den medföljande transformatorn till laddstationen och därefter till eluttaget. (För HDC-712/736 måste även strömbrytaren slås på.) Indikeringslamporna för fulladdat batteri (grön) och laddning pågår (gul) tänds hastigt i nämnd ordning.

OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier (max 1600mAh).

Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.)

Laddstationen gör en "självttest" och därefter tänds indikeringslampan för laddning pågår (gul) en kort stund, vilket bekräftar att laddstationen är klar för användning.

Stäng av ficksändarna/-mottagarna och placera dem i laddfacken så att indikeringslampan för laddning pågår (gul) lyser med ett fast sken. När enheterna är fulladdade tänds indikeringslampan för fulladdade batterier (grön).

OBS!

Använd endast laddningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh) om du använder laddstation. Alkaliska batterier förstör produkterna.

Vik ner antennerna och fäst dem i bältesclipset, se bild på föregående sida (HDC-712/736), innan du stänger locket.

Underhåll, skötsel och garanti

1. Håll systemet borta från regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme för att undvika skador på systemet.
2. Hantera systemet med varsamhet för att förlänga livstiden. Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.
3. Utsätt inte systemet för höga temperaturer.
4. Använd inte systemet med annan transformator än den som levereras med systemet.
5. Mikrofonen bör ej användas i närheten av störande källor såsom kommunikationsutrustning eller påslagna datorer, videobandspelare, DVD-spelare m.m.
6. Ta ur batterierna om mikrofonen/ficksändaren inte används under en längre tid för att förhindra batteriläckage som kan skada utrustningen.
7. Använd endast de laddningsbara batterier som leverantören rekommenderar (NiMH, max 1600 mAh).

Felsökning

Det går ej att sätta på sändaren/mottagaren

Kontrollera att laddade batterier finns i sändaren/mottagaren och att batterierna är korrekt insatta.

Jag hör inget i hörsnäckan/hörlurarna/halsslingen

1. Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal
2. Kontrollera att volymkontrollen är korrekt inställd
3. Verifiera att mottagare och sändare ej befinner sig för långt från varandra

Jag får störningar i mottagaren

1. Byt kanal om det finns andra sändare till i närheten till dess att du hittar en störningsfri kanal
2. Störningar kan också orsakas av annan trådlös utrustning i närheten.

ERROR visas i display

1. Håll nere knapparna SET och UP och DOWN samtidigt som du sätter på mottagaren/sändaren.
2. Om återställningen lyckats syns "ON" i displayen (OBS! Kanal visas ej).
3. Stäng av enheten och sätt på den igen.

Laddstationen indikerar inte att sändaren/mottagaren tar emot laddning

Ta ur sändaren ur laddstationen. Starta den och stäng av den igen och försök på nytt. Sändaren skall alltid vara avstängd när den står i laddstationen.

Laddstationens lampor tänds inte/blinkar

Starta sändaren/mottagaren och stäng av den igen och försök på nytt. Sändaren skall alltid vara avstängd när den står i laddstationen.

1. Kontrollera att det är laddningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh) som sitter i sändarna/mottagarna.
2. Kontrollera att batterierna är korrekt insatta i sändare/mottagare
3. Kontrollera att laddstiften i laddstationen eller sändarens/mottagarens kontaktbleck ej är dammiga eller smutsiga. Rengör med en bomullspinne med rengöringssprit vid behov.
4. Kontrollera att sändarna/mottagarna är korrekt isatta i laddfacket

Om systemet trots ovanstående felsökning inte fungerar bör du lämna det till försäljningsstället eller sända det till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. Märk godset med ditt namn, adress och telefonnummer samt bifoga kvitto eller faktura och felbeskrivning.

Teknisk information

Kompletterande upplysningar med tillbehörsförteckning och systemkomponenter med specifikationer för sändare, mottagare och laddstationer finns angivet i respektive datablad samt CE-certifikat som kan laddas ner från www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se

Miljö

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

Hearing excellence since 1965

