



# PowerTel 700/702


**Bruks-  
anvisning**



**En överblick**

**En överblick**


## PowerTel 700 trådlös handenhet och bas

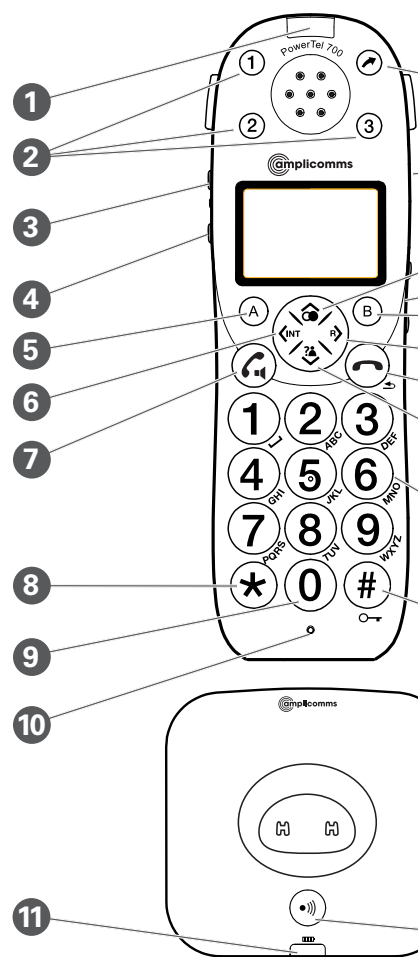

- 1 Signallampa för inkommande samtal
- 2 Snabbvalsminne 1, 2, 3
- 3 Förstärkarknapp med kontrollampa
- 4 Profilställning
- 5 Vänster tangent (i viloläge "meny")
- 6 Interna samtal
- 7 Externa samtal/högtalarfunktion
- 8 \* / Ringsignal PÅ/AV
- 9 Paus (håll ned 0)
- 10 Mikrofon
- 11 Inkommande samtal/Laddare/Använd linje
- 12 Knapp för vidarekoppling
- 13 Headset uttag (medföljer ej)
- 14 Upp/Återuppringning
- 15 Volyminställning (+ / -)
- 16 Telefonbook/Spara/OK
- 17 R-knapp
- 18 Avsluta samtal
- 19 Ned/Samtalslista/Utjämnare
- 20 Knappsats
- 21 # / Knapplås
- 22 Hitta telefonluren/registrering

## PowerTel 702 trådlös handenhet och laddstation

I leveransomfånget för PowerTel 702 ingår dessutom en andra trådlös handenhet och en laddstation.

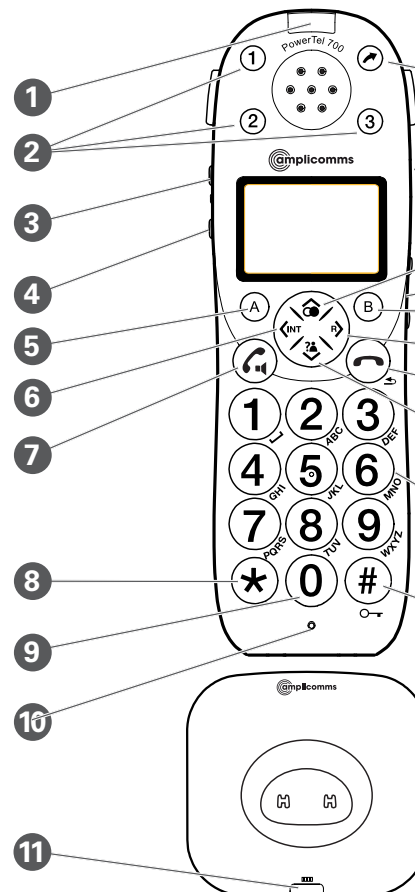

- 1 Signallampa för inkommande samtal
- 2 Snabbvalsminne 1, 2, 3
- 3 Förstärkarknapp med kontrollampa
- 4 Profilställning
- 5 Vänster tangent (i viloläge "meny")
- 6 Interna samtal
- 7 Externa samtal/högtalarfunktion
- 8 \* / Ringsignal PÅ/AV
- 9 Paus (håll ned 0)
- 10 Mikrofon
- 11 Laddare/
- 12 Knapp för vidarekoppling
- 13 Headset uttag (medföljer ej)
- 14 Upp/Återuppringning
- 15 Volyminställning (+ / -)
- 16 Telefonbook/Spara/OK
- 17 R-knapp
- 18 Avsluta samtal
- 19 Ned/Samtalslista/Utjämnare
- 20 Knappsats
- 21 # / Knapplås



<b>Komma igång</b> .....	<b>8</b>
Kontrollera förpackningens innehåll .....	8
<b>Komma igång med din telefon med fyra enkla steg</b> .....	<b>9</b>
Koppla in basstationen .....	9
Sätta i batterier .....	10
Ladda handenheten .....	10
Anslut telefonsladden .....	10
Endast för PowerTel 702 .....	11
Fästa bältklämman (valfritt) .....	12
<b>Förklaring av skärmsymboler</b> .....	<b>13</b>
<b>Telefonmeny guide</b> .....	<b>15</b>
Hur man använder menyskärmen .....	15
Grundläggande guide .....	15
<b>Ringa och ta emot samtal</b> .....	<b>18</b>
Ringa ett samtal .....	18
Avsluta ett samtal .....	18
Ta emot ett samtal .....	18
Återuppringa ett nummer .....	18
Ringa tillbaka en tidigare uppringare .....	19
Ringa ett nummer från telefonboken .....	19
Ringa ett nummer med snabbvalsknappar .....	20
Justera volymen i handenheten .....	20

Oka volymen i handenheten	20
Högtalarfunktion	20
Använda högtalarfunktionen	21
Se samtalstid	21
Använda hörlurar (medföljer ej)	21
Tyst läge	21
Slå ringsignalen på handenheten 'På/av'	22
Att låsa och låsa upp knappsatsen	22
Ringa ett internt samtal	22
Överföra ett externt samtal internt	23
Ringa ett konferenssamtal	23
Registrera en handenhet	24
Avregistrera en handenhet	25
Hitta en handenhet	25
Strömavbrott - Vad man kan göra	26
<b>Använda menyn</b>	<b>28</b>
Prioritets-/Grundinställning	28
Användarprofiler	28
Ändra namn på en profil	28
Ändra en profils Lurvolym	29
Ändra profilens boostinställning	29
Ändra en profils toninställning	30

Kopiera en profil .....	30
Att välja profil .....	31
Andra ringmelodi i handenheten .....	31
Ändra ringvolymen i handenheten .....	32
Ändra inställningen för tonkontroll .....	32
Boostminne .....	33
Ändra namnet på handenheten .....	34
Knappsatsljud 'På/av' .....	34
Ändra kontrast .....	34
Auto Talk 'På/Av' .....	35
Ändra belysningstimern .....	35
Bekräftelsesignal 'På/Av' .....	36
Välja basstation .....	36
Ändra språk .....	37
Ändra datum/tid .....	37
Ändra på 12 - eller 24 - timmars format .....	38
Ställa inalarm .....	38
<b>Inställningar på basstationen .....</b>	<b>40</b>
Ändra ringmelodi .....	40
Ändra basstationens ringvolym .....	40
Ändra Pin kod .....	41
Tider .....	42

Stoppur .....	.43
<b>Använda telefonboken .....</b>	<b>.44</b>
Hur man använder knappsatsen när du använder telefonboken .....	.44
Lägg in namn och nummer i telefonboken .....	.45
Redigera en post i telefonboken .....	.45
Radera en eller alla poster i telefonboken .....	.46
Kopiera telefonboken till en annan registrerad handenhets .....	.46
<b>Använda kortnummerknappar .....</b>	<b>.48</b>
Lagra ett kortnummer .....	.48
Redigera ett kortnummer .....	.48
Radera ett kortnummer .....	.49
<b>Använda samtalslistan .....</b>	<b>.50</b>
Lagra nummer från samtalslistan till telefonboken .....	.51
Spara poster från samtalslistan under en snabbvals knapp .....	.51
Radera enskild post i samtalslistan .....	.52
Radera alla poster i samtalslistan .....	.52
<b>Användning av telefonen i en abonnentväxel .....</b>	<b>.54</b>
Ställa in bryttid .....	.54
Lägga in en nummerslagningspaus .....	.54
Använda tilläggstjänster .....	.55
Ställa in nummerslagningsmetod .....	.55
Ändra nummerslagningsmetod .....	.55

Återställa standardinställningar .....56

Återställa standardinställningar .....56

**Hjälp och support .....58**

Felsökningsguide .....58

**Säkerhetsinformation .....62**

Avsedd användning .....62

Telefonens läge .....62

Strömförsörjning .....63

Medicinsk utrustning .....63

Uppladdningsbara batterier .....63

Kompatibilitet med hörapparat .....64

Miljöinformation/Avfallshantering .....64

Tekniska uppgifter .....65

Grundinställningar .....66

**Underhåll och garanti .....67**

Underhåll .....67

Garanti .....67

Försäkran om överensstämmelse .....68



**Komma igång**

## Komma igång

**Viktigt: Kontrollera att du har läst säkerhetsinformationen på sidan 62 innan du kopplar i telefonen.**

### Kontrollera förpackningens innehåll

Om du har inhandlat en PowerTel 700, bör du ha:

- 1 basstation
- 1 trådlös handenheter
- 1 lock till batterifack
- 1 bältesklämma
- 1 nätadapter
- 1 telefonsladd
- 3 batterier AAA 1,2V 750 mAh NiMH



Om du har inhandlat en PowerTel 702, bör du ha:


- 1 basstation
- 1 laddningsbas
- 2 trådlösa handenheter
- 2 lock till batterifack
- 2 bältesklämmor
- 2 nätadapterar
- 1 telefonsladd
- 6 batterier AAA 1,2V 750 mAh NiMH

**Viktigt: Använd endast den nätadapterar, telefonsladd och batterier, som medföljer Powertel 700 eller 702 annars kan inte telefonen fungera.**

# Komma igång med din telefon med fyra enkla steg

## 1 Koppla in basstationen


1. Sätt in nätadaptorn i vägguttaget och kontakten på kabelns ände i uttaget som är märkt med  på baksidan av basstationen.
2. Sätt i telefonanslutningskabelns ände med den lilla kontakten i uttaget som är märkt med  på basstationen, men sätt inte i den andra änden i telefonjacket än.

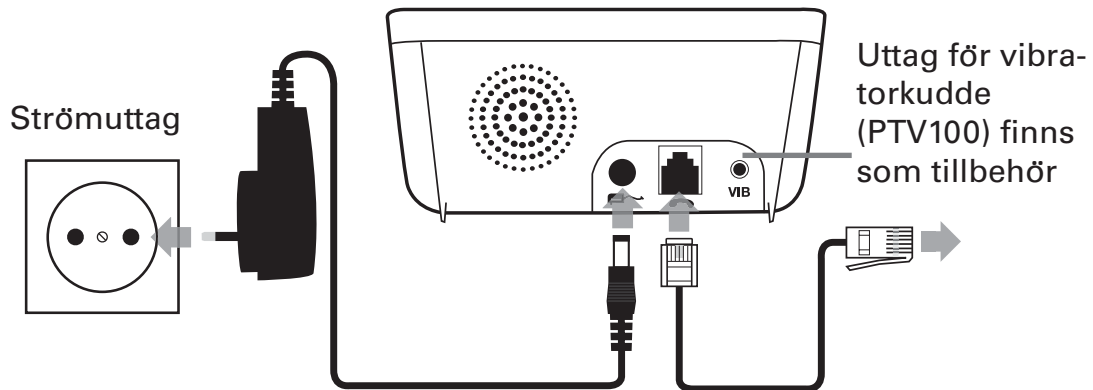

**Viktigt: Använd endast den nätadaptor, telefonsladd och de batterier, som medföljer Powertel 700 eller 702 om inte finns det risk att telefonen inte fungerar. Du får inte blockera åtkomsten till nätadaptorn med möbler eller andra föremål.**

## 2 Sätta i batterier

1. Sätt i batterierna i handenhetens batterifack. Se till att polerna är rätt placerade.
2. Sätt på batteriluckan.

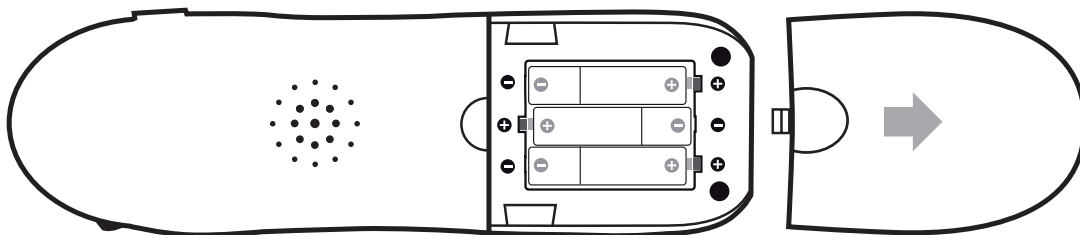

## 3 Ladda handenheten

För fullständig laddning, placera handenheten på basstationen för laddning i åtminstone 16 timmar.

**Viktigt: Använd endast de uppladdningsbara 800mAh NiMH-batterier som medföljer. När du behöver byta batterier se till att de är av samma typ som de som medföljer. Använd aldrig alkaliska batterier.**


## 4 Anslut telefonsladden

När batterierna är helt laddade, kan du sätta i den fria änden av telefonanslutningskabeln i telefonjacket.

# Endast för PowerTel 702

## 1 Anslut laddstationen

Sätt i nätadaptern, som redan är ansluten till laddstationen, i vägguttaget. Du får inte blockera åtkomsten till nätadaptern med möbler eller andra föremål.

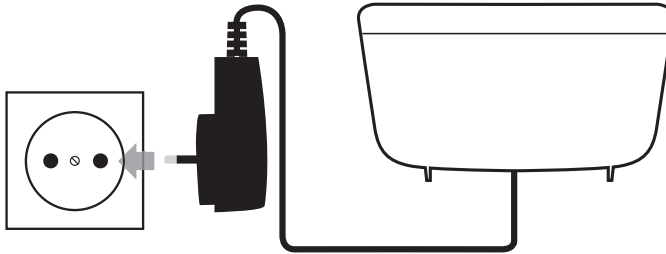

## 2 Sätta i batterier

Följ anvisningarna på sidan 10.

## 3 Ladda handenheten

Så att den laddas fullständigt, placera handenheten på laddstationen för att ladda i åtminstone 16 timmar.

## Fästa bältsklämman (valfritt)

Det medföljer en bältesklämma som man kan fästa på baksidan av handenheten. Vänd på telefonluren och stoppa i bältesklämman i de två hålen som finns på varje sida av telefonluren.

Nu är PowerTel 700 eller 702 klar för användning!

**Abonnentväxlar: Om du vill använda telefonen i en privat abonnentväxel (och exempelvis måste slå en nolla för att koppla upp till accessnätet) så gör du så som det beskrivs på sidan 54.**

# Förklaring av skärmsymboler

Symbolerna på telefonlurskärmen betyder:



Meny



Bekräfta/OK



Tillbaka



Telefonbok



Det finns mer information att läsa till vänster



Det finns mer information att läsa till höger



Batteriets laddningsstatus



Ringsignal av



Du har ställt in ett larm



Knappsatslåset är på



Högtalarfunktion



Pågående samtal



Boostvolymen är på (Symbolen blinkar)



Tyst telefonlurmikrofon



Du har nya samtal



Om symbolen är stilla: telefonen är inom basenhetens räckhåll  
Om den blinkar: telefonen är utom basenhetens räckhåll



Pågående interna samtal

## Telefonmeny guide



Använd denna sektion för att hitta runt i menyn på telefonen.




### Hur man använder menyskärmen



När telefonen är fulladdad och klar för användning, använd menyskärmen - exempelvis inställning av ringsignaler, lägga till profiler och spara nummer i telefonboken.




### Grundläggande guide

**Oppna menyn:** tryck .

**Bläddra i undermenyn:** öppna meny och tryck  eller .

**Välj post i undermenyn:** bläddra genom att använda  eller , tills du hittar posten du söker, tryck .

**Bläddra en funktion:** öppna din undermeny och tryck sedan på  eller .

**Välj en funktion:** bläddra genom att använda,  eller  tills du hittar funktionen du söker markeras och därefter tryck .

**Skriv in siffror eller bokstäver:** använd knappsatsen.

**Bekräfta och spara en post eller en åtgärd:** tryck .




**Avbryt och gå tillbaka till stand-by:** tryck .

**Obs: om du inte gör något, kommer din telefon automatiskt gå i standby-läge efter 30 sekunder.**

# **Ringa och ta emot samtal**

# Ringa och ta emot samtal


## Ringa ett samtal

1. Slå numret du vill ringa genom att använda knappsetsen på handenheten.
2. Om du gör ett misstag, tryck  för att radera.
3. Ring numret genom att trycka .
4. Avsluta samtalet genom att trycka .

## Avsluta ett samtal


Tryck .

## Ta emot ett samtal

Lyft handenheten från basstationen (när „direkt mottagning“ är aktiverad, se sidan 35) och svara direkt eller, om handenheten inte är på basstationen (eller „direkt mottagning“ är avaktiverad, se sidan 35), tryck på  och svara därefter.

## Återuppringa ett nummer





Handenheten sparar de sista 10 nummer som har ringt (max. 24 siffror i varje nummer).

1. Öppna återuppringningslistan genom att trycka .

2. Bläddra i listan genom att använda  eller  tills numret du önskar ringa är markerat, tryck , för att slå numret.








## Ringa tillbaka en tidigare uppringare

Telefonen sparar de sista 30 inkommande nummer

1. Öppna den inkommande nummerlistan genom att trycka .
2. Bläddra för att hitta numret du vill ringa tillbaka genom att använda  eller  tryck .


## Ringa ett nummer från telefonboken

Se sidan 45 för att lagra ett telefonnummer i telefonboken.

1. Öppna telefonboken genom att trycka .
2. Välj posten med  eller  och tryck på  eller knappa in den första bokstaven i posten med siffertangenterna (t.ex. "m" för "Müller"). Om det finns flera poster som börjar med "m", väljer du den rätta med  resp.  och trycker sedan på .

## Ringa ett nummer med snabbvalsknappar

För lagring av telefonnummer under snabbvalsknapparna, se sidan 48.


1. Välj snabbvalsnumret genom att trycka ① , ② eller ③ .
2. Tryck  numret rings upp.

## Justera volymen i handenheten

Ljudstyrkan i handenheten är högre än en vanlig telefon. Men du kan fortfarande öka eller minska volymen som passar dig.

Medan du för ett samtal kan du öka () eller minska () volymen med de två knapparna på sidan.





## Oka volymen i handenheten

För att öka volymen när du är i ett samtal, tryck på  knappen som är högst upp på vänster sida av telefonluren. En figur av ett öra kommer att blinka på skärmen för att visa att boost funktionen är på.

## Högtalarfunktion

Använd högtalarfunktionen för att tala till din uppringare utan att hålla i telefonluren eller för att låta andra i rummet lyssna på konversationen.

## Använda högtalarfunktionen


1. Sätt på högtalarläget genom att trycka på  knappen två gånger.
2. Avsluta högtalarläget genom att trycka på .
3. För reglering av volymen i högtalarläge trycker du på knapparna  och  på handenhetens högra sida.

**Notera: Du kan inte öka volymen när du använder högtalarfunktionen.**

## Se samtalstid


Du kan se samtalstiden på din skärm.


## Använda hörlurar (medföljer ej)

Sätt i dina hörlurar med mikrofon i uttaget som markeras  på höger sida av telefonluren. Detta uttag kan också användas med halsslinga NL100 (medföljer ej).

## Tyst läge

Under ett samtal kan du sätta mikrofonen på tyst läge, så den du talar med inte kan höra dig.

För att koppla från mikrofonen tryck . **Tyst läge** visas.



För att koppla på den igen, tryck  igen. Skärmen visar **Av**.

## Slå ringsignalen på handenheten 'På/av'

För att slå ringsignalen 'På/av' tryck  och håll ned i några sekunder.

## Att låsa och låsa upp knappsatsen



Du kan fortfarande svara på samtal som vanligt när knappsatsen är låst. För att låsa knappsatsen, tryck och håll ned  i 3 sek. Då visas den här symbolen


 . För att låsa upp knappsatsen trycker du på knappen  igen och håller den nedtryckt i tre sekunder.

**Obs: Följande funktioner: Göra ett internt samtal, Överför ett externt samtal internt och ringa ett konferenssamtal är bara tillgängliga för Powertel 702 användare eller om du har registrerat en extra handenhet (er) till telefonsystemet.**





## Ringa ett internt samtal


Om du har två eller flera telefonlurar registrerade till basstationen kan du ringa interna samtal mellan handenheter. Vid registrering har varje handenhet tilldelats ett handenhetsnummer, t ex HS1, och HS2 mm. Dessa samtal är kostnadsfria.

1. Tryck på knappen  **INT** . På displayen visas **Intern** - . Anget internt samtalsnummer på den handenhet du vill ringa, t ex 2 (för att ringa handenhet 2).
2. För att ta emot samtalet på den mottagande handenheten, tryck .



3. Avsluta samtalet med att trycka .




## Överföra ett externt samtal internt

1. Under ett samtal med en extern samtalspart trycker du på knappen  INT eller knappen . Slå därefter det interna numret till den handenhet som du önskar att överföra samtalet till t.ex. 2 (för att överföra samtalet till Handenhet 2).
2. För att ta emot samtalet på den mottagande handenheten, tryck .
3. Nu kan du meddela den interna samtalsparten att du vidarekopplar ett samtal till honom eller henne. Tryck på  för att vidarekoppla samtalet.

**Obs: om ingen svarar på samtalet du försöker överföra kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka .**

## Ringa ett konferenssamtal

1. Under ett samtal med en extern samtalspart trycker du på knappen  INT eller knappen . Slå därefter det interna numret till den handenhet som du önskar att överföra samtalet till t.ex. 2 (för att överföra samtalet till Handenhet 2).

2. För att ta emot samtalet på den mottagande handenheten, tryck .
3. När samtalet har tagits emot på den andra handenheten som du ringt, aktivera konferenssamtalet genom att trycka  knappen.
4. Telefonkonferensen kommer att avslutas när du trycker på .

## Registrera en handenhet


Du behöver endast registrera en handenhet om den har blivit avregistrerad från basstationen, eller om du har inhandlat en ny telefonlur separat. Du kan registrera högst fem handenheter på en basstation.

**Viktigt: se till att handenheten som du registrerar är fulladdad innan du försöker att registrera den.**

På handenheten:

1. Tryck och håll ned  i ca.10 sek. tills skärmen visar **Tryck och håll ned SÖK knappen.**






På basstationen:

2. Tryck och håll ned  i ca.10 sek., tills signallampan på basstationen blinkar.

## Avregistrera en handenhet


Du behöver endast registrera en handenhet om den har blivit avregistrerad från basstationen, eller om du har inhandlat en ny telefonlur separat.

**Viktigt: Du kan bara avregistrera andra handenheter, inte den handenhet som du använder för den här processen.**

1. Öppna din meny genom att trycka **(A)**. Bläddra med  eller  tills **Telefonlur** är markerad och tryck **(B)**.
2. Bläddra genom att använda  eller  tills **Registrera** är markerad, tryck **(B)**. Bläddra därefter  för att hitta markerad **Avregistrera** och tryck **(B)**.
3. Skriv in PIN koden (standard kod är 0000) och tryck **(B)**.
4. Slå in det interna numret till Handenheten (t.ex. 1) och tryck **(B)** för att bekräfta.

## Hitta en handenhet

Du kan hitta en saknad handenhet eller uppmärksamma en handenhetsanvändare genom att få handenheten att pipa från basstationen.

1. Tryck  på basstationen. Handenheten kommer då att ge ifrån sig en tonsignal.
2. Tryck på en valfri knapp på handenheten, för att tonsignalen ska sluta.

## **Strömavbrott - Vad man kan göra**

Vid strömavbrott går det inte att använda telefonen. Se till att ha en trådbunden telefon, som fungerar utan extern strömförsörjning, tillgänglig för nödfall.

**Använda menyn**

# Använda menyn

För information om din telefonbok, gå till sidan 44.

## Prioritets-/Grundinställning








Om du är den främsta användaren av denna telefon bör du ändra inställningarna i menyn så att de är precis rätt för dig. Dessa inställningar kommer att memoreras automatiskt när du vill ringa eller besvara ett samtal.



Användarprofils funktionen kan användas av andra i hushållet vars inställningar för volym, boost och tonjustering kommer också att sparas och tillämpas som anges nedan.

## Användarprofiler

Du kan lagra 2 olika användarprofiler, varje med olika inställningar för volym, boost, och tonjustering. Du kan också namnge de olika Profilerna (max 10 bokstäver).









## Ändra namn på en profil

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck .







3. Bläddra med  eller  tills **Namn** är markerad och tryck (B).
4. Radera nuvarande namn genom att trycka (A).
5. Skriv in ett nytt namn (max 11 bokstäver) och tryck (B).

## Ändra en profils Lurvolym

Du har ett val av fem ljudnivåer.














1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck (B).
3. Bläddra med  eller  tills **Volym** är markerad och tryck (B).
4. Du ser den nuvarande volymen (t.ex. 4.).
5. Ändra volym med  eller  och tryck (B).

## Ändra profilens boostinställning

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck (B).
3. Bläddra med  eller  tills **Boost** är markerad och tryck (B).

4. Du kan se den nuvarande boostinställningen (dvs 'På/av').
5. Ändra inställning med  eller  och tryck .








## Ändra en profils toninställning



1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck .
3. Bläddra med  eller  tills **Toninställning** är markerad och tryck .
4. Du kan se den nuvarande inställningen.
5. Ändra inställning med  eller  och tryck .

**Obs! Tryck  för att återgå till viloläge**

## Kopiera en profil

Du kan lätt kopiera en profil till en annan registrerad och kompatibel PowerTel handenheter.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck .

3. Bläddra med  eller  tills **Kopiera** är markerad och tryck **(B)**.
4. Bläddra med **<INT** eller **R>** tills du markerar handenheten (t.ex 2,3 eller 4) du vill kopiera profilen till och tryck **(B)**.
5. På handenheten du kopierar profilen till; för att bekräfta, tryck **(B)** eller för att avbryta, tryck **(A)**.

## Att välja profil

Du måste använda en handenhet för att välja en profil när du samtalar - du kan inte använda en profil när du väljer högtalarfunktionen.












För att svara på ett inkommande samtal, väljer du den önskade profilen innan du svarar, genom att flera gånger trycka på knappen "Profilinställning" på handenhetens sida. Skärmen visar ditt val.

När du ska ringa ett samtal, väljer du den önskade profilen innan du slår numret, genom att flera gånger trycka på knappen "Profilinställning" på handenhetens sida. Skärmen visar ditt val.

**Obs: När du har valt en profil, har du cirka 30 sekunder för att ringa samtalet under denna profil innan systemet kommer att återgå till standardinställningarna.**











## Andra ringmelodi i handenheten

Du har ett val av tio ringmelodier.







1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. **Ringmelodi** är markerad, tryck .
3. Bläddra med  eller  tills **Extern** eller **Intern** är markerad och tryck .
4. Du ser melodiinställningen (t.ex. **7 [Extern]**, **9 [Intern]**).
5. Ändra melodin genom att använda  eller  och tryck .

## Ändra ringvolymen i handenheten

Du har ett val av fem ljudnivåer och AV.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Ringvolym** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

## Ändra inställningen för tonkontroll


1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Tonkontroll** är markerad och tryck .


3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .








**Obs:** för att justera tonen när du ringer ett samtal, tryck på  knappen för att få tillgång till utjämningsinställning. Tryck sedan på  eller  för att justera inställningen som visas på ett stapeldiagram på handenhetens skärm. Tryck på volym knappen på sidan av telefonen för att avsluta det här läget.

## Boostminne

När den här funktionen står på "På" är förstärkarfunktionen alltid aktiverad. Lampan på handenhetens vänstra sida lyser vid en förbindelse, och i displayen står det "LJUD PÅ".










Med knappen  kan du avaktivera förstärkarfunktionen för det aktuella samtalet. Vid nästa samtal kommer den att vara aktiverad igen.

När förstärkarfunktionen är avaktiverad, kan du aktivera den med knappen . Vid nästa samtal kommer den att vara avaktiverad igen.











1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Ljud på** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.

4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

## Ändra namnet på handenheten











1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Handenhetens namn** är markerad och tryck .
3. Radera nuvarande namn med att tryck .
4. Skriv in ett nytt namn (max 11 bokstäver) och tryck .

## Knappsatsljud 'På/av'


1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Knappsatsljud** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .











## Ändra kontrast

Du har ett val av fem olika nivåer på skärmskontrast, du kan ställa in skärmen till det som är lättast att läsa.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Kontrast** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .





## Auto Talk 'På/Av'







När AUTOTALK är påslagen på handenheten behövs ingen knapptryckning för att svara när telefonen tas från basstationen. Detta är standardinställningen. Om du ändrar till AV måste du trycka  för att svara på inkommande samtal.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Auto Talk** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

## Ändra belysningstimern











Du har ett val av 10, 20, 30, eller 40 sek, innan bakgrundsbelysningen släcks ner.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .

2. Bläddra med  eller  tills **Belysningstid** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .








## Bekräftelsesignal 'På/Av'

Detta är den signal du hör när du ändrar en inställning. Du kan växla mellan på eller av.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Bekräftelsesignal** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

## Välja basstation

Du kan använda denna funktion om din handenhet är registrerad till mer än en basstation.







1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Välj basstation** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen. (z. B. **Autom.** oder **Manuell**). När det

manuella läget är aktiverat, kan du välja en av de upp till fyra basstationerna som du vill använda för din handenheter.





4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).

## Ändra språk







Du har ett val av sex språk som kan användas på din handenheter: Engelska, Tysk, Franska, Spanska, Italienska och Svenska.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenheter**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Språkinställning** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).

## Ändra datum/tid

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Tid**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Datum/Tid** är markerad och tryck (B).
3. Skriv in år, månad, dag, timmar och minuter (din telefonlur har en 24-timmarsklocka) och tryck på (B).

## Ändra på 12 - eller 24 - timmars format

1. Öppna menyn genom att trycka **(A)**, bläddra med  eller  tills du markerar **Tid**, tryck **(B)**.
2. Bläddra med  eller  tills **Välj tidsformat** är markerad och tryck **(B)**.
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck **(B)**.

## Ställa inalarm









1. Öppna menyn genom att trycka **(A)**, bläddra med  eller  tills du markerar **Tid**, tryck **(B)**.
2. Bläddra med  eller  tills **Ställa in alarm** (alarmet använder 24-timmars tid) är markerad och tryck **(B)**.
3. Välj: **en gång, varje dag, måndag till fredag** eller **Av** och tryck **(B)**.
4. Ställ in tiden och tryck på **(B)**.
5. Välj din alarmmelodi och tryck **(B)**.

För att kvittera ett larm trycker du på **(A)** . Med **(B)** aktiveras tupplursfunktionen. Denna upprepar larmet upp till fem gånger var femte minut. Sedan stängs det av.

## Inställningar på basstationen











### Ändra ringmelodi

Du har ett val av 9 ringmelodier.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck .
2. **Ringmelodi** markeras, tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

### Ändra basstationens ringvolym

Du har ett val av fem ljudnivåer plus Av.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Ringvolym** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

För information om uppringsläge, gå till sidan 55.








För information om återuppringning, vänligen gå till sidan 54.

## Ändra Pin kod

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **PIN kod** är markerad och tryck (B).
3. Skriv in den gamla PIN koden (grundinställning är 0000) och tryck (B).
4. Du uppmanas att ange ditt nya 4-siffriga PIN-koden två gånger, tryck sedan (B).

## Tider





Du kan mata in upp till fem tider, som din telefon påminner dig om.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Verktyg**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Tid** är markerad och tryck (B).
3. Bläddra med  eller  tills **1, 2, 3, 4** eller **5** är markerad och tryck (B).
4. Bläddra med  eller  tills **Redigera** är markerad och tryck (B).
5. Ta bort tecken med (A). Mata in ett namn för tiden via knappsatsen och tryck på (B).
6. Mata in datumet via knappsatsen och tryck på (B).
7. Mata in klockslaget via knappsatsen och tryck på (B).
8. Välj en melodi med  eller  och tryck på (B).

**För att ändra eller ta bort en tid väljer du den i menyn enligt beskrivningen ovan, och gör dina ändringar (undermeny: Redigera) eller tar bort den (undermeny: Ta bort).**

## Stoppur

Stoppuret visar minuter och sekunder.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Verktyg**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Stoppur** är markerad och tryck (B).
3. Tryck på (B) för att starta stoppuret.
4. Tryck på (A) för att stoppa stoppuret.

**Har du stannat stoppuret, så trycker du på [Start] för att sätta igång det igen, eller på [Återställ] för att återställa det till noll.**

## Använda telefonboken

Du kan lagra, i alfabetisk ordning, 200 namn och deras telefonnummer i telefonboken. För att snabbt hitta en telefonbokspost, skriv in första bokstaven i namnet som du har lagrat.

**Obs: varje telefonbokspost tillåter upp till 16 bokstäver för namn och upp till 24 siffror för varje telefonnummer.**

**Viktigt: Kom ihåg att även ange riktnummer för varje telefonnummer du anger i telefonboken.**

## Hur man använder knappsatsen när du använder telefonboken



Du ser att tangenterna på tangentbordet har både bokstäver och siffror. Om du trycker på en vald knapp ett antal gånger kommer den att visa dig alla siffror och bokstäver den representerar.

Här är några tangenter som kan vara användbara när du anger telefonnummer i telefonboken:


- Tryck **1** för mellanrum
- Med **1** eller **0** matar du in skilje- eller specialtecken.
- Tryck **A** för att radera en siffra eller bokstav
- Tryck **\*** för att ändra från versaler till gemener



**Obs! För att skriva in samma bokstav två gånger, tryck in bokstaven, vänta sedan tills markören flyttas till efter den bokstav du har skrivit innan du trycker in den igen.**

## Lägg in namn och nummer i telefonboken


1. Öppna telefonboken med att trycka (B).
2. Tryck (B). Skärmen visar **Ny kontakt**, tryck (B) igen.
3. Skriv in namnet du vill lagra och tryck (B).
4. Skriv in telefonnumret som du vill lagra och tryck (B).
5. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal för detta namn och nummer och tryck (B).

## Redigera en post i telefonboken

1. Öppna telefonboken med att trycka (B).
2. Bläddra med  eller  tills du hittar posten du vill redigera och tryck (B).
3. I displayen visas **Redigera poster**. Tryck en gång till på (B).
4. Tryck (A) för att ta bort bokstäver, använd knappsatsen för att skriva in nya, därefter tryck (B).

5. Tryck **(A)** för att radera siffror, använd knappsetsen för att skriva in nya, tryck därefter **(B)**.
6. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck **(B)**.

## Radera en eller alla poster i telefonboken

1. Öppna telefonboken med att trycka **(B)**.
2. Bläddra genom att använda  eller  tills du hittar posten du vill radera och tryck **(B)**. Om du vill ta bort alla poster, så markerar du en valfri post.
3. Tryck på  skärmen visar då **Radera posten** eller **Radera alla poster** och tryck **(B)**.
4. Tryck **(B)** för att bekräfta eller **(A)** för att avbryta.











## Kopiera telefonboken till en annan registrerad handenhhet

**Obs: Du kan bara kopiera telefonboken till en annan handenhhet om denna handenhhet är registrerad i telefonsystemet. Se sidan 24.**

Det är lätt att kopiera:

- En post (kopiera post)
- Poster som inte finns på handenheten du kopierar till (bifoga post)
- Alla poster (kopiera alla)



**Viktigt: När du kopierar alla poster till en trådlös telefon, kommer alla befintliga poster utgå. För att förhindra att detta händer kan du använda "Bifoga poster".**

1. Öppna telefonboken med att trycka .
2. Bläddra genom att använda  eller  tills du hittar posten du vill kopiera och tryck .
3. Bläddra  till **Kopiera post**, **Bifoga post** eller **Kopiera alla** och tryck .
4. Bläddra  **INT** eller **R**  för att markera handenheten du vill kopiera till (t.ex. 2 för Handenhet 2) och tryck  för att bekräfta.
5. Ta handenheten som du kopierat till och bekräfta med att trycka .

## Använda kortnummerknappar



Du kan lagra ett namn (max. 16 tecken) och ett telefonnummer (max. 24 siffror) under de två kortnummer knapparna ①, ② och ③.

### Lagra ett kortnummer


1. Välj den knapp du vill lagra ett nummer på med att antingen trycka ①, ② eller ③.
2. Tryck (B). Skärmen visar **Redigera poster**, tryck (B) igen.
3. Skriv in namnet du vill lagra genom att använda knappsatsen och tryck (B).
4. Skriv in det telefonnummer du vill spara och tryck (B).
5. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck (B). I displayen visas **Posten har sparats**.

### Redigera ett kortnummer

1. Välj det kortnummer du vill redigera genom att trycka ①, ② eller ③.
2. Tryck (B). Skärmen visar **Redigera poster**, tryck (B) igen.
3. Tryck (A) för att radera namnet och använd knappsatsen för att skriva in det nya, tryck därefter (B).


- Tryck **(A)** för att radera numret och använd knappsatsen för att skriva in det nya, tryck därefter **(B)**.
- Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck **(B)**. I displayen visas **Posten har sparats**.





## Radera ett kortnummer

- Välj det kortnummer du vill radera genom att trycka **(1)**, **(2)** eller **(3)**.
- Tryck **(B)**. Bläddra  till **Radera post** och tryck **(B)**.
- Skärm visar **Radera post ?** Tryck **(B)** för att bekräfta eller **(A)** för att avbryta.

## Använda samtalslistan






**Obs: du måste abonnera på Nummerpresentation från din teleoperatör för denna funktion ska fungera. Ytterligare information får du av din nätoperatör.**

Inkommande telefonnummer kan visas i samtalslistan. Om du har uppringarens nummer lagrat i telefonboken kommer namnet att visas istället. Totalt 30 inkommande samtal kan lagras i samtalslistan (16 bokstäver per namn och 23 siffror per nummer). Antalet nya mottagna samtal kommer att visas i skärmen med blinkande ikon . Om numret inte visas kan detta beror på att den som ringer undanhåller sitt nummer eller det inte överförs av andra skäl.

Du kan öppna din samtalslista med att trycka på . Bläddra i listan genom att använda  eller . För att se mer information inklusive datum och tid, tryck **R** .





## Lagra nummer från samtalslistan till telefonboken

Det är lätt att lagra inkommande nummer till telefonboken.





1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten.
2. Bläddra med  eller  för att hitta den post du vill spara och tryck (B).
3. Skärmen visar **Spara till tfnbk**. Tryck (B).
4. Använd knappsatsen, ange ett namn för det lagrade numret och tryck (B).
5. Redigera numret för denna post, om det behövs och tryck (B).
6. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck (B). I displayen visas **Posten har sparats**.

## Spara poster från samtalslistan under en snabbvals knapp



Telefonnummer som har sparats i samtalslistan kan sparas direkt under en snabbvals knapp.

1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten.
2. Bläddra med  eller  för att hitta den post du vill spara och tryck (B).
3. Bläddra  tills du markerar **Spara M1 / M2 / M3** och tryck (B).
4. Fortsätt enligt beskrivningen i föregående avsnitt "Spara poster från samtalslistan till telefonboken".

## Radera enskild post i samtalslistan

1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten.
2. Bläddra med  eller  för att hitta den post du vill radera och tryck **(B)**.
3. Bläddra  tills du markerar **Radera** och tryck **(B)**.
4. Tryck **(B)** för att bekräfta eller **(A)** för att avbryta.

## Radera alla poster i samtalslistan











1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten och tryck **(B)**.
2. Bläddra  tills du markerar **Radera alla** och tryck **(B)**.
3. Skärmen visar **Radera alla samtal?** Tryck **(B)** för att bekräfta eller **(A)** för att avbryta.

# **Användning av telefonen i en abonnentväxel**

## Användning av telefonen i en abonnentväxel


Om din telefon är ansluten till en abonnentväxel (och du exempelvis måste slå en nolla för att koppla upp till accessnätet), så står R-knappen till ditt förfogande för vidarekoppling av samtal och automatisk tillbakaringning. Se efter i handboken för din abonnentväxel för att ta reda på vilken bryttid som måste ställas in för att dessa funktioner ska kunna användas i abonnentväxeln. Det finns två bryttider att välja mellan: 100 ms (kort) och 300 ms (lång).

### Ställa in bryttid

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills du hittar **Bryt** och tryck .
3. Du ser nuvarande inställning (t.ex. kort)
4. Välj den önskade bryttiden (kort eller lång) med  eller  och tryck .

### Lägga in en nummerslagningspaus

Om du måste slå en särskild siffra för att koppla upp till accessnätet och det tar en liten stund innan du hör en ledig linjesignal, kan du lägga in en paus och sedan slå numret utan att vänta på den lediga linjesignalen.

För att lägga in en nummerslagningspaus slår du det vanliga numret för att koppla upp till accessnätet, och håller sedan  nedtryckt i två sekunder. Ett **P** i displayen indikerar att nummerslagningspausen är aktiverad.

**Obs: En nummerslagningspaus kan också läggas in i ett telefonnummer i telefonboken.**







## Använda tilläggstjänster

Din telefon stödjer också tilläggstjänster som exempelvis Vänta och Konferenssamtal. Omfattande information om hur och om du kan nyttja dessa tjänster, får du av operatören av ditt telekommunikationsnät.

## Ställa in nummerslagningsmetod

Två nummerslagningsmetoder står till förfogande: tonval och pulsval. Standardinställning är TONVAL, som normalt används i Europa.

### Ändra nummerslagningsmetod

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills du hittar **Nummerslagningsmetod** och tryck (B).
3. Du ser nuvarande inställning (t.ex. ton).
4. Välj den önskade nummerslagningsmetoden (tonval eller pulsval) med  eller  och tryck (B).

## Återställa standardinställningar

När standardvärdena återställs, raderas posterna i telefonboken, samtalslistan och återuppringningslistan.

### Återställa standardinställningar

1. Håll **R** > nedtryckt i tio sekunder.
2. Tryck på **B** för att bekräfta återställningen av standardinställningarna, eller på **A** för att avbryta processen.

# Hjälp och support

## Hjälp och support

**Vissa frågor kan helt enkelt lösas genom att koppla bort strömmen till enheten. I så fall bör du dra ut nätadaptern ur basstationen och ta ut batterierna ur handenhetsen, och vänta i ungefär 20 minuter. Koppla sedan på allt för att avgöra om detta har löst problemet.**

### Felsökningsguide

#### Jag kan inte ringa samtal

1. Kontrollera att telefonsladden är korrekt ansluten. Om den är det kan det finnas ett fel. Se till att du använder telefonsladden som följde med telefonen.
2. Kontrollera att enheten är ansluten och fungerar.
3. Se till att du inte är för långt från basen (under idealiska förhållanden, bör den fungera upp till 300 meter utomhus och upp till 50 meter inomhus).
4. Testa telefonlinjen och uttag genom att använda en annan telefon.

### **Jag förlorar anslutningen**

1. Se till att du inte är för långt från basen (under idealiska förhållanden, bör den fungera upp till 300 meter utomhus och upp till 50 meter inomhus).
2. Basstationen står inte i på ett bra ställe - överväg att flytta den.

### **Min handenhet stängs av**

1. Den kan behöva en uppladdning. Fulladda handenheten genom att sätta handenheten på basstationen i åtminstone 15 timmar.
2. Byt ut de uppladdningsbara batterierna. Utbytesbatterierna bör vara av samma typ som de som medföljde.

### **Telefonen responderar inte**

Du kan behöva återställa telefonen till grundinställningarna (sida 56).

### **Nummerpresentatören fungerar inte**

1. Kontrollera att du har den här tjänsten med din operatör. Vänligen ring din nätoperatör.
2. Den som ringer kan ha hemligt telefonnummer.

### **Min handenhet eller basstation ringer inte**

Kontrollera att ringsignalen är på. Se sidor 22, 32 och 40.

### **Jag hör ett surrande ljud på min radio, TV eller dator**

Vi föreslår att du använder din sladdlösa telefon åtminstone en meter i från elektrisk utrustning och mobiltelefoner.

### **Det är störningar i hörluren och / eller internet anslutning är mycket långsam när du använder telefonen**

Du måste ansluta telefonen till vägguttaget via ett ADSL-filter om du har bredbandsinternet på din telefonlinje.

# Allmän information

# Säkerhetsinformation

Kontrollera att du läser denna bruksanvisning noga.

## Avsedd användning

Den här analoga telefonen är avsedd för anslutning till ett allmänt tillgängligt telenät eller en godkänd privat telefonanläggning. All annan användning anses oavsiktlig användning. Otillåten ändring eller ombyggnad är inte tillåten. Öppna inte enheten och försök på någon reparation själv.

## Telefonens läge

Se till att telefonen:

- Står på en torr, plan yta
- Ström/telefonkablar inte utgör snavfaror
- Inte hindras av möbler
- Står minst en meter från andra elektriska apparater
- Inte utsätts för rök, damm, vibrationer, kemikalier, fukt, värme och direkt solljus

## Strömförsörjning

**Viktigt: Använd aldrig någon annan nätadapter än den som medföljer Power-Tel 700 resp. 702.**

Strömavbrott kan påverka din telefon och utrustning. Denna telefon kan inte användas i händelsen av ett strömavbrott. Alternativa arrangemang bör göras för tillgång till larmtjänster.

### Energisparande nätadapter

Nätadaptern som ingår i leveransomfånget uppfyller kraven på ekodesign Europeiska unionen (direktiv 2005/32/EG).

Därmed dess ström konsumtion är betydligt lägre, både i drift och i icke-drifts läge, jämfört med nätadapterar av tidigare design.



- Energiesparend
- Economisant
- l'énergie
- A risparmio di
- energia
- Energy efficient

## Medicinsk utrustning

Använd inte telefonen:

- nära intensivvårds utrustning eller intensivvård medicinsk utrustning
- i åska

Det rekommenderas att, om du har en pacemaker kontrollera med en medicinsk sakkunnig eller din vård- konsulent innan du använder denna produkt

## Uppladdningsbara batterier

Kasta inte batterierna i eld eller vatten.

## Kompatibilitet med hörapparat

Telefonen fungerar med de flesta populära hörapparater. Med tanke på det breda sortimentet av hörapparater som finns tillgängligt, kan vi inte garantera att din telefon kommer att fungera fullt ut med varje hörapparat.

**Viktigt: Telefonen kan producera mycket höga ljud när Boost funktionen slås på. Var försiktig om handenheten används av andra.**

## Miljöinformation/Avfallshantering

Lämna din apparat till en kommunal insamlingsplats för avfall (t.ex. en återvinningsstation), när du vill kassera den. Enligt lagen om elektriska och elektroniska produkter är ägare av uttjänta apparater lagligen skyldiga att lämna uttjänta **elektriska och elektroniska apparater** till en återvinningscentral för sorterat avfall. Symbolen som visas bredvid betyder att du under inga omständigheter får kasta apparaten bland hushållssoporna!



## Batterier utgör risker för hälsa och miljö!

Batterier får inte öppnas, skadas, förtäras eller släppas ut i miljön. De kan innehålla giftiga och miljöfarliga tungmetaller. Du är enligt lag skyldig att avfallshandera uttjänta batterier på ett säkert sätt, genom att lämna dem till butiker som säljer batterier eller till lämpliga insamlingsställen där det finns batteriholkar. Avfallshanderingen är avgiftsfri. Symbolerna som visas bredvid betyder att du under inga





omständigheter får kasta batterier bland hushållssoporna, utan måste lämna dem till insamlingsställen för avfall.

**Förpackningsmaterial** avfallshanteras enligt lokala bestämmelser.

## Tekniska uppgifter

Standard	DECT <sup>1</sup> GAP <sup>2</sup>
Energiförsörjning (basstation)	Primärt: 100-240V 50/60Hz Sekundärt: 6 VDC 800 mA
Räckvidd	Utomhus: Upp till 300 m Inomhus: Upp till 50 m
Standby	Upp till 100 Std.
Maximal Samtalstid	Upp till 10 Std.
Maximal lurvolym	+40dB (distorsion < 1,5 %)
Batterier	AAA 1,2 V 750 mAh NiMH
Uppringningsläge	Ton (DTMF), Vibration
Rekommenderad omgivningstemperatur	0 °C till 45 °C
Rekommenderad luftfuktighet	20 % till 80 %
Recall	100, 300 ms

<sup>1</sup> DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Utvidgad digital standard för sladdlösa telefoner.

<sup>2</sup> GAP: Generic Access Profile = Överföringsprotokoll för sladdlösa telefoner

## Grundinställningar

Att återställa till grundinställningarna, sidan 56.

Språk	Engelska
Namn	PowerTel
Handenhet ringsignal (externa)	7
Handenhet ringsignal (interna)	9
Handenheten ringvolym	5
Basstationen ringsignal	5
Basstationen ringvolym	3
Knappsats tonsignal	På
Auto talk	På
Kontrast	3
Panelljustid	10s
Boost funktion	Av
Återkalla tid	100ms
Uppringningsläge	Ton
PIN kod	0000

# Underhåll och garanti

## Underhåll

- Rengör utrustningens ytor med en mjuk, luddfri trasa.
- Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel.

## Garanti

Denna apparat har två års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller liknande, alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat missförhållande på användarens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens anslutning under åskväder.

När det gäller klagomål, förbehåller vi oss rätten att reparera eller ersätta defekt delar eller utbyta enheten. Reservdelar eller enheter blir vår egendom. Rätt till ersättning i händelse av skada är uteslutet om det inte finns någon bevis eller uppsåt eller grov oaktsamhet av tillverkaren.

Om din utrustning visar tecken på fel under garanti, vänligen tillbaka till försäljningsstället där du köpte AMPLICOMMS utrustning tillsammans med inköpsk-

vitto. Alla rättigheter till fordringar enligt villkoren i garantin i enlighet med detta avtal måste hävdas enbart med När det gäller din försäljningsställe. Två år efter köp av våra produkter, hävdar enligt villkoren i garantin kan inte längre göras gällande.

## Försäkran om överensstämmelse

Denna enhet uppfyller de krav som ställs i EU-direktivet:

1999 / 5 EU-direktivet om radioutrustning och terminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse.

Överensstämmelse med ovannämnda direktiv bekräftas av CE-märket på enheten.



Du hittar hela försäkran om överensstämmelse på [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com) .

# Index

<b>A</b>		
Abonnentväxel . . . . .	54	Boostinställning. . . . . 29
Alarm . . . . .	38	Boostminne . . . . . 33
Använda högtalarfunktionen . . . . .	21	Bryttid. . . . . 54
Användarprofiler . . . . .	28	<b>D</b>
Återställa . . . . .	56	Datum/tid . . . . . 37
Återuppringa ett nummer. . . . .	18	<b>F</b>
Att låsa och låsa upp knappsatsen. . . . .	22	Felsökningsguide . . . . . 58
AutoTalk. . . . .	35	Försäkran om överensstämmelse . . . . . 68
Avfallshantering . . . . .	64	<b>G</b>
Avregistrera en handenhet. . . . .	25	Garanti . . . . . 67
Avsedd användning . . . . .	62	Grundinställningar . . . . . 66
Avsluta ett samtal . . . . .	18	Grundläggande guide . . . . . 15
<b>B</b>		<b>H</b>
Bältklämman . . . . .	12	Hitta en handenhet . . . . . 25
Bekräftelsesignal . . . . .	36	Högtalarfunktion . . . . . 20
Belysningstimern . . . . .	35	Hörapparat. . . . . 64
		Hörlurar . . . . . 21

<b>I</b>		
Internt samtal . . . . .	22	
<b>J</b>		
Justera volymen . . . . .	20	
<b>K</b>		
Knappsatsljud . . . . .	34	
Komma igång . . . . .	8	
Konferenssamtal . . . . .	23	
Kontrast . . . . .	34	
Kontrollera förpackningens innehåll . . . . .	8	
Koppla in basstationen . . . . .	9	
Kortnummer . . . . .	48	
<b>L</b>		
Ladda handenheten . . . . .	10	
Lurvolym . . . . .	29	
<b>M</b>		
Medicinsk utrustning . . . . .	63	
		Miljöinformation . . . . . 64
		<b>N</b>
		Namnet på handenheten . . . . . 34
		Nummerslagningsmetod . . . . . 55
		Nummerslagningspaus . . . . . 54
		<b>O</b>
		Overföra ett externt samtal . . . . . 23
		<b>P</b>
		Pin kod . . . . . 41
		Pulsval . . . . . 55
		<b>R</b>
		Registrera en handenhet . . . . . 24
		Ringa ett samtal . . . . . 18
		Ringmelodi . . . . . 31, 40
		Ringsignalen . . . . . 22
		Ringvolymen . . . . . 32, 40

**S**

Säkerhetsinformation . . . . .	62
Samtalslistan . . . . .	50
Samtalstid . . . . .	21
Sätta i batterier . . . . .	10
Skärmsymboler . . . . .	13
Snabbval . . . . .	20
Språk . . . . .	37
Standardinställningar . . . . .	56
Stoppur . . . . .	43
Strömavbrott . . . . .	26
Strömförsörjning . . . . .	63

**T**

Ta emot ett samtal . . . . .	18
Tekniska uppgifter . . . . .	65
Telefonboken . . . . .	19, 51
Telefonens läge . . . . .	62

Telefonmeny . . . . .	15
Telefonsladden . . . . .	10
Tider . . . . .	42
Tidigare uppringare . . . . .	19
Timmars format . . . . .	38
Toninställning . . . . .	30
Tonkontroll . . . . .	32
Tonval . . . . .	55
Tyst läge . . . . .	21

**U**

Underhåll . . . . .	67
Uppladdningsbara batterier . . . . .	63

**V**

Välja basstation . . . . .	36
----------------------------	----





Utdelat by: Audioline GmbH, D-41460 Neuss  
September 2011 – utgåva 1.1

