



PowerTel M6500 Mobiltelefon

**Bruks-
anvisning**





Hörapparatskompatibel

(HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating)

Mobiltelefonen M6500 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

För att kunna nå optimal prestanda med hörapparaten måste denna installeras på rätt sätt.

Kortfattad bruksanvisning	6
En snabbtitt	6
Isättning av SIM-kort och batteri	8
Uppladdning av batteriet	10
Laddning via Mini-USB-laddningskontakten	10
Laddning via bordsladdaren	10
Batteriladdningsnivå	11
Sätta på-/av mobiltelefonen.....	11
Testa nätåtkomsten	12
Språkinställning	12
Inställning av datum och klockslag	13
Ta emot samtal	13
Avvisa samtal	13
Avsluta samtal	13
Ring upp	13
Utvidgade inställningar och funktioner	14
Frågor och svar	14
Telefonen i detalj	18
Manöverknappar	18

Specialfunktioner på vissa knappar	18
Symboler på displayen.....	22
Använda telefonen	24
Allmän hantering av telefonen	24
På-/avstängning av mobiltelefonen	25
Välj telefonnummer/genomför samtalet.....	26
Val med snabbvalstangenter	26
Val med direkttangenter	27
Val med upprepning/val ur uppringningslistan	27
Hur man svarar i telefonen	27
Inställning av ljudstyrkan	28
Handsfree	28
Urkoppling av mikrofonen	29
Anordna ett konferenssamtal	29
Meny "Telefonbok"	31
Öppna telefonboken	31
Kontrollera ledigt lagringsutrymme	31
Lägg in en ny telefonbokspost	31
Att ringa ur telefonboken	33

Ändra en post i telefonboken	33
Radera en post i telefonboken.....	34
Radera alla poster i telefonboken	34
Kopiera alla poster i telefonboken	35
Lagra poster i telefonboken till en snabbvalstangent	35
Lagra poster från telefonboken till en direkt tangent.....	36
Meny "Meddelanden"	39
SMS-Meny	39
Kontrollera/ändra SMS-Centralnummer	40
Skriva, och skicka iväg ett SMS	42
Läsning, radering och ytterligare åtgärder med ett SMS...	43
Meny "Callcenter"	45
Titta på telefonlistan.....	45
Rade ringlistan.....	46
Uppringningsinställningar	47
Meny "SOS"	52
Välj uppringningsmål för nödsamtal.....	52
Inmatning av nummer till nödsamtalsfunktionen	52
Välj nödanropsmeddelande.....	53

Hämta personligt inspelade nödanrop.....	54
Nödanropets förlopp	55
Avbryt nödanropsfunktionen.....	56
Meny "Inställningar"	57
Användarprofiler	57
Familjenummer	59
Signalkontroll	60
På-/Avstängning av förstärkning	60
Telefoninställningar.....	61
Nätverksinställningar	63
Säkerhetsinställningar	63
Bluetooth	64
Återställ fabriksinställningar	66
Meny "Organisatör"	67
Kalender	67
Kalkylatorn	67
Alarm	68
Aktiviteter	69
Tidtagarur	69

Meny "Tjänster"	71
Bilaga	72
Tekniska data.....	72
Service-Hotline	73
Frågor och svar.....	73
Anvisningar beträffande batteriet	76
Avsedd användning	76
Användningsområde	77
Säkerhetsanvisningar	78
Energiesparande nätdel	81
Avfallshantering.....	81
Konformitetsförklaring	83
Anvisning för omvårdnad	83
Garanti	83
Index	86
Menyträd	90




Kortfattad bruksanvisning

Viktigt: Läs säkerhetsanvisningarna på sidan 78 innan du börjar.

En snabbtitt

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Förstärkarknapp | 13 Staketknapp |
| 2 Volymreglage | 14 Mikrofon |
| 3 Skärm | 15 Laddningskontakt |
| 4 Vänster Softkey | 16 Headset-kontakt (Headset ingår ej) |
| 5 Uppringningsknapp | 17 Micro-USB-Laddningskontakt |
| 6 Snabbvalsknappar M1, M2, M3 | 18 Högtalare |
| 7 Tangentbord | 19 Nödanropsknapp |
| 8 Stjärnknapp | 20 Locket till batterifack |
| 9 Öronpropp | |
| 10 Höger Softkey | |
| 11 På/Av-knapp | |
| 12 Avsluta samtal/
På-/Avknapp | |

KORTFATTAD BRUKSANVISNING

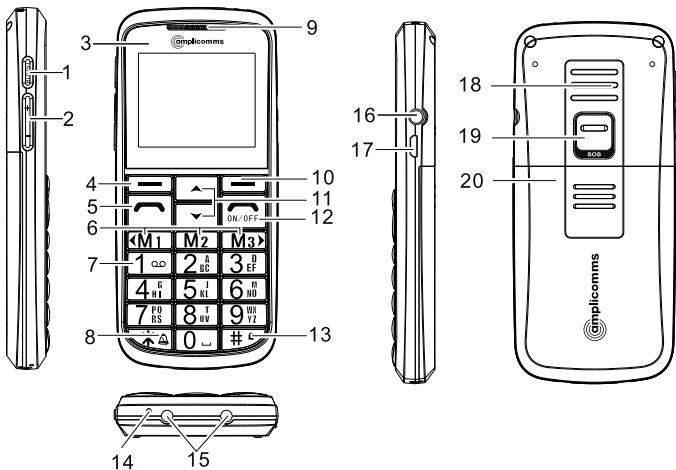



Innehåll

1 Mobiltelefon

1 Laddare

1 Litium-Ionen-batteri

1 Bruksanvisning

1 Bordsladdare



Isättning av SIM-kort och batteri

Små föremål kan sväljas!

SIM-kortet kan tas ur. Småbarn kan svälja dessa. Se till att SIM-kortet inte blir böjt eller skrapat. Undvik att det kommer i kontakt med vatten, smuts, och elektriskt laddade föremål. Ditt telefonnummer finns på kortet, men finns inte lagrat i telefonen. Använd SIM-kortet från en tidigare telefon och behåll därmed telefonnumret.

- Stäng av telefonen.
- Avlägsna locket till batterifacket genom att trycka på det markerade området under nödannelsknappen och skjut nedåt samt lyft upp.
- Om det sitter ett batteri i facket tas detta ut.

- Skjut SIM-kortet med de guldfärgade kontakterna nedåt så att det passar in i den utstansade SIM-korts-hållaren. SIM-kortet måste ligga under metallskenan.
- Sätt i batteriet. Batteriets kontakt sitter längst ned till höger. Tryck lätt på batteriets övre del tills det snäpps fast.
- Sätt tillbaka den bakre delen av locket på telefonen och skjut det uppåt till det snäpps fast.

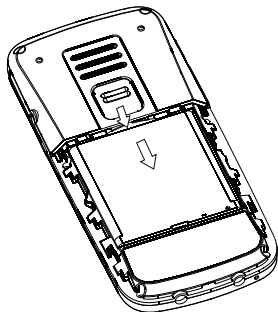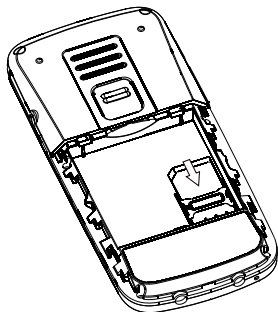



Uppladdning av batteriet

- Säkerställ, innan batteriet laddas, att batteriet är korrekt isatt. Ta inte bort batteriet under tiden telefonen laddas, telefonen kan skadas då.
- Före första gången batteriet används skall det ladda upp under minst 4 timmar. Vissa batterier når först efter flera fullständiga laddnings-/urladdningscykler full kapacitet.

Laddning via Mini-USB-laddningskontakten

- Stick in laddaren i Mini-USB-laddningskontakten.
- Stäng av laddaren. Använd, av säkerhetsskäl, bara laddaren som medföljer.

Laddning vi bordsladdaren

- Stick in laddaren i laddningsstationens Mini-USB-Laddningskontakt. Ställ telefonen i laddningsstationen för uppladdning.
- Det kan dröja några sekunder innan telefonen visar att laddningen startat med kontroll-LED:n.



Batteriladdningsnivå

Den aktuella batterinivån visas enligt följande på displayen:



Full -- > -- > -- > -- > -- Tom

Vid låg batterinivå fås ett passande meddelande på displayen. Ladda sedan ur batteriet.

När batterinivån ligger under lägsta nivån stängs telefonen automatiskt av.

Sätta på-/av mobiltelefonen



3 Sek. stäng av mobiltelefonen. För att stänga melodin trycker man på "lägg på"-knappen.




3 Sek. stäng av mobiltelefonen



Vissa SIM-kort kräver att man anger sin PIN-kod. Följ anvisningarna.

SIM-koden (SIM-kortets PIN) som man får tillsammans med SIM-kortet, skyddar SIM-kortet från obehörig användning. PIN2-koden, som man får tillsammans med vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa tjänster. När man slår in PIN- eller PIN2-koden felaktigt tre gånger i följd, blir man ombedd att ange PUK- eller PUK2-koden. Vänd dig till din mobilleverantör om du inte känner till den här koden.

Testa nätåtkomsten

Alla nät kan inte alltid nås överallt. Symbolen  visar att en signal och ett nät kan nås. Namnet på nätet anges alltid.

Språkinställning

Se sidan 62 för hur man ställer in språket. Man har olika språk till förfogande.



Inställning av datum och klockslag

Se sidan 61.

Ta emot samtal



Ta emot samtal

Avvisa samtal



Avvisa samtal

Avsluta samtal



Avsluta samtal

Ring upp

Ange telefonnumret

Radera

Vid felaktig inmatning raderas sista siffran



Välj nummer



Utvidgade inställningar och funktioner

Ytterligare anvisningar om inställningar och funktioner hos din Amplicomms M6500 får man i den här bruksanvisningen. Exempel:

- Installera direktvalsknapparna -> Sidan 36.
- Lagra telefonnummer i telefonboken -> Sidan 31.

Vid frågor skall du vända dig till vår Service-Hotline:

Telefonnumret hittar du på vår hemsida

www.amplicomms.com

Frågor och svar

M6500 levereras utan SIM-kort. Följande frågor och svar ger praktiska råd.

Varför levereras mobiltelefonen utan SIM-kort?

Många användare har redan en mobiltelefon och vill kunna fortsätta använda sitt SIM-kort i den nya telefonen. Fördelen är att det gamla telefonnumret fortfarande gäller.



Om det handlar om att det gamla kortet är ett kontantkort, förblir dessutom tillgodohavandet åtkomligt på kortet.

Var får jag tag i ett SIM-kort?

SIM-kort finns i alla telefonbutiker, på stormarknader och inköpscentra med sådana avdelningar eller över internet. Var, vid köp av SIM-kort, noga med att nättäckningen är tillräcklig i området där du bor.

Varför har mobiltelefonen inget eget telefonnummer?

Telefonnumret för du från din nätleverantör. Det finns lagrat på SIM-kortet.

Kan jag fortsätta använda SIM-kortet från min gamla telefon?

Ja, SIM-kortet kan flyttas över. Men det får hur som helst inte vara äldre än 3 år. Vissa äldre SIM-kort hör till en tidigare generation SIM-kort och är därför inte kompatibelt med M6500.



Kan jag använda SIM-kortet i alla telefoner?

Ja. Amplicomms mobiltelefon är en s.k. öppen SIM-korts-telefon, vilket innebär att den inte är låst till en bestämd mobilåterförsäljare eller nätleverantör.

Hur betalar jag mina avgifter?

Det finns två huvuddelar hos nätleverantören eller mobilåterförsäljaren under vilka du kan anmäla dig. Det ena är en avtalsförbindelse – härvid har du ett avtal över en överenskommen tidsperiod på flera månader/år och här betalar de månatliga avtalsavgifterna. Detta är särskilt intressant för användaren som använder sin telefon i arbetet. Den andra är för-betald, ibland även kallat Pay-As-You-Go (PAYG). Då laddar man kortet med en första och efter behov fyller man på detta. Laddning i efterhand kan bara tänkas direkt via telefonen, online, i många butiker men också vid laddningsstationer (t.ex. bankomater). Förbetalda mobiler ägnar sig särskilt för den användare som inte använder telefonen så mycket.



Hur kan jag se mitt tillgodohavande/kontoställning?

Nätleverantören levererar normalt ditt SIM-kort tillsammans med informationsmaterial. Här finns också ett kort telefonnummer som du kan använda för att få reda på din kontoställning. Alla Mobilleverantörer har ett eget åtkomstnummer. Prova därför de uppgifter som gäller för din internetleverantör. Skriv in numret och använd uppringningsknappen. Kontoställningen läses då upp.



Telefonen i detalj

Manöverknappar

Förklaringen av manöverknapparna hittar du på sidorna 6.

Specialfunktioner på vissa knappar

Softkey vänster

Under vila -> Anrop av huvudmenyn; I menyn härbergeras andra funktioner, som visas i displayen ovanför Softkeys (t.ex. **OK**).

Softkey höger

Under vila -> Anrop av telefonboken; I menyn härbergeras andra funktioner, som visas i displayen ovanför Softkeys (t.ex. **Bakåt**).

Direktvalsknappar

M1, M2, M3 – En snabb tryckning väljer genast det telefonnummer som sparats under knappen. Man kan spara telefonboksinsmatningar under dessa knappar(se "Spara



telefonboksenmatning under direktvalsknappar”, sidan 36). **Anvisning:** Eftersom manövreringen är känslig och bara en kort knapptryckning är allt som krävs kan det möjligen leda till att ett oönskat nummer väljs.

Uppringningsknappen - För val och för uppringning för samtal.

- För att öppna ringlistor/upprepning av val.

Avslutningsknapp - För att avsluta eller avvisa ett samtal.

- Återgång till standby-läge (vid programmering).

- För att stänga av apparaten.

På/Av-knappen För att navigera i menyn. I standby-läge erbjuder På/Av-knappen snabb åtkomst av bestämda menypunkter:



- ▲ - Användarprofiler: Val eller definition av användarprofilen.
- ▼ - Kalender: Kalendervisning/
Lägg till och radera händelser.

Sifferknapp 0

Lång tryckning (ca 3 sek.) i standby-läge, växlar mellan de olika ljudinställningarna (för alla detaljer, se sidan 60).

Sifferknapp 1

Lång tryckning (ca 3 sek.) väljer brevlådas telefonnummer (för att ändra brevlådenummer, se sidan 41).

Stjärn-knappen

Kort tryckning - Vid urvalsförberedelse för inmatning av internationella förvalet "+" (2 x kort tryckning) eller inmatning av P/W (ev. nödvändigt för tillvalsnummer eller fjärrkontroll för en telefonsvarare).

- Vid textinmatning: Anrop av tabel-



len för specialtecken.

Lång tryckning (ca 3 sek.): Omkoppling mellan standby-läge (tonval ur) och vald profil.

Fyrkant-knapp

- I viloläge: Lång tryckning kopplar på respektive av tangentlåset.

- Vid textinmatning: Växlar mellan inmatningsläge (Inmatningsläget (Stor-/liten text/siffror).

+/- knappar

- I viloläge: Inställning av ljudstyrkan i knappljudet.

- I samtal: För inställning av högtalarens ljudstyrka.

Förstärkarknapp

(BOOST) I viloläge: ca 2 sek tryckning sätter på/stänger av ficklampan.

I samtal: Kort tryckning sätter på/stänger av förstärkning av högtalarljudet.



Nödanropsknappen Startar nödanropssekvensen. För detaljer om detta, se sidan 55.

Symboler på displayen



Nät tillgängligt/signalstyrka



Batteriets laddningskondition (se även sida 11)



Olästa SMS



Nytt röstmeddelande



Obesvarade uppringningar



Vidarekoppling aktiverad



Alarm/väckaklocka inställd och aktiverad



Förstärkare påsatt











Endast ringsignal



Ringsignal och vibration



Först vibration och sedan ringsignal

-  Endast vibration
-  Drift med Headset
-  Bluetooth aktiverat
-  Ljudsignal urkopplad
-  Tangentbordet spärrat
-  USB påkopplad
-  Ett stoppur kör i bakgrunden
-  "Roaming"-symbolen lyser, när telefonen är inbokad hos en annan nätleverantör. Detta skulle t.ex. kunna inträffa när du reser i ett annat land. "Roaming" är beroende på din nätleverantör. Om du vill ha ytterligare information kontaktar du din nätleverantör.

Använda telefonen

Allmän hantering av telefonen

Hantering och programmering av mobiltelefoner sker via menyer.

- Använd piltangenterna ▲ /▼ för att bläddra fram och tillbaka i menyer och listor (t.ex. telefonboken).
- Tryck på **Bakåt**, för att nå föregående steg.
- Tryck på **OK** eller **Välj** för att nå nästa steg.
- Vid textinmatning (t.ex. Telefonboken eller SMS) växlar man mellan stora och små bokstäver med tangenten #, Första bokstaven stor respektive tal med (stora bokstäver: ABC, små bokstäver: abc, tal: 123).
- Använd piltangenterna ▲ /▼ eller **M1** (←) och **M3** (→), för att förflytta markören och **Radera**, för att radera tecken.



Viktig anvisning: När displayens belysning har stängts av, aktiveras belysningen åter med ett tryck på valfri tangent. Man måste sedan trycka på önskad tangent en andra gång, för att utföra funktionen.

På-/avstängning av mobiltelefonen

Stänga av: Tryck på håll den röda verkställ-tangenten intryckt. Efter några sekunder stängs telefonen av (mörk display).

Sätta på: Tryck på håll den röda verkställ-tangenten intryckt tills displaybelysningen tänds. Skriv in SIM-kortets PIN-kod, och tryck sedan på **OK**. Inmatningen av PIN-koden kan upphävas om SIM-kortet är avstängt (se även sidan 63, "SIM-spärr"/inte möjligt hos alla leverantörer).

Välj telefonnummer/genomför samtalet

- Telefonen måste befinna sig i viloläge (SIM-kortet istoppat och apparaten påsatt).
- Skriv in telefonnumret inklusive landskod resp. ortförval. Istället för inmatning av ett + före landskoden, trycker man snabbt på * två gånger efter varandra.
- Tryck på den gröna ringtangente för att välja numret.
- För att bryta förbindelsen trycker man på den röda avslutningstangenten.

Val med snabbvalstanger

- Tryck längre på den programmerade siffertangenten (c:a 3 sek.). Det tidigare lagrade telefonnumret väljs. Se sidan 35 för hur man programmerar ett nummer ur telefonboken på en snabbvalstangent.

Val med direkttangenter

- Tryck kort före den programmerade direkttangenter. Det tidigare lagrade numret väljs. Se sidan 36 för hur man programmerar direkttangenter med nummer ur telefonboken.

Val med upprepning/val ur uppringningslistan

- Tryck under standby-läge på den gröna uppringningstangenten. En lista visas med valda, accepterade och inte accepterade uppringningar. Välj ett nummer med piltangenterna ▲ /▼.
- Tryck på den gröna uppringningstangenten för att välja det visade numret.

Hur man svarar i telefonen

- När telefonen ringer, trycker man på den gröna uppringningstangenten.
 - Tryck på den röda tangenten för att avvisa ett sam-



tal. Den uppringande får då en upptagetton (beroende på nätleverantören).

Med höger Softkey kan ljudsignalen stängas av ("Tyst"). Därefter kan man avvisa ("Avvisa") samtalet med höger Softkey.

Med vänster Softkey eller den gröna svarstangenten tar man samtalet.

Inställning av ljudstyrkan

- Ställ, under samtalet, med tangenterna + / - på apparatens sida, in ljudstyrkan. Inställningen lagras.

Handsfree

- Under samtalet trycker man **H-Fri**. Samtalet återges nu över högtalaren.
- För att växla tillbaka trycker man på **H-Hållen**. Högtalaren kopplas då ur.

Urkoppling av mikrofonen

(Mute/Tyst)

- Under samtalet trycker man på **Alternativ**, välj **Tyst** och tryck på **På**. Mikrofonen är nu avstängd.
- För att koppla in mikrofonen trycker man på **Alternativ**, välj **Tyst** och trycker på **Av**.

Anordna ett konferenssamtal

”Konferens” är en nätfunktion där flera personer telefonerar till varandra samtidigt (beroende på nätleverantören).

- Ring upp den första deltagaren.
- Tryck på **Alternativ**, välj **Nytt samtal** och tryck på **OK**.
- Skriv in telefonnumret till nästa deltagare eller välj **Alternativ** och **Telefonbok**, för att leta fram ett nummer ur telefonboken.
- Tryck på **Alternativ** och välj **Ring upp - OK**.

- När den andra deltagaren svarar, trycker man på **Alternativ** och väljer **Konferens - OK**, för att koppla ihop alla parterna.



Meny "Telefonbok"

Man kan lagra namn och telefonnummer i den interna telefonboken (upp till 300 namn) och på SIM-kortet.

Öppna telefonboken

- I standby-läge, tryck på **Namn** eller
- Under ett pågående samtal, tryck på **Alternativ**, välj **Telefonbok** och tryck **OK**.

Kontrollera ledigt lagringsutrymme

För att fastställa hur många namn och telefonnummer som finns lagrade trycker man på **Namn** -> **Alternativ** -> **Telefonboksinställningar** -> **Minnesstatus**. Man får då information om hur mycket lagringsplats som finns i telefonen och på SIM-kortet.

Lägg in en ny telefonbokspost

- Tryck på **Namn** -> **Alternativ** -> **Lägg till kontakt**.
- Välj om posten skall lagras i telefonen eller på SIM-kor-

tet. **Anvisning:** Om man väljer "SIM kort" kan man bara lagra namnet och telefonnumret.

- Skriv in ett namn och tryck på ▼.
- Skriv in (det första) telefonnumret och tryck på ▼.
- Skriv in ev. ytterligare telefonnummer (privatnummer/kontoret). Tryck alltid på ▼ i anslutning till inskrivningen.
- Ange en ringsignalen för den här posten. Välj melodi med **M1** (◀) och **M3** (▶). Med **Spela in ringsignal**, kan du spela in en egen melodi respektive en önskad text som telefonen läser upp vid uppringning. De här egna inspelningarna fungerar som "ringsignal". För detta ändamål trycker man på **M2**, därefter trycker man på **Alternativ -> Ny inspelning**.
- Med **Stopp** lagras den nya ringsignalen.
Ytterligare möjligheter:
 - **Lista** -> Öppnar listan med inspelade ringsignaler.



Med **Alternativ** kan man spela upp eller radera poster.

- För att avsluta trycker man på **Alternativ** -> **Spara**.

Anvisningar om "Egen ringsignal":

Man kan t.ex. använda "Peter" ringer, som ringsignal. Har man sedan inordnat "Peter" med den här ringsignalen, säger telefonen: "Peter ringer", när Peter ringer upp.

Att ringa ur telefonboken

- Tryck på **Namn**, för att öppna telefonboken.
- Välj ett alternativ med piltangenterna eller genom att först ange den första bokstaven i namnet.
- Tryck på den gröna uppringningsknappen för att välja numret.

Ändra en post i telefonboken

- Tryck på **Namn**, för att öppna telefonboken.
- Välj en post, tryck på **Alternativ** och välj **Redigera**.

- Ändra posten.
- Tryck på **Alternativ** -> **Spara**.

Radera en post i telefonboken

- Tryck på **Namn**, för att öppna telefonboken.
- Välj ut en post, tryck på **Alternativ** och välj **Ta bort**.
Bekräfta säkerhetsfrågan med **Ja**.

Radera alla poster i telefonboken

- Tryck på **Namn** -> **Alternativ** -> **Telefonboksinställningar** -> **Radera alla kontakter**. Välj om posten skall raderas i telefonen eller på SIM-kortet och bekräfta ditt val.

Anvisning:

- För att radera alla poster i telefonen krävs att du har mobilens lösenord. Detta är lagrat på fabriken och är inställt till 1122.
- För att radera alla poster på SIM-kortet måste man mata in SIM-kortets PIN-kod.



Kopiera alla poster i telefonboken

- Tryck på **Namn** -> **Alternativ** -> **Telefonboksinställningar** -> **Kopiera kontakter**. Välj att kopiera posterna på SIM-kortet till telefonen, eller från telefonen till SIM-kortet och bekräfta ditt val.

Lagra poster i telefonboken till en snabbvalstangent

- Tryck på **Namn** -> **Alternativ** -> **Telefonboksinställningar** -> **Snabbuppringning** och tryck på **OK**.
- Försäkra dig först om att snabbvalsfunktionen är på.

Anvisning: Står Status "Av", trycker man på vänster Softkey, för att sätta på funktionen.

- Välj **Ställa nummer** och tryck på **OK**.
- Välj en tangent på listan (2...9) och tryck på **Redigera**
- Välj **Från telefonbok**, markera en post och tryck på **OK**. Bekräfta säkerhetsfrågan med **Ja**.
eller

välj **Redigera nummer**, mata in ett telefonnummer och tryck på **OK**. Bekräfta säkerhetsfrågan med **Ja**.

Lagra poster från telefonboken till en direkttangant

- Tryck på **Meny** -> **Inställningar** -> **Familjenummer**
- Välj en direkttangant bland (M1, M2, M3) och tryck **OK**.
- Ändra, om nödvändigt, tangantens namn och tryck på ▼.
- Tryck på **Redigera** -> **Från telefonbok**, välj en post och tryck **OK**.

eller

tryck på **Redigera** -> **Redigera nummer**, mata in ett telefonnummer och tryck **OK**.

Anvisning: För att bearbeta eller radera posten trycker man på Alternativ -> Redigera nummer



Fler alternativ

Om du har öppnat telefonboken och valt en post, trycker man på **Alternativ** och välj ett av följande alternativ:

- **Se:** Posten visas.
- **Lägg till kontakt**
- **Skicka textmeddelande:** skicka SMS till detta nummer.
- **Ring upp:** Uppringning av telefonnummer.
- **Redigera:** Bearbeta posten.
- **Ta bort:** Posten raderas.
- **Kopiera:** Kopiera posten till telefonen eller till SIM-kortet.
- **Flytta:** Man kan flytta posten i telefonen eller på SIM-kortet. Ursprungsplatsen raderas då.
- **Lägg till till blockeringslista:** Posten förs över till spärrlistan.
- **Grupper:** Man kan definiera grupper. Dessa kan omfattas av poster i telefonens telefonbok.

- **Telefonboksinställningar:**
 - **Föredragen lagring:** Välj den lagringsplats som föredras för nya kontakter (SIM eller telefon).
 - **Snabbuppringning:** På- och avstängning av funktionen och bearbetning av snabbvalsnummer.
 - **ägare nummer:** Ditt eget(n) mobilnummer(n)
 - **Minnesstatus**
 - **Kopiera kontakter:** Kopiera alla kontakter från SIM-kortet till telefonen och omvänt.
 - **Flytta kontakter:** Flytta alla kontakter från SIM-kortet till telefonen och tvärtom.
 - **Radera alla kontakter:** Radera alla kontakter på SIM-kortet eller i telefonen.



Meny "Meddelanden"

Man kan skicka och ta emot textmeddelanden (SMS/Short Message Service). Mottagna SMS lagras antingen SMS internt i telefonen eller på SIM-kortet. Olästa SMS lagras i inkorgen. När ett nytt SMS ankommer visas ett meddelande på displayen.

Om minnet är fullt får du ett meddelande. För att kunna ta emot nya SMS måste gamla raderas.

SMS-Meny

Efter att tryckt på **Meny** -> **Meddelanden** har man följande möjligheter:

- **Skriv meddelande:** Skriva ett nytt meddelande.
- **Inkorg:** Öppna listan med mottagna SMS.
- **Utkast:** Tillgång till utkast-listan.
- **Utkorg:** Öppna listan med SMS som ännu inte har skickats iväg.
- **Skickade:** Öppna listan med SMS som har skickats.

- **SMS Mallar:** Tillgång till listan med mallar.
- **SMS inställningar:** Här kan man utföra olika inställningar för SMS.

Kontrollera/ändra SMS-Centralnummer

Dessa speciella krävs för utskick och mottagning av SMS. Det finns korrekt lagrat på SIM-kortet. I vissa fall är det nödvändigt att kontrollera, men också ändra, dessa nummer.

- Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** -> **SMS inställningar** -> **SIM card**
- Du har följande alternativ.
 - **SMSC adress:** (Telefonnumret till din nätleverantörs SMS-centrum. Kontakta din nätleverantör om du har ytterligare frågor.)
Om nödvändigt, radera med **Radera** det visade numret, skriv in ett nytt siffertangenterna och tryck på **OK**.



- **Giltighetsperiode:** Välj önskad giltighetstid med tangenterna **M1** (←) och **M3** (→).
- **Meddelandetyp:** Låt inställningen för M6500 stå med "Text".
- **Leveransrapport:** Man kan begära kvitto på skickade SMS (beroende på din nätleverantör).
- **Svarsväg:** Låt inställningen för M6500 stå med "Av".
- **Röstbrevlåda server:** Du kan ändra telefonnumret till din röstbrevlåda. Vänd dig till din nätleverantör om du har frågor angående detta.

Skriva, och skicka iväg ett SMS

- Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** -> **Skriv meddelande**.
- Skriv in ditt SMS med sifvertangenterna. Ytterliogare anvisningar avseende textinmatning, se avsnitt "Allmänna anvisningar angående telefonens hantering", sidan 24.
- När du har matat in texten, trycker du på **Alternativ**, välj **Skicka till**.
- Välj **Ange nummer**, tryck på **OK** och ange mottagarens telefonnummer med lands-, respektive ortsförval och tryck på **OK**.
- Det inmatade numret visas.
- Tryck på **Alternativ** och välj **Skicka**,

eller

- Välj **Lägg till från Telefonbok**, välj en post och tryck på **OK**.
- Den utvalda posten visas.
- Tryck på **Alternativ** och välj **Skicka**.



Läsning, radering och ytterligare åtgärder med ett SMS

- Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** -> **Inkorg**.
- Välj ut ett mottaget meddelande.
- Tryck på **Alternativ** -> **Se**, för att se meddelandet.
- Läs texten, datum och klockslag för mottagandet.
- Tryck på **Alternativ**. Nu har du följande möjligheter:
 - **Svara**: Du kan skriva ett svar direkt på avsändar-numret.
 - **Ring upp sändaren**: Man kan också ringa upp avsändaren.
 - **Vidarebefodra**: Man kan vidare skicka SMS:et till ett annat mottagarnummer.
 - **Ta bort**: Man kan radera SMS:et.
 - **Radera alla**: Man kan också radera alla SMS.
 - **Avancerad**
 - **Använd nummer**: Man kan ringa upp avsändarens nummer, lagra det i telefonboken eller ski-



cka ett SMS till detta nummer.

- **Kopiera till telefon:** Du kan kopiera SMS:et från SIM-kortet till telefonen.
- **Flytta till telefon:** Man kan flytta SMS:et från SIM-kortet till telefonen.



Meny "Callcenter"

När ett nytt samtal har inkommit visas ett meddelande på displayen.

- Tryck på **Bakåt** för att radera meddelandet. En symbol tänds på displayen som visar att det har kommit nytt samtal. Detta samtal sätts "normalt" sedan in på listan för **Missade samtal**.
- Tryck på **Se**, för att visa telefonnummer/namn på uppringaren.
- Tryck på **Alternativ**. Ytterligare möjligheter finns därefter beskrivna under granska samtalslista.

Titta på telefonlistan

- Tryck på **Meny**, välj **Callcenter** -> **Samtalshistoria**.
- Välj om du vill öppna listan **Missade samtal**, **Uppringda samtal** eller **Mottagna samtal**.

I listan finns olika möjligheter. Tryck på **Alternativ** och

välj bland följande åtgärder:

- **Se:** Alla detaljer visas.
- **Ring upp:** Uppringning av telefonnummer.
- **Skicka textmeddelande:** Skicka ett SMS till detta nummer.
- **Spara på telefonbok:** Posten lagras i telefonboken.
- **Lägg till till blockeringslista:** Posten förs över till spärrlistan.
- **Redigera före samtal:** Bearbeta numret innan du ringer tillbaka.
- **Ta bort:** Radera denna post.

Rade ringlistan

- Tryck på **Meny**, välj **Callcenter** -> **Samtalshistoria**.
- Välj **Radera samtalslista** och tryck på **OK**.
- Välj om du vill radera listan **Missade samtal**, **Uppringda samtal**, **Mottagna samtal** eller **Radera alla** och tryck på **OK**. Bekräfta säkerhetsfrågan med **Ja**.



Uppringningsinställningar

- Efter att ha tryckt på **Meny** -> **Callcenter** -> **Samtalsinställningar** -> **OK** har du följande möjligheter:
 - **Samtalsinställningar**
 - **Samtal väntar:** Inställning av hur ytterligare uppringningar hanteras under tiden man talar i telefon.
 - **Aktivera:** Det andra samtalet signaleras med en uppmärksamhetssignal.
 - **Inaktivera:** Det andra samtalet för en upptagetsignal.
 - **Förfrågningsstatus:** Information om aktuell inställning.
 - **Vidarekoppla:** Sätt upp vidarekoppling.
 - **Vidarekoppla röstsamtal för alla villkor:** Du kan aktivera vidarekoppling för röstsamtal (ange samtidigt ett nummer till- eller välj **Till röstlåda**, när samtalet skall kopplas till din in-



korg), avaktivera eller hämta aktuella förhållanden med **Förfrågningsstatus**.

- **Vidarekoppla om du inte kan nå:** vidarekoppling, om din mobil inte kan nås på nätet (avstängd eller "Inget nät"). Inställningsalternativ, se "Vidarekoppla röstsamtal för alla villkor".
- **Vidarekoppla vid inget svar:** vidarekoppling, om du inte svarar när det ringer. Inställningsalternativ, se "Vidarekoppla röstsamtal för alla villkor".
- **Vidarekoppla vid upptaget:** vidarekoppling, om mobilen är upptagen. Inställningsalternativ, se "Vidarekoppla röstsamtal för alla villkor".
- **Vidarekoppla alla datasamtal:** vidarekoppling av data-trafik. Inställningsalternativ, se "Vidarekoppla röstsamtal för alla villkor".



- **Avbryt alla vidarekopplingar:** Koppla ur alla vidarekopplingar.
- **Spärra samtal:** Sätt upp spärrar för utgående och inkommande samtal. Lösenordet som alltid anges är beroende på din nätleverantör. Här kan man ändra detta till ett personligt lösenord (-> **Ändra PW-spärr**). Vänd dig till din nätleverantör om du har frågor angående detta.
 - **Utgående samtal:** Spärra **Alla röstsamtal**, inga samtal kan göras. Spärra **Internationell röstsamtal**, inga samtal kan göras i utländska nät. Spärra **Internationell röstsamtal Förutom den inh**, endast samtal i din nätleverantörs (som du har fått ditt SIM-kort ifrån) nät kan genomföras.
 - **Inkommande samtal:** Vid aktivering av **Alle röstsamtal** signaleras inga samtal – du kan inte nås. Inställningen **Röstsamtal vid roa-**

ming spärrar alla inkommande samtal när du befinner dig utanför ditt "hemma-nät" (t.ex. i utlandet, när du är på semester).

- **Avbryt alla:** Avaktivera alla spärrar.
- **Ändra PW-spärr:** Byt lösenord för På-/Avstängning av spärrarna.
- **Avancerade inställningar:**
 - **Blockeringslista:** Du kan mata in en lista över telefonnummer som skall blockeras. När du har satt på funktionsläget kommer inga samtal (ingen signal) från dessa nummer.
 - **Automatisk uppringning:** Om funktionen är påkopplad kommer nummer som är "upptagna" när de rings upp, att automatiskt ringas upp igen (tidsintervall är 5 minuter, max. 5 försök).
 - **Visning av samtalstid:** Om funktionen är påkopplad visas samtalstiden på displayen.



- **Minutsignal:** Om man vill ha en varningssignal efter en bestämd samtalstid kan man kan ställa in en ton som varnar. Vid **Enda** kan man ställa in upp till 3000 sek. (=50 min), vid **Periodisk** kan en tidpunkt mellan 30 och 60 sek. ställas in.

Meny "SOS"

Den här telefonen är utrustad med en nödsamtalsfunktion. Upp till 5 personliga nummer, eller numret till en SOS-central, kan ställas in för automatiska nödsamtal.

Välj uppringningsmål för nödsamtal

- Tryck på **Meny**, välj **SOS -> SOS inställning -> SOS lägesinställning**.
- Välj **Sätt 5 nummer**, när nödsamtalet skall gå till 5 lagrade nummer eller **Sätt callcenter**, om nödsamtalet skall gå till en central plats. Om du väljer **Av**, avaktiveras nödsamtalsfunktionen.

Inmatning av nummer till nödsamtalsfunktionen

- Tryck på **Meny**, välj **SOS -> SOS inställning**.
- Sätt upp **Sätt SOS nummer**, markera en av de 5 lagringsplatserna och tryck på **Redigera**.
- Välj från **Från telefonbok**, för att överföra telefonnummer ur telefonboken eller **Redigera nummer**, för att

lägga in numret,

eller

- välj **Callcenter nummer** och ange det önskade telefonnumret.

Anvisning: Det är inte tillåtet att överföra offentliga telefonnummer såsom polisen, brandkåren eller räddningstjänsten. Det handlar här om ett helt och hållet "privat" nödanrop.

Välj nödanropsmeddelande

- Tryck på **Meny**, välj **SOS** -> **SOS inställning** -> **Sätt utgående röst MEDD**.
- Välj **Standard**, om ett standard-meddelande skall skickas.

eller

- välj **Användare registrerat** om det skall vara ett självinspelat meddelande. För att kunna använda denna

inställning måste du i förväg ha hämtat ett talat meddelande (se nedan).

Hämta personligt inspelade nödanrop

- Tryck på **Meny**, välj **SOS** -> **Spela in SOS MEDD**.
- Tryck på **Alternativ**, välj **Ny inspelning** och tryck på **OK**.
- Tala sedan in ditt personliga meddelande i telefonens mikrofon.
- För att avsluta inspelningen trycker man på **Stopp**. Rösten sparas.

Nödanropets förlopp

Skjut nödanropsreglaget på apparatens baksida till sitt övre läge – **SOS** syns. Så snart det automatiska nödanropet har startat hörs under några sekunder en "siren".

Vid inställning av "Sätt 5 nummer":

- Det första numret anropas.
- Om det första nöd-numret inte svarar anropas det andra nöd-numret osv. Alla nödanropsnummer (max. 5) har ringts upp efter varandra. Har du bara matat in ett nödanropsnummer, upprepas uppringningen av detta. Detta förlopp upprepas tills mobilens batteri är tomt. Nödanropsslingan stoppas så snart någon svarar. Nödmeddelandet spelas upp.

Om den uppringda under eller senast 10 sek. efter att nödanropet har lästs upp, trycker på "**0**"-tangentsen på sin telefon, aktiveras talfunktionen och du kan tala personligen med den uppringde.

- **OBS! Vänj dig uttryckligen vid att "0"-tangenten måste tryckas in av den uppringda för att ni skall kunna tala med varnadra vid personliga nödmeddelanden. Om detta inte görs, fortsätter nödanropsslingan. Genom denna åtgärd undviks att nödanropsslingan avbryts om t.ex. en telefonsvarare tar emot ditt anrop.**
- **Nödanropsslingan fortsätter också efter avslutande av ett inkommande nödanrop, sålänge man avbryter nödanropet (skjut tillbaka nödanropsreglaget ned igen).**

Avbryt nödanropsfunktionen

Skjut tillbaka nödanropsreglaget till det undre läget igen.



Meny "Inställningar"

Användarprofiler

Man kan lagra olika profiler (särskilda inställningar beroende på användare eller omgivning), som vid behov snabbt kan kopplas om.

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Användarprofiler**.
- Välj en av profilerna och tryck på **Alternativ**.
- Du har följande alternativ:
 - **Aktivera**: Profilen aktiveras med passande inställningar.
 - **Anpassa**: Bearbeta inställningarna för den valda profilen.
 - **Inkommande samtal** - Val av melodi vid uppringning
 - **Ringsignal volym** - Inställning av ljudstyrkan för telefonsamtal.
 - **Meddelandesignal** – Signalton för mottagning av SMS



MENY "INSTÄLLNINGAR"

- **Meddelande volym** - Inställning av ljudstyrkan för inkommande SMS.
- **Alarmsignal** – Val av melodi för ett larm/väckning
- **Alarm volym** - Inställning av ljudstyrkan för alarmet/väckningssignalen.
- **knappsats** – Ställ in om användning av en siffra skall vara ett **Klick**, eller med en **Ton**, uppringning av alla siffror skall följas av **Röst 1** eller **Tyst**.
- **Knapptonsvolym** - Inställning av ljudstyrkan för knappljudet.
- **Ström på** – Val av signalton när mobilen sätts på
- **Ström av** - Val av signalton när mobilen stängs av
- **System varning** - På-/Avstängning av systemmedelanden.



- **Larmtyp:** Välj om uppringning skall endast signaleras genom **Ringa, Endast vib., Vibrera och ringa** eller **Vibrera först och sedan ringa**.
- **Ringtyp:** Man kan välja mellan **Upprepa** och **Beep once**.

Familjenummer

Man kan ladda direktvalstangenterna M1, M2 och M3 med förvalda telefonnummer.

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Familjenummer**.
- Välj en direktvalstangent och tryck på **OK**.
- Ändra, om nödvändigt, beteckning (max. 4 tecken) och tryck på ▼.
- Tryck på **Redigera** och välj en telefonbokspost, skriv telefonnumret för hand eller radera det telefonnummer som gäller hittills.



Signalkontroll

Ställ in önskat ljud för öronpropp/högtalare.

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Signalkontroll**.
- Välj **Normal frekvens**, **Låg frekvens** eller **Hög frekvens** och tryck på **OK**.

På-/Avstängning av förstärkning

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Ökning**.
- Välj **Ökning på**, för att sätta på förstärkning generellt eller **Ökning av**, för att stänga av förstärkning generellt, om man har förstärkning generellt avstängd kan man under samtal alltid förstärka ljudstyrkan med hjälp av förstärkartangenten (se sidan 6).

Lyssning under längre tid med full ljudstyrka kan vålla hörselskador.



Telefoninställningar

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Telefoninställningar** och tryck på **OK**.
- Du har följande alternativ:
 - **Datum och tid:** I denna meny kan man välja tidszon (**Ställ in hemort**), Klockslag och **Ställ in tid/datum**.
 - **Schemalagd slå på/stäng av:** Du kan ställa in upp till fyra automatiska På- och Avstängningstider för telefonen. Välj ut en post och tryck på **Redigera**. Under **Status** väljer du med **M1** (◀) eller **M3** (▶) **Aktivera** för att sätta på funktionen. Välj sedan, om telefonen automatiskt skall sättas på- ("**Slå på**") eller stängas av ("**Stäng av**"). Skriv in önskat klockslag och tryck slutligen på **OK**.



Anvisning: Var noga med att inmatningen av SIM-PIN är nödvändig vid inmatningen. Se även -> Säkerhetsinställningar / Sim-lås, sidan 63.

- **Språk:** Ställ in språket texten på displayen.
- **Önskade inmatningsmetoder:** Ställ in den metod du föredrar för textinmatning (inmatning i telefonboken/SMS).
- **Bakgrund:** Välj bakgrundsbild för displayen när den är inaktiv.
- **LCD Bakljus:** Ställ in önskad ljusnivå och belysningstid av displayen.



Nätverksinställningar

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Nätverksinställningar**.
- Du har följande alternativ:
 - **Ny sökning**: Starta en sökning efter tillgängliga nät.
 - **Välj nätverk**: Välj ett nät ur listan.
 - **Valläge**: Välj om mobilnätet skall visas automatiskt eller manuellt. Vid **Automatisk** inställning försöker telefonen koppla upp sig mot nätleverantören som ditt SIM-kort kommer ifrån.

Säkerhetsinställningar

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Säkerhetsinställningar** och tryck på **OK**.
- Du har följande alternativ:
 - **SIM security**:
 - **SIM-kortlås**: Man kan koppla på eller av begäran att skriva in SIM-PIN för att sätta på/stänga av



MENY "INSTÄLLNINGAR"

telefonen. Med vissa SIM-kort är detta inte tillåtet.

- **Ändra lösenord:** Man kan ändra SIM-PIN-koden.
- **Lås upp knappsatsen automatiskt:** Om det automatiska tangentlåset är påsatt spärras tangenterna automatiskt enligt en inställbar period (5 sek., 30 sek., 1 min., 5 min.).

För att låsa upp tangenterna trycker man på #-tangenten i ca 3 sek.

Bluetooth

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Bluetooth** och tryck på **OK**.
- Du har följande alternativ:
 - **Bluetooth:** På-/Avkoppling av Bluetooth-funktionen.
 - **Synlighet:** Ställ in om det skall synas för annan Bluetooth-utrustning om mobilens Bluetooth-funktion är påkopplad eller inte.
 - **Min enhet:** Endast för framställning av förbindelse



en apparat med audioprofil (t.ex. hörluras eller hansfreeutrustning).

Först måste "**Sök ljudenhet**" och "**Par**" utföras med lämplig utrustning. Efter val av utrustning och **Alternativ** har man följande möjligheter:

- Ansluta (med kopplad utrustning)
- Tjänstelista visa
- Omdöpning av kopplingsnamnet
- Radera denna apparat
- Radera alla apparater
- **Sök ljudenhet:** Med **OK** startar sökningen efter en Bluetooth-apparat. När en sådan apparat hittats och visats måste den kopplas (vänster Softkey: **Par**).
- **Mitt namn:** Visning av det egna Bluetoothnamnet med ändringsmöjlighet.
- **Avancerad:** Efter **OK**, erhåller du följande alternativ:
 - **Ljudväg:** Bestäm huruvida ljudåtergivningen förblir i mobilen eller styrs vidare till ett par Blue-



tooth-hörlurar.

- **Min adress:** Visning av telefonens Bluetooth-adress.

Anvisning: Om telefonen är ansluten till handsfreeutrustning via Bluetooth, är det nödvändigt att kopiera telefonboksposterna från SIM-kortet till telefonen (se sidan 35), för att kunna välja handsfreeutrustning respektive visning av telefonnumret och namn på telefonnumrets plats som handsfree för att möjliggöra samtal.

Återställ fabriksinställningar

Du kan återställa telefonens ursprungliga inställningar. För att göra detta måste du ange telefonens lösenord. Detta är inställt till 1122 från fabriken.

Anvisning: De kontakter som lagrats i telefonen raderas inte.



Meny "Organisatör"

Kalender

Kalendern kan ställas in från januari 1970 till december 2030. Med **Alternativ** når du olika funktioner såsom

- Se
- Se alla
- Lägg till evenemang
- Radera evenemang
- Hoppa till datum
- Gå till idag

Kalkylatorn

Med den integrerade räkneapparaten kan man räkna med plus, minus, multiplikation och division.

- Skriv in det första talet i räkneoperationen. Ett komma skrivs in med fyrkantstangenten.
- Tryck på piltangenterna \blacktriangle / \blacktriangledown / **M1** (\blacktriangleleft) / **M3** (\blacktriangleright) , för att välja operationstecknen (+ - x \div).

- Skriv in nästa tal.
- Tryck på **lika**, för att utföra räkneoperationen.

Alarm

Man kan ställa in 5 olika alarmtider, engångsalarm, som ljuder dagligen eller bara vissa dagar.

- Välj en post och tryck på **Redigera**
- Koppla **Av** eller **På** alarmet med **M1** (◀) / **M3** (▶) och tryck på ▼.
- Välj om alarmet skall komma **En gång, Varje dag** eller på vissa dagar (**Anpassad**). Dagarna väljer man med ▲ / ▼, sätta på- och stänga av kan man alltid göra med vänster Softkey **På/Av**. Dagar, då alarmet ges markeras med ett hak-tecken.
- Ställ in snooze-tiden med M1 (◀) respektive M3 (▶).
- Bestäm under **Larmtyp** hur alarmet skall (**Ringa/Endast vib./Vibrera och ringa**).
- Om väckningssignalen ljuder, stänger man av det med **Stop**.



Aktiviteter

Efter **Lägg till** kan man definiera tidspåminnelser. För detta står olika möjligheter till förfogande.

Tidtagarur

Den fungerar som ett stoppur med olika funktioner.

- **Vanlig tidtagarur**
 - **Parallell tidtagning:** Stoppur med mellantidsfunktion och summering av den totala tiden. **Start** startar funktionen, **Samta.** tar mellantiden (den totala tiden visas dessutom), **Paus** stoppar funktionen med lagringsmöjlighet, och med **Alternativ** kan man antingen **Återställ** eller **Fortsätta** stoppuret.
 - **Varvtidtagning:** Stoppur med varvtidsfunktion utan summering av den totala tiden. **Start** startar funktionen, **Varvti.** tar varvtiden (varje gång visas det sista varvets varvtid), **Paus** stoppar funktionen med lagringsmöjlighet, och med **Alternativ** kan du



antingen **Återställ** eller **Fortsätta** stoppuret.

- **Visa register:** Lista över lagrade stopptider.
- **nWay-tidtagarur**

Det nWay-tidtagarur består av 4 parallella stoppur, som var för sig kan startas med piltangenterna ▲ /▼/ **M1** (←) / **M3** (→).

Det alltid akryva stoppuret kan startas (**Start**), pausas (**Paus**) och fortsättas (**Inneh.**).

Med höger Softkey **Återställ** återställs alla fyra stoppur.

Meny "Tjänster"

De inmatningar som görs i denna meny varannan vecka beror på nätleverantören. Vänd dig till din nätleverantör när du har frågor.

Bilaga

Tekniska data

Dual-Band	GSM 900 / DCS 1800
Ytterligare funktioner	Bluetooth, nödanropsfunktion
Batteri	Li-Ionen, 3.7V, 900 mAh
Maximal hörlurs- Ljudstyrka	+40dB (brusfaktor < 5 %)
Drifttid	upp till 8 dagar
Samtalstid	c:a 7 timmar
Mått	125 x 56 x 15 mm
USB-anslutning	Micro USB, EU Standard
Hörluranslutning	3,5 mm hörlursjack
SAR-värde	GSM 900 MHz 0,216 W/kg DCS 1800 MHz 0,072 W/kg

Service-Hotline

Har du problem med din telefon, bör du först kontrollera förljande anvisningar. Vid tekniska problem vänder man sig vår Service-Hotline.

Telefonnumret hittar du på vår hemsida

www.amplicomms.com

Vid garantifrågor vänder du dig till din återförsäljare. Garanti tiden är 2 år.

Frågor och svar

Fråga

Telefonen går inte att sätta på.

Displayen är "spärrad" då telefonen sätts på.

Svar

- Den saknar batteri.
- Batteriet är inte laddat.

Använd PUK-koden för att "öppna spärren" på SIM-kortet. Vänd dig till din Serviceprovider.

Ingen signalstyrka visas. Ingen kontakt med nätet.

Telefonen kan befinna sig på en plats utan nättjänst. Flytta dig till en annan plats eller vänd dig till din Serviceprovider.

Tangenterna fungerar över huvud taget inte eller bara väldigt långsamt.

Displayens hastighet saktas ner på grund av låga temperaturer. Detta är normalt. Försök igen på en varmare plats.

Vid vissa funktioner visas ett meddelande på displayen, att utförandet/ användandet inte är möjligt.

Många funktioner kan användas först efter att de har beställts. Vänd dig till din Serviceprovider för ytterligare detaljer.

Displayen har frusit eller apparaten reagerar inte på tangenttryckningar. Ta ut batteriet i 3 minuter och försök igen.

Ingen kontakt med mobilradionätet.

Vänd dig till din Serviceprovider.

Meddelandet "Sätt i SIM" visas på displayen.

Säkerställ att SIM-kortet är riktigt isatt. Vänd dig om nödvändigt till din Serviceprovider.

Batteriet kan inte laddas upp eller blir snabbt tomt igen.

- Batteriet är defekt.
- Ställ i telefonen riktigt i laddaren och stäng laddaren ordentligt. Rengör kontakterna på telefonen och på laddaren med en mjuk, torr trasa.
- Ladda telefonen i 4 timmar.

Anvisningar beträffande batteriet

- Använd uteslutande batterier, kabel och laddningsutrustning som godkänts av tillverkaren, då batteriet i annat fall kan skadas.
- Kasta under inga omständigheter batterier i eld eller i vatten.
- Stäng batteriluckan ordentligt.
- Låt alltid batteriet sitta kvar i telefonen för att undvika skadliga kortslutningar vid batteriets kontakter.
- Håll batterikontakterna rena och fria från smuts.
- Batteriet kan laddas upp och laddas ur hundratals gånger, dess livstid är dock begränsad.
- Byt ut batterierna när kapaciteten har sjunkit betydligt.

Avsedd användning

Den här telefonen är avsedd för telefoni inom ett mobilnät. All annan användning anses vara ej avsedd användning. Egenmäktiga förändringar eller ombyggnationer är

inte tillåtna. Öppna under inga omständigheter apparaten själv och försök inte genomföra reparationer.

Användningsområde

- Använd inte telefonen i förbjudna områden.
- Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning (t.ex. på sjukhus).
- Använd inte telefonen på tankstationer eller i närheten av drivmedel eller kemikalier.
- Anmäl hos flygbolaget innan du använder telefonen ombord på flygplan, om du får lova att ha telefonen i drift.

Säkerhetsanvisningar

- Undvik rök, damm, klämning, kemikalier, fuktighet, värme och direkt solljus. Telefonen är inte vattentät; håll den torr.
- Använd uteslutande originaltillbehör och originalbatterier. Försök inte ansluta andra produkter än de som tillåts av tillverkaren.
- Om du vill ansluta andra produkter till telefonen, läs bruksanvisningen för denna produkt, för att få detaljerade säkerhetsanvisningar. Försök inte ansluta inkompatibla produkter.
- Reparationer på den här apparaten får endast utföras av kvalificerad service-personal.
- Det kan förekomma interferens hos alla mobiltelefoner, som kan skada telefonen.
- Förvara telefonen och dess tillbehör utom räckhåll för barn.

- Man kan ta ut SIM-kortet. Iakttag försiktighet! Småbarn kan svälja det.
- Ringtonen återges via högtalaren. Tag först hand om samtalet och håll sedan telefonen mot örat.
- Använd endast telefonen under bilkörning eller motorcykelkörning med tillåten handsfreeutrustning och lämpligt placerad hållare. Försäkra dig om att inga säkerhetsrelevanta funktioner störs vid användning av telefonen.
- Med implanterade pacemakers bör man alltid hålla ett avstånd på minst 15 cm, för att undvika eventuella störningar. Man bör inte bära telefonen påslagen i bröstfickan. Vid samtal håller man telefonen vid det i förhållande till pacemakern motsatta örat. Telefonen måste genast stängas av vid misstanke eller aning om minsta påverkan.
- Den här telefonen är hörapparatskompatibel. Om du bär en hörapparat bör du trots detta informera dig från

läkare eller hörapparatens tillverkare, om eventuell påverkan genom mobilradioutrustningen.

- Om du är ensam bör du vid nödläge inte bara förlita dig på mobiltelefonen. Av olika tekniska orsaker är det inte möjligt att garantera säker förbindelse i alla situationer.

Energiesparande nätdel



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Den inkluderade nätdelen uppfyller EU:s eko-designkrav för energidrivna produkter (direktiv 2005/32/EG).

Energiförbrukningen är därför såväl under användning som under standby tydligt lägre än nätdelarna till äldre modeller.

Avfallshantering

Om du vill kassera apparaten, skall den tas till en kommunal återvinningsstation. Enligt lagstiftning om elektro- och elektronisk utrustning är innehavaren av kasserade apparater skyldig att återföra gammal sådan utrustning för återvinning. Symbolen här intill betyder att du under inga omständigheter får kasta denna i hushållsavfallet!



Risker för hälsa och miljö pga. batterierna!

Batterier får inte öppnas, skadas, sväljas eller lämnas i naturen. De kan innehålla giftiga och miljöfarliga tungmetaller. Du är själv juridiskt ansvarig att återlämna eller kasta batterier i de särskilda behållare som ställs till förfogande för ändamålet. Avfallshanteringen är kostnadsfri. Symbolen här intill betyder att batterier under inga omständigheter får kastas i hushållsavfallet och att de måste lämnas till återvinningsstationer. Förpackningsmaterial kastas enligt lokala föreskrifter.



Konformitetsförklaring

Denna utrustning uppfyller kraven enligt EU-riktlinje: 1999/5/EG Riktlinje för radioanläggningar och telekommunikationsutrustning och ömsesidig bekräftelse på konformiteten. Konformiteten med ovan nämnda riktlinje bekräftas genom det befintliga CE-märket. För att läsa hela konformitetsförklaringen kan du ladda ner denna kostnadsfritt från vår hemsida, www.amplicomms.com

Anvisning för omvårdnad

- Rengör höljet med en mjuk och luddfri trasa.

Garanti

AMPLICOMMS apparater har tillverkats och testats enligt modernaste förfaranden. Särskilt utvalt material och högt utvecklad teknik sörjer för felfri funktion och lång livslängd. Garantifall föreligger inte om orsaken till apparatens felaktiga funktion ligger hos mobilnättsleverantören. Garantin gäller inte för batterier eller batteri-packar som

används i produkten. Garantitiden löper i 24 månader räknat från inköpsdagen. Under garantiperioden ersätts alla defekter på material eller framställningsfel kostnadsfritt. Garantianspråket upphävs vid ingrepp av köparen eller tredje part.

Skador som uppstått pga ej avsedd användning eller behandling, naturligt slitage pga felaktigt bruk eller förvaring, pga ej fackmannamässiga anslutning eller installation, eller som orsakats av vårdslöshet eller annan yttre påverkan, gör garantin ogiltig. Vid reklamationer förbehåller vi oss rätten att reparera delar, att ersätta eller byta ut delar eller hela apparaten. Utbytta delar eller utbytta apparater övergår till vår egendom.

Skadeståndsanspråk är uteslutna, såvida de inte grundar sig på grovt åsidosättande från oss. Skulle din apparat ändå uppvisa defekter under garantiperioden vänder du dig, med ditt kvitto, till den butik där du har inhandlat din AMPLICOMMS-utrustning. Alla skadeståndsanspråk är,

enligt dessa bestämmelser, uteslutande gentemot din återförsäljare. Efter ett förlopp av två år efter inköp och leverans av våra produkter upphör garantin att gälla.

Index

A

Aktiviteter	69
Alarm	68
Användarprofiler	57
Användningsområde	77
Anvisning för omvårdnad	83
Anvisningar beträffande batteriet	76
Återställ fabriksinställningar	66
Avbryt nödanropsfunktionen	56
Avfallshantering	81
Avsedd användning	76
Avsluta samtal	13
Avvisa samtal	13

B

Bakgrund	62
Batteriladdningsnivå	11
Bluetooth	64
Bordsladdaren	10

D

Datum och klockslag	13
Datum och tid	61
Direkt	27, 36

E

En snabbtitt	6
------------------------	---

F

Familjenummer	59
Förstärkning	60
Frågor och svar	14, 73

G

- Garanti 83
- Genomför samtalet 26

H

- Handsfree 28
- Hantering av telefonen . 24

I

- Innehåll 8
- Isättning av SIM-kort och
batteri 8

K

- Kalender 67
- Kalkylatorn 67
- Konferenssamtal 29
- Konformitetsförklaring . 83
- Kortfattad
bruksanvisning. 6

L

- Lagringsutrymme 31
- Ljudstyrkan. 28

M

- Mini-USB-
laddningskontakten. 10
- Minnesstatus 31
- Mute 29

N

- Nätåtkomsten. 12
- Nätverksinställningar . . 63
- Nödanropets förlopp. . . 55
- Nödanrops-
meddelande 53
- Nummer till
nödsamtalsfunktionen . 52

P

På-/avstängning av mobiltelefonen	25
Personligt inspelade nödanrop	54

R

Ring upp	13
--------------------	----

S

Säkerhetsanvisningar . .	78
Säkerhetsinställningar .	63
Sätta på-/av mobiltelefonen	11
Service-Hotline	73
Signalkontroll	60
SMS-Meny	39
Snabbval	26, 35
SOS	52

Spärra samtal	49
Specialfunktioner på vissa knappar	18
Språk	12, 62
Svarar i telefonen	27
Symboler på displayen .	22

T

Ta emot samtal	13
Tekniska data	72
Telefonbok	31
Telefoninställningar . . .	61
Telefonlistan	45
Tidtagarur	69
Tyst	29

U

Uppladdning av batteriet	10
------------------------------------	----

Upprepning	27
Uppringnings- inställningar	47
Uppringningslistan	27
Urkoppling av mikrofonen	29

V

Välj telefonnummer....	26
Välj uppringningsmål för nödsamtal.....	52
Vidarekoppla	47

Menyträd

Meddelanden

Skriv meddelande

Inkorg

Utkast

Utkorg

Skickade

SMS mallar

SMS inställningar

SIM card

Minnesstatus

Spara skickad meddelande

Föredragen lagring

Telefonbok (Altern.)

Se

Lägg till kontakt

Skicka textmeddelande

Ring upp

Redigera

Ta bort

Kopiera

Flytta

Lägg till till blockeringslista

Samtalsgrupp

Telefonboksinställningar

Föredragen lagring

Snappuppringning

ägare nummer
Minnesstatus
Kopiera kontakter
Flytta kontakter
Radera alla kontakter

Callcenter***Samtalshistoria***

Missade samtal
Uppringda samtal
Mottagna samtal
Radera samtalslista

Samtalsinställningar

Samtalsinställningar
Samtal vänter
Vidarekoppla
Spärra samtal
Avancerad inställningar
Blockeringslista
Automatisk uppringning
Visning av samtalstid
Minutsignal

SOS***SOS inställning***

SOS lägesinställning
Sätt SOS nummer
Callcenter nummer
Sätt utgående röst MEDD.

Spela in SOS MEDD.

Inställningar**Användarprofiler****Familjenummer****Signalkontroll****Ökning****Telefoninställningar**

Datum och tid

Schemalagd slå på/stäng av

Språk

Önskade inmatningsmetoder

Bakgrund

LCD Bakljus

Nätverksinställningar

Ny sökning

Välj nätverk

Valläge

Säkerhetsinställningar

SIM security

*SIM-kortlås**Ändra lösenord*

Lås upp knappsatsen automatisk

Bluetooth

Bluetooth

Synlighet

Min enhet

Sök ljudenhet

Mitt namn

Avancerad

Ljudväg

Min adress

Återställ fabrik Inställningar

Organisatör

Kalender

Kalkylatorn

Alarm

Aktiviteter

Tidtagarur

Tjänster

(Operatörsberoende)



Firma: Audioline GmbH
D-41460 Neuss
01/2013 – Utgåva 1.1

