

Univox P-Loop 2.0

Portabel slingväska

Snabbguide



Univox® P-Loop 2.0
Art nr 212031

Allmänt om inställningar

Alla produktdelar i slingväskan är inställda och klara att användas direkt. Skulle ändå frågor uppstå, är du självfallet välkommen att kontakta oss.

Bruksanvisning Univox P-Loop 2.0 Slingväska

Univox P-Loop 2.0 innehåller ett komplett portabelt system med en inbyggd förstärkare och en 35 meter lång slingkabel på kabelvinda. En 15 meter lång förlängningskabel samt testinstrumentet Univox Listener 2.0 är också inkluderade. Väskan kan utrustas med flera trådlösa mikrofonlösningar. Information om tillbehör eller relaterade produkter, finns sammanställda under avsnittet Tillbehör. Om du har köpt en slingväska med två trådlösa mikrofoner är nivån justerad från fabrik. Detaljerad instruktion om hur nivån på trådlösa mikrofoner och slingförstärkare skall justeras finns i medföljande separat bruksanvisning för Okayo trådlösa mikrofonsystem.

Vi hoppas att Univox P-Loop 2.0 Slingväska kommer att motsvara dina förväntningar.

Upprätta hörslingan

Placera slingväskan på lämpligt ställe längst den tilltänkta slingans perimeter. Om du inte har tillgång till en el-förlängningssladd, placeras väskan lämpligen inom räckhåll från vägguttaget för den inkluderade strömkabeln. Dra ut slingkabeln från kabelvindan och placera den runt det område som ska täckas av hörslingan. Endast den längd slingkabel som behövs för att nå runt behöver dras ut. Koppla slingkabelns båda ändar till förstärkarens slingterminal märkt  (8). Om så krävs finns ytterligare 15 m slingkabel, att användas som förlängning, i väskan. Med denna blir den maximala täckyten 150 m².

Koppla ljudkälla

Det finns tre olika ljudingångar.

XLR Mic 9-21 V phantom, (1) och XLR Line (2), samt en RCA-ingång, Line (5).

Justera ingångskänsligheten (Mic/Line XLR)

Ställ alla reglage till minimum position genom att vrida vreden (3) motsols så långt det går. Se till att alla eventuella ljudkällor som inte ska justeras är urkopplade. Slå på ljudkällan. Om det är ingångskänsligheten till en mikrofon som ska justeras bör även någon tala i mikrofonen. Om det är ingångskänsligheten till en annan ljudkälla som justeras bör således programmaterialiet spelas.

Justera känsligheten långsamt genom att vrida vredet till höger om ingången som ska justeras medsols till dess att indikeringen "In" (4) börjar lysa. Justeringen för känslighet bör ske för den svagaste signalen. M.a.o. vid justering av en mikrofon bör den person med


svagast röst tala i mikrofonen när känsligheten justeras. Överjustera inte känsligheten då detta kan leda till självsvängningar.

Notera

Ingen justering krävs för inkoppling via RCA, Line (5).

Anslutning till elnätet

Anslut nätsladden till uttaget märkt "110-240 VAC" på förstärkaren. Koppla den sedan till vägguttaget.

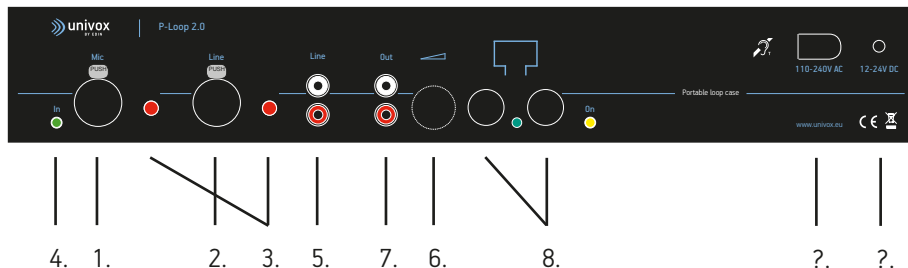

Justera slingströmmens utnivå

Justera slingströmmens utnivå med vredet märkt  (6) till vänster om slingterminalen  (8). Indikatorn under slingterminalen börjar pulsera i takt med ljudkällan när ström (ljudsignaler) sänds genom slingan.

Använd kontrollinstrumentet Univox Listener 2.0 (medföljer) till att justera rätt nivå (volym) för slingströmmen. Använd den medföljande bruksanvisningen för Univox Listener 2.0 för instruktioner om hur du använder instrumentet.

Trådlösa mikrofonsystem

Om du har köpt en slingväska med två trådlösa mikrofoner är nivån justerad från fabrik. Detaljerad instruktion om hur nivån på trådlösa mikrofoner och slingförstärkare skall justeras finns i bruksanvisningen för P-Loop 2.0.

Vidarekoppling

Ljudet från slingförstärkaren kan kopplas till ett externt system/anläggning via RCA uttaget "Out" (7). Om detta system har högtalare, var då varse om eventuell rundgång.

Instruktion för användning av kabelrullen

Tag båda kontakterna i ena handen och kabelrullen i den andra. Dra båda kablarna samtidigt rakt ut från kabelrullen till önskad kabellängd. Dela därefter på kablarna och lägg dem längs med gränserna på det område som du vill täcka med teleslingan. Anslut sedan kabeln till slingförstärkarens slingutgång.

Vid inrullning

Samla ihop kablarna och lägg dem parallellt med varandra. Veva sakta in kablarna samtidigt som du håller dem sträckta. Du kan sträcka kablarna genom att låta dem löpa runt t.ex. ett bordsben. Eftersom kablarna rullas in i varsin del av rullen kan det inträffa att den ena kabeln rullas in före den andra. Om kablarna rullas in ojämnt, rulla ut båda kablarna igen och försök rulla in dem en gång till och sträcka kablarna bättre.

Snabbguiden är baserad på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande.

Återförsäljare



Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

Hearing excellence since 1965


BY EDIN