

# Artone MIC

Trådlös mikrofon och Bluetooth-sändare  
för Artone 3 MAX



## Egenskaper

- Bluetooth frekvensområde A2D2
- Tydlig, förstärkt kommunikation
- Rundupptagande mikrofon
- Stereo
- Justerbar mikrofonkänslighet
- 3,5 mm-ingång
- Upp till 7 timmars användningstid
- Uppladdningsbara batterier
- USB-laddningssladd, ingår
- Kompatibel med Artone 3 MAX
- Fästklämma
- Mute-funktion
- Storlek 53x18,3x17 mm
- Vikt 9,5 g
- Räckvidd 10-20 m in/utomhus
- Användningstid upp till 7 h
- Laddningstid 90 min
- Laddningsspänning 5 VDC
- Artikelnr: 277031

### Ingår:

- 3,5 mm-audiosladd (10 cm)
- USB-laddningskabel (20 cm)
- Extern myggmikrofon (150 cm)

## Mikrofonen förstärker omgivande ljud

Artone MIC är en trådlös mikrofon och Bluetooth-sändare som kopplas ihop med Artone MAX 3 halsslinga. Artone MIC hjälper dig att höra i svåra ljudmiljöer som restauranger, fester och sammanhang med mycket sorl och bakgrundsljud. Sätt mikrofonen så nära ljudkällan som möjligt, dvs antingen kan talaren bära den med hjälp av klämman eller så placeras mikrofonen t ex på bordet eller dig själv. Mikrofonens känslighet går att justera beroende på avståndet till det ljud man vill förstärka. Det går också att välja den externa myggmikrofonen.

Din hörapparat behöver inte Bluetooth, endast T-spole. Ljudet sänds trådlöst till din Artone 3 MAX-halsslinga, som omvandlar ljudet till ett magnetfält vilket din hörapparat plockar upp via t-spolen.

## Ljudåtergivning från annan enhet


Artone MIC har en 3,5 mm-ingång, genom vilken man kan koppla in t ex telefon, surfplatta, dator, radio, mp3 eller annan ljuduppspelningsutrustning som inte har egen bluetooth. Artone MIC omvandlar ljudet och sänder det trådlöst till halsslingan. Räckvidden är 10-20 m in- respektive utomhus.

## Liten och nätt

Artone MIC är liten och nätt. Den går att bära utan att den varken syns eller märks särskilt mycket, samtidigt som du får två funktioner i ett, både mikrofon- och Bluetooth-sändare. Den har ett inbyggt uppladdningsbart batteri med lång användar- och standbytid.

Artone MIC uppgraderar din hörapparat till högsta möjliga nivå, och gör det möjligt att lyssna på konversationer, musik eller telefon med rent och tydligt ljud.

Artone MIC tillsammans med 3 MAX kan användas i många situationer:

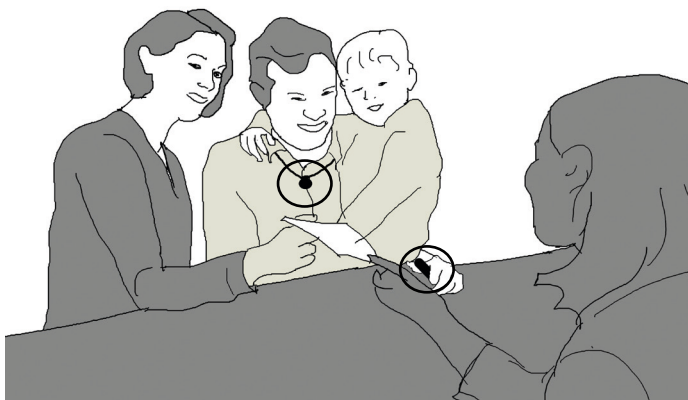

Vid informationsdisken eller kassan  
Rikta MIC:en mot den talande personen.



Samtal  
Lägg MIC:en på bordet eller sätt fast den på den talande personen.



Framför TV:n  
Lägg MIC:en nära TV:ns högtalare eller koppla ihop den i TV:ns audioutgång.



Sänd trådlöst från mobilen  
Koppla ihop MIC:en med din telefon, surfplatta, radio eller dator och sänd ljudet trådlöst till din 3 MAX.



I bilen  
Sätt fast MIC:en på den talande personen alternativt använd den externa myggmikrofonen.



Miljöer med mycket sorl  
Lägg MIC:en på bordet eller sätt fast den på den talande personen.