



Artone TVB

Bluetooth-streamer för Artone 3 MAX

Egenskaper

- Bluetooth-streamer till Artone 3 MAX
- Bluetooth-adapter för trådbunden ljudanläggning
- Bluetooth-parning med 1 el 2 andra enheter
- 3,5 mm-audio-in/utgång
- SPDIF-in- och utgång
- Uppladdningsbart batteri
- Räckvidd 10 m
- Användningstid:
upp till 15 h (AUX-läge)
upp till 12 h (SPDIF-läge)
- Micro-USB-port för laddning
- Laddningstid ca 2 h
- Storlek 59x 59x19 mm
- Vikt 39,4 g
- Laddningsspänning 5 VDC
- Bluetooth-version v 4.1
- Bluetooth-profil A2DP/ACRCP
- Batterikapacitet 350 mAh
- Artikelnr: 277030

Ingår:

- Optisk kabel (1 m)
- 3,5 mm-audiosladd (10 cm)
- USB-laddningskabel (80 cm)
- 3,5 mm-RCA-sladd (20 cm)

Trådlös streamer

Artone TVB är en Bluetooth-sändare som används för att föra över ljud från tv eller radio till en Bluetooth-mottagare, exempelvis halsslingan Artone 3 MAX för att lyssna på ljudet via din hörapparat. TVB kan paras ihop med en eller två Bluetooth-enheter. Två användare kan alltså använda streamern till sina 3 MAX samtidigt.

Du kan också använda TVB som en Bluetooth-adapter för att föra över ljudet från t.ex. en smartphone till en högtalare som inte har inbyggt Bluetooth.

TVB har ett inbyggt uppladdningsbart batteri, som laddas via USB-porten.

TVB har både 3,5 mm-, och SPDIF in- och utgång.

Två funktioner: sändare och mottagare

TX-läge – sändare (streamer)

Du kan lyssna på ljud från t ex en tv, dator eller cd-spelare i en eller två trådlösa Bluetooth-mottagare. TVB fungerar då som en Bluetooth-sändare. Ljudet går in via kabel och ut via Bluetooth.

RX-läge – mottagare (adapter)

Du kan också använda TVB tvärtom, som en Bluetooth-mottagare, genom att para den med en eller två andra Bluetooth-enheter, t ex smartphone eller surfplatta, och föra över ljudet från dessa till en trådbunden ljudenhet, som ett högtalarsystem. Det går dock bara att lyssna på ett inkommande ljud i taget. Ljudet kommer in via Bluetooth och går ut via kabel.



Artone TVB har två grundfunktioner:



TX-läge

Lyssna på TV* via Artone 3 MAX eller annan Bluetooth-mottagare. Koppla ihop TVB och TV:n med audio- eller optisk kabel, så sänds ljudet från TV:n via Bluetooth till 3 MAX.

Om din 3 MAX-halsslinga är parat med en telefon, bryts TV-ljudet när telefonen ringer och du kan svara på samtalet. TV-ljudet återupptas när du lägger på.

TX-funktionen kräver en Bluetooth-mottagare, ex 3 MAX och hörapparat med t-spole.

* TV, radio eller annan ljudenhet som inte har Bluetooth



RX-läge

Använd TVB som Bluetooth-mottagare. Para TVB med en smartphone* och koppla ihop TVB och ljudanläggningen med en audiosladd. Då sänds ljudet från telefonen till högtalaren via Bluetooth.

*Smartphone, surfplatta eller annan enhet som har Bluetooth

Tillbehör:

Artnr: 276040 Artone 3 MAX halsslinga

