

# Univox® NL-100

## Halsslinga



# ANVÄNDARMANUAL

En induktiv halsslinga är ett personligt hörhjälpmedel för personer med nedsatt hörsel som bär hörapparater utrustade med T-spole. Varje hörapparat är konfigurerad med anpassad frekvensrespons och dynamiskt omfång för användarens specifika hörselnedsättning. NL-100 överför ljud från den anslutna enheten med kristallklar kvalitet, anpassat för användaren och med minimal fördröjning.

## Univox® NL-100

Univox® NL-100 kan anslutas till och ta emot signaler från olika ljudkällor. Den summerar höger och vänster ljudkanal för att säkerställa en stark och stabil signal för användaren. En förlängningskabel på 70 cm medföljer i paketet.

### Anslutning och allmän information

Så här använder du NL-100:

- Bär slingan över huvudet runt halsen
- Anslut NL-100 till hörlursuttaget på din enhet
- Ställ hörapparaten i teleläge (T-läge)
- Justera volymen på din enhet

**OBS!** Vi rekommenderar att du ställer in volymen på din enhet på lägsta nivå innan du ansluter NL-100 för att undvika plötsliga höga ljud som kan skada din hörapparat.

### Underhåll, skötsel och service

Under normala omständigheter kräver produkten inget särskilt underhåll. Torka av enheten med en ren, fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel. Kontrollera regelbundet att kablar och kontakter inte är skadade. Om enheten inte fungerar som förväntat, kontakta din återförsäljare eller lokala distributör för vidare instruktioner.

### Miljö och återvinning



För att undvika eventuell påverkan på miljö och hälsa, kassera produkten enligt lokala regler för elektronikavfall. Bo Edin AB är anslutet till FTI och El-Kretsen. Genom att följa dessa återvinningsanvisningar bidrar du till en bättre miljö.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|              |                   |                               |
|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Resistans    |                   | 2 x 12,5 Ohm                  |
| Brytfrekvens |                   | 2,6 kHz, -3 dB @ 1kHz         |
| Anslutning   |                   | 3,5 mm kontakt                |
| Dimensioner  | Omkrets           | 74 cm                         |
|              | Anslutningskabel  | 20 cm                         |
|              | Förlängningskabel | 70 cm                         |
| Vikt (netto) |                   | 20 g, inkl. förlängningskabel |
| Art.nr.      |                   | 283103                        |
| Standarder   |                   | CE WEEE                       |

För mer information, besök [univox.se](https://univox.se)



Univox / Bo Edin AB  
Stockby Hantverksby 3  
181 75 Lidingö



[info@univox.eu](mailto:info@univox.eu)  
[univox.se](https://univox.se)



08-767 18 18

